




QuikRead go[®] HbA1c

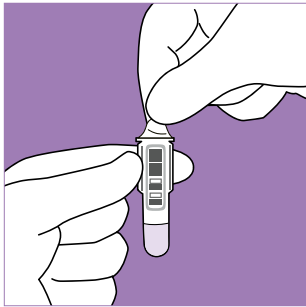


1 Verwijder het beschermfolie. Raak de doorzichtige oppervlakten van de cuvet (optisch gedeelte) niet aan.

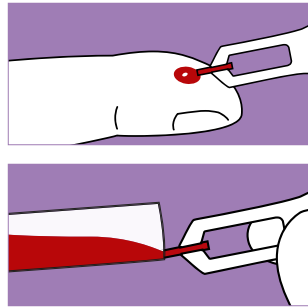


2 Houd de QuikRead go Sample Collector 1µl bijna horizontaal en plaats de punt net onder het oppervlak van de bloeddruppel. Vul het capillaire gedeelte volledig.

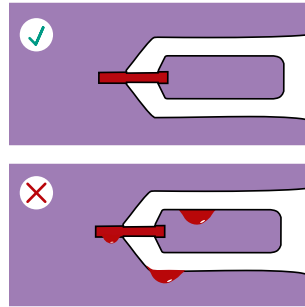


Note! Controleer of het capillair volledig gevuld is en of er geen luchtbellen in zitten. **Veeg de sample collector niet af!** Zit er sample aan de buitenkant van de collector, gooi deze dan weg en neem een nieuwe.

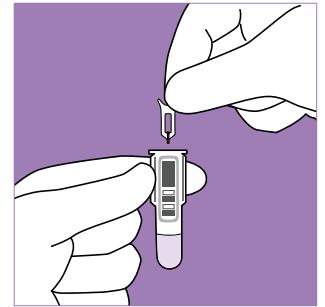

3 Plaats de sample collector binnen 1 minuut in de cuvet. De sample collector raakt de vloeistof in de cuvet niet aan.

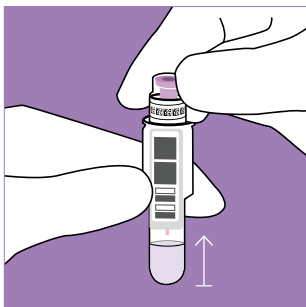

4 Sluit de cuvet af met de HbA1c reagens dop. Druk het paarse gedeelte van de dop niet in. Test binnen 5 minuten uitvoeren. **Cuvet rechtophouden en niet schudden.**

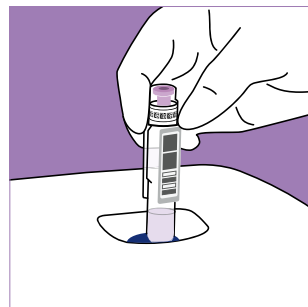

5 Selecteer **Metten** op het scherm van het Quikread go Instrument. Plaats de cuvet met de barcode naar voren gericht.



6 Uitslag verschijnt op het scherm en de cuvet komt automatisch omhoog.

Lees de volledige bijsluiter voordat u de test gaat gebruiken.

QuikRead go[®] HbA1c



Kit

Ongeopende kit 2–8°C: zie [houdbaarheidsdatum](#) van de kit
Ongeopende kit 18–25°C: **2 maanden**



Cuvetten

Ongeopende plastic verpakking 2–8°C: zie [houdbaarheid](#) op de kit
Ongeopende cuvetten na openen van de plastic verpakking:
2–8°C: **6 maanden** / 18–25°C: **2 maanden**



Open cuvet

Buffer op temperatuur laten komen 18–25°C
Test binnen **1 uur** uitvoeren na openen van de cuvet
Sample blijft met gesloten cap **5 minuten** stabiel in de buffer



Koker met
reagent caps

Ongeopende koker 2–8°C: zie [houdbaarheidsdatum](#) van de kit
Na openen 2–8°C: **6 maanden** / 18–25°C: **2 maanden**



Sample
collectors

Bewaren bij 2–25°C:
[houdbaarheidsdatum](#) staat op de verpakking van de Sample
Collector 1µl doos



HbA1c
controle set

Ongeopend 2–8°C: zie [houdbaarheidsdatum](#)
Geopend 2–8°C: tot **50 dagen**

Contact info

Aidian Belgium BV

info@aidian.be

+31 (0)317 35 18 38

Orders: cs@aidian.be

aidian.be

quikread.com

Product	Cat. nr.
QuikRead go HbA1c met QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 testen	OD-151058
QuikRead go HbA1c Control Set	OD-154520
QuikRead go Instrument	OD-133893
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 st	OD-154457