




# QuikRead go HbA1c

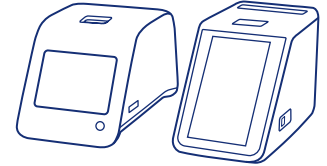


Voor QuikRead go Instrument en QuikRead go Plus Instrument

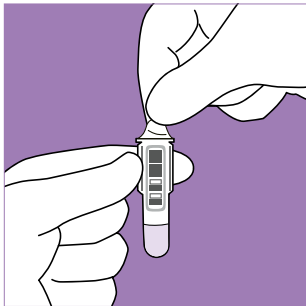


**1** Verwijder de beschermfolie. Raak de doorzichtige oppervlakten van de cuvet (optisch gedeelte) niet aan.

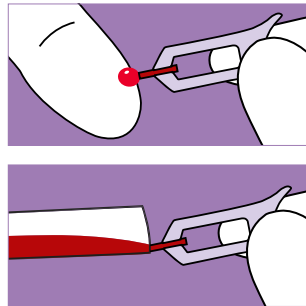


**2** Houd de QuikRead go Sample Collector 1µl bijna horizontaal en plaats de punt net onder het oppervlak van de bloeddruppel. Vul het capillaire gedeelte volledig.

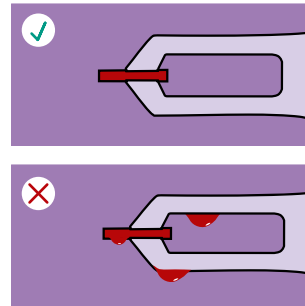


Let op! Controleer of het capillair volledig gevuld is en of er geen luchtbellen in zitten. Veeg de sample collector niet af! Zit er sample aan de buitenkant van de collector, gooi deze dan weg en neem een nieuwe.

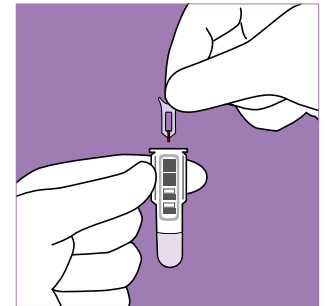


**3** Plaats de sample collector binnen 1 minuut in de cuvet. De sample collector raakt de vloeistof in de cuvet niet aan.

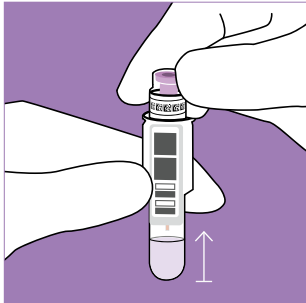

**4** Sluit de cuvet af met de HbA1c reagens dop. Druk het paarse gedeelte van de dop niet in. Test binnen 5 minuten uitvoeren. Cuvet rechtophouden en niet schudden.

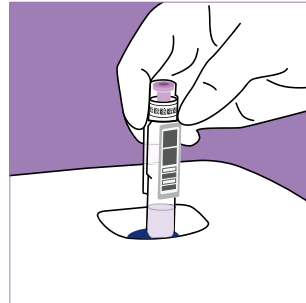


**5** Kies Meten / Monster meten op het scherm van het QuikRead go instrument. Plaats de cuvet in het instrument.

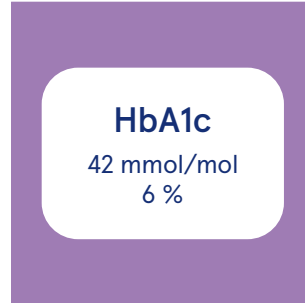

**6** De meettijd bedraagt minder dan 6 minuten. Het resultaat wordt weergegeven op het scherm en de cuvet komt automatisch omhoog wanneer de meting voltooid is.

Lees de volledige bijsluiters voordat u de test gaat gebruiken.

# QuikRead go HbA1c

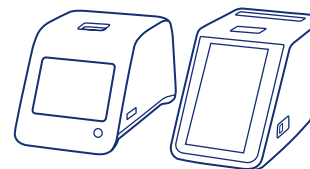

Kit

Ongeopende kit 2–8°C: zie houdbaarheidsdatum van de kit  
Ongeopende kit 18–25°C: 2 maanden



Koker met reagent caps

Ongeopende koker 2–8°C: zie houdbaarheidsdatum van de kit  
Na openen 2–8°C: 6 maanden / 18–25°C: 2 maanden



Cuvetten

Ongeopende folie verpakking 2–8°C: zie houdbaarheid op de kit  
Ongeopende cuvetten na openen van de folie verpakking:  
2–8°C: 6 maanden / 18–25°C: 2 maanden



Open cuvet

Buffer op temperatuur laten komen 18–25°C  
Test binnen 1 uur uitvoeren na openen van de cuvet  
Sample blijft met gesloten cap 5 minuten stabiel in de buffer



Sample collectors

Bewaren bij 2–25°C: houdbaarheidsdatum staat op de verpakking van de Sample Collector 1µl doos



HbA1c controle set

Ongeopend 2–8°C: zie houdbaarheidsdatum  
Geopend 2–8°C: tot 50 dagen

## Contacten en bestellingen

Aidian Belgium BV

info@aidian.be / +31 (0)317 35 18 38

Orders: cs@aidian.be

quikread.com

Product	Cat. nr.
QuikRead go HbA1c met QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 tests	OD-151058
QuikRead go HbA1c Control Set	OD-154520
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 pcs	OD-154457
QuikRead go Instrument	OD-133893
QuikRead go Plus Instrument	OD-155378