

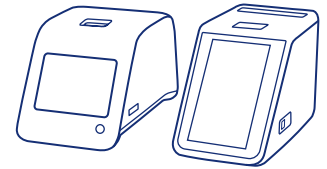
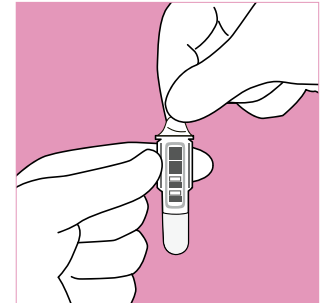
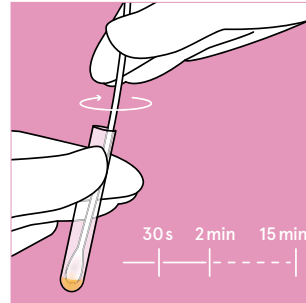


# QuikRead go Strep A




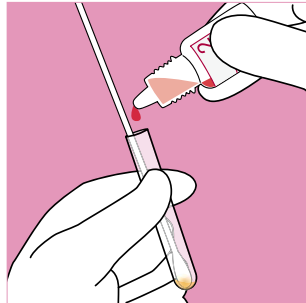


Voor QuikRead go Instrument en QuikRead go Plus Instrument

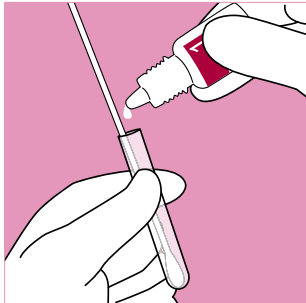



**1** Neem een keelmonster met een swab die bedoeld is voor de kit. Breng de swab in de extractiebuis en voeg twee druppels kleurloos Extractiereagens 1 toe. Voeg twee druppels Extractiereagens 2 toe. De oplossing wordt geel-oranje.

**2** Laat de swab nog 1,5 minuut in de oplossing staan, maar niet langer dan 15 minuten. Verwijder de beschermfolie van de cuvet. Raak de doorzichtige oppervlakten van de cuvet (optisch gedeelte) niet aan.

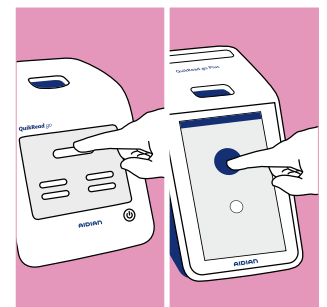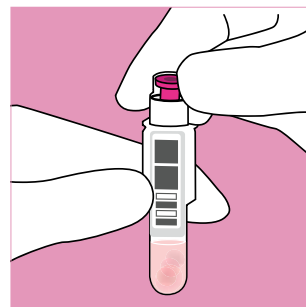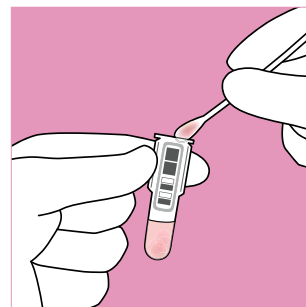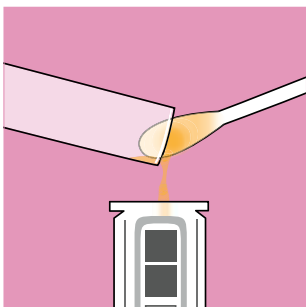

**3** Kantel de extractiebuis en schuif de swab tegen de binnenwand en breng de oplossing met behulp van de swab in de cuvet. Als er een grote hoeveelheid vloeistof in de buis achterblijft, giet deze dan in de cuvet. Roer krachtig, de oplossing wordt rood. Druk de swab tegen de binnenwand wanneer u deze eruit haalt.


**4** Sluit de cuvet goed af met de Strep A reagens dop. Druk het roze gedeelte van de dop niet in. Test binnen 4 uur uitvoeren. Kies Metten / Monster meten op het scherm van het QuikRead go instrument.

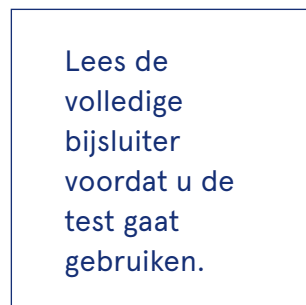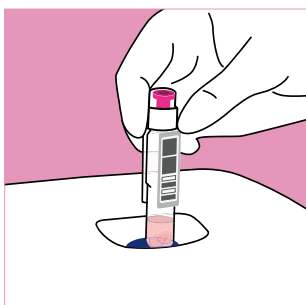

**5** Plaats de cuvet met de barcode naar voren gericht in het apparaat. De meettijd bedraagt minder dan 4 minuten. Het resultaat wordt weergegeven op het scherm en de cuvet komt automatisch omhoog wanneer de meting voltooid is.

Lees de volledige bijsluiter voordat u de test gaat gebruiken.

# QuikRead go Strep A

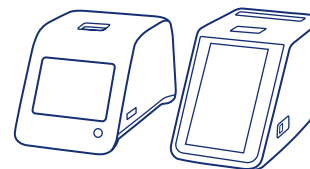

Kit

Ongeopende kit 2–25°C: zie houdbaarheidsdatum van de kit.



Koker met reagent caps, extractive reagens en controles

Ongeopende koker 2–25°C: zie houdbaarheidsdatum van de kit.  
Na openen 2–25°C: 12 maanden.



Cuvetten

Ongeopende folie verpakking 2–25°C: zie houdbaarheidsdatum op de kit.  
Ongeopende cuvetten na openen van de folie verpakking: 2–8°C: 6 maanden / 18–25°C: 3 maanden.




Open cuvet


Buffer op temperatuur laten komen 18–25°C.  
Test binnen 2 uur uitvoeren na openen cuvet.

## Monstername instructies


Bij uitvoering van de test is het belangrijk om de swab tijdens de extractie in de cuvet rond te draaien. Vergeet niet om de swab tegen de binnenwand te drukken wanneer u deze uit de cuvet haalt.

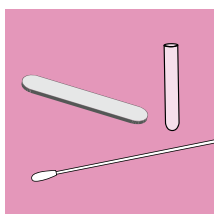


**1** Verzamel alles wat u nodig hebt voor monsternaming: HydraFlock swab, tongspatel en QuikRead go Strep A Extractiebuis. Draag beschermende kleding, inclusief wegwerphandschoenen. Gebruik alleen HydraFlock swabs die bedoeld zijn voor de QuikRead go Strep A kit. Het gebruik van andere swabs kan valse resultaten opleveren, zowel positief als negatief.

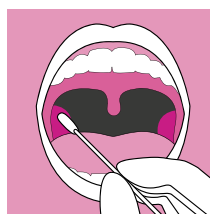

**3** Verzamel het slijm/mondvocht met de swab. Voor een goed monster moet u de swab draaien. Strep A infecteert de tonsillen, vergeet niet aan beide zijden te swabben. Een elders genomen monster kan een negatief resultaat opleveren. Een grote hoeveelheid speeksel of microben uit andere delen van de mond kunnen de test verstoren.

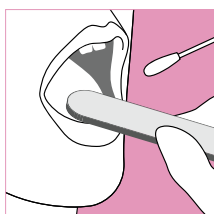

**2** Haal de steriele HydraFlock flocked swab uit het zakje. Vraag de patiënt de mond te openen. Gebruik de spatel om de tong naar beneden te drukken en neem het monster af.

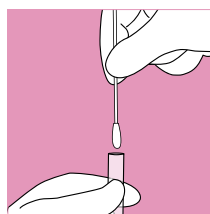

**4** Neem de swab uit de mond en stop deze in het extractiebuisje. Raak geen andere mondoppervlakken aan om besmetting met de normale flora te voorkomen. Zorg voor een correcte extractie. Let op kleurveranderingen. De kleur geeft een correcte pH aan, zowel tijdens de extractie als tijdens de neutralisatie. Volg de gegeven tijdlijnen.

## Contacten en bestellingen

Aidian Belgium BV

info@aidian.be / +31 (0)317 35 18 38

Orders: cs@aidian.be

quikread.com

### Product

QuikRead go Strep A

QuikRead go Instrument

QuikRead go Plus Instrument

### Cat. nr.

OD-135883

OD-133893

OD-155378