

Instruktioner för att rengöra Quikread go instrument

1. Rengör instrumentets utsida regelbundet med en luddfri trasa fuktad med vatten
2. Var särskilt uppmärksam på rengöring av skärmen
3. Se till att ingen vätska rinner ut på kanterna på skärmen, i mätbrunnen eller i kontakterna
4. Vid behov kan ett mildt rengöringsmedel användas
5. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande ämnen
6. Spill av potentiellt infektiöst material ska omedelbart torkas bort med absorberande pappersduk och de kontaminerade områdena torkas med ett vanligt desinfektionsmedel eller 70% etylalkohol.
7. Material som används för att rengöra spill, inklusive handskar, ska kasseras som biologiskt farligt avfall.

Med anledning av GDPR-förordningen måste alla patientresultat raderas innan instrumentet skickas. Gå till Resultat > Ta bort resultathistorik.

Säkerställ att instrumentet återställs till ursprungsinställningar, skall EJ kräva patient- eller admin-ID. Uppkoppling till LIS/HIS måste tas bort innan instrumentet skickas till oss.

Behöver ni hjälp med detta når ni oss på **08-623 04 00**.

Uppgift	Datum	Signatur
Rengöring av utvändiga ytor		
Radering av instrumentets patientdatahistorik, samt återställning till ursprungsinställningar		