



Uricult® Trio Model Chart

Jednoduchá kultivace moči přímo na pracovišti!

Uricult® Trio

Systém pro detekci bakteriurie založený na kultivaci.

- Informace pro objednání: 68197 Uricult Trio, 10 testů
- Médium CLED pro celkový počet bakterií
- Selektivní MacConkey médium pro gramnegativní bakterie
- E. coli médium pro gramnegativní β -glukuronidázu produkující organizmy jako je E. coli, na kterém mohou růst i některé kvasinky
- Detekční rozsah 10^3 - 10^7 CFU/ml
- Uchovávejte při teplotě 7-25°C, chraňte před průvanem a výkyvy teplot
- Doba použitelnosti šest měsíců od data výroby
- Inkubace při 36 ± 2 °C po dobu 16-24 hodin, v některých případech může být požadována inkubace dalších 24 hodin

Odběr vzorku

Před odběrem vzorku pro bakteriální kultivaci by měla být moč v močovém měchýři po dobu čtyř hodin. Vzorek inokulujte hned po odběru nebo ho před inokulací můžete uchovat v chladničce (2-8 °C) po dobu až 24 hodin. Některé léky (zejména antibiotika) mohou ovlivnit výsledky. Vzorek by proto neměl být odebírán dříve než 48 hodin po poslední dávce léků.

Více informací naleznete v návodu k použití.



Je to tak jednoduché!



Ponořit nebo polít



Inkubovat



Vyhodnotit

Uricult[®] Trio

Mikroorganismy na médiích



Hustota kolonií *Escherichia coli* CFU/ml

