



QuikRead go[®] easy CRP



Lassen Sie die Kontrolle vor der Verwendung **30 Minuten lang bei Raumtemperatur** akklimatisieren. Achten Sie auf das vollständige Verschließen der selbst-abdichtenden Kappe.

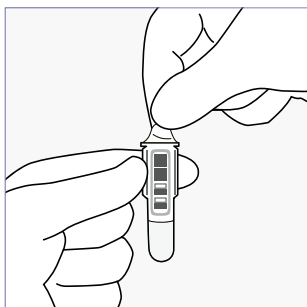



1 Entfernen Sie die Abdeckfolie von der Küvette. Berühren Sie nicht die klare abgerundete Fläche im unteren Teil der Küvette.

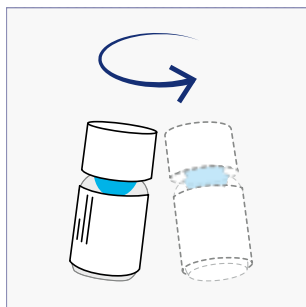


2 Mischen Sie die Qualitätskontrolle **vorsichtig** durch schwenken. **Nicht schütteln**, um Schaumbildung zu vermeiden! Falls sich ein Film am oberen Flaschenhals gebildet hat, warten Sie bis er platzt oder entfernen Sie ihn vorsichtig mit einer Ecke eines fusselfreien Papiertuchs. Achten Sie auf einen sauberen Flaschenhals.

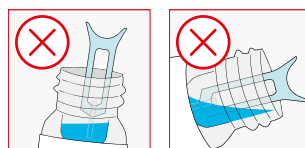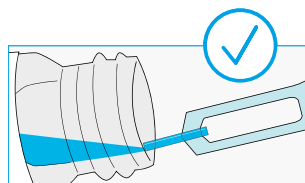


3 Kippen Sie die Qualitätskontrolle bis die Kontrolllösung den Flaschenhals erreicht. Halten Sie den Probennehmer fast horizontal und tauchen dann die Kapillare knapp **unterhalb der Oberfläche der Kontrolllösung ein**. Füllen Sie die Kapillare des Probennehmers vollständig.

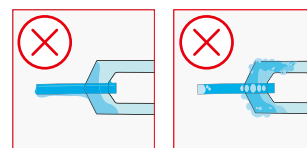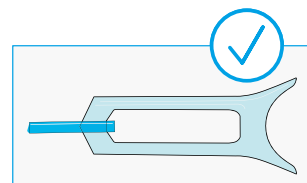


Achtung! Tauchen Sie den Probennehmer nicht in den Schaum oder vollständig in das Kontrollfläschchen. Wenn sich überschüssiges Probenmaterial oder Luftblasen auf dem Probennehmer (oder im Kapillarteil des Probennehmers) befinden, werfen Sie diesen und nehmen eine neue Probe. Wischen Sie den Probennehmer außen nicht ab.

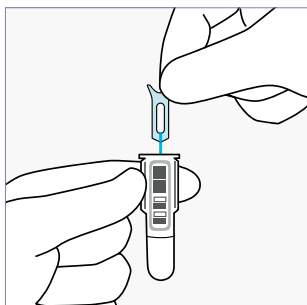

4 Führen Sie den Probennehmer innerhalb von 2 Minuten in die Küvette ein.

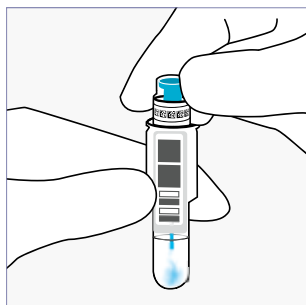

5 Schließen Sie die Küvette fest mit dem easyCRP-Reagenzstopfen. Der türkisfarbene innere Teil dabei nicht herunter drücken. **Führen Sie den Test innerhalb von 15 Minuten durch.**

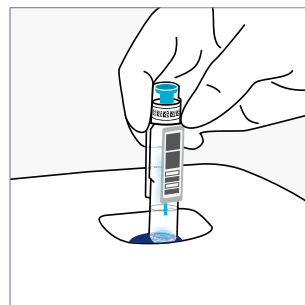

6 Wählen Sie **Qualitätskontrolle** auf dem Display des QuikRead go Instruments. Setzen Sie die Küvette mit dem Barcode nach vorne gerichtet in das Küvettenfach ein.



7 Nach Abschluss der Messung wird das Ergebnis auf dem Display angezeigt. Die Küvette fährt automatisch aus dem Küvettenfach zur Entnahme heraus. Den Messwertebereich entnehmen Sie dem Etikett auf der Qualitätskontrolle.

Lagerung

Geöffnetes Fläschchen ist bei 2...8°C für 2 Monate stabil.

Achtung! Damit der selbst-abdichtende Mechanismus des Schraubverschlusses richtig funktioniert, muss dieser soweit zugeschraubt werden bis er nicht mehr anzieht (2 volle Umdrehungen). Vermeiden Sie es, die letzten Tropfen zu nutzen.