



Acro hCG Graviditet Hurtig tests

Acro hCG Hurtig Dipstick-test

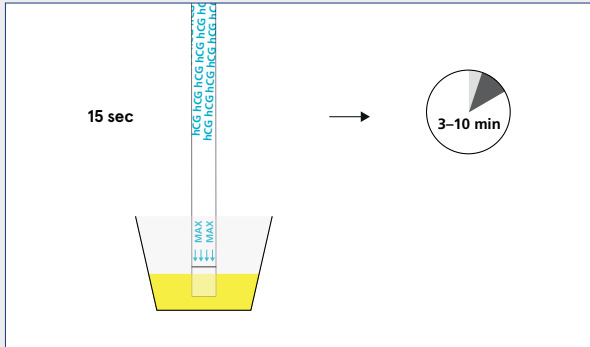



Med pilene pegende nedad, placer dipstick i røret. Nedsænk testen i urinen i mindst 15 sekunder. Anbring dipstick på en ikke-absorberende overflade og start timeren. Læs resultaterne efter 3 minutter. Fortolk ikke resultaterne efter 10 minutter.

Acro hCG Hurtig Kasette test

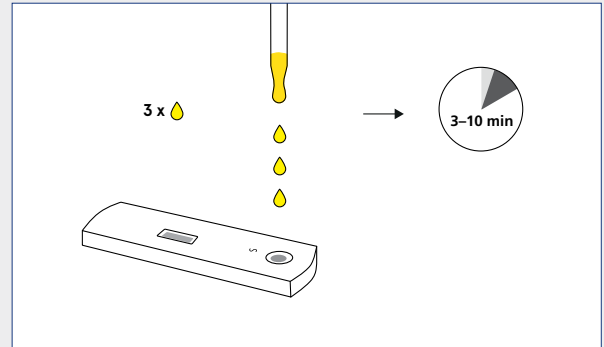



Placer testkassetten på en ren og plan overflade. Hold dråbetælleren lodret, og tilføj 3 dråber urin til prøve brønden. Start timeren. Læs resultaterne efter 3 minutter. Fortolk ikke resultaterne efter 10 minutter.

Fortolkning af resultaterne

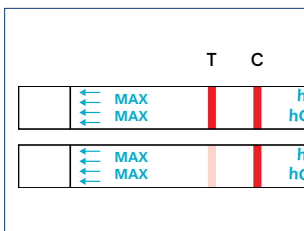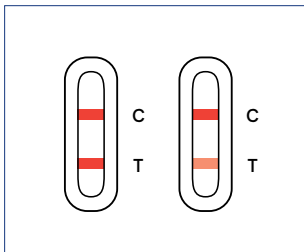



Positivt resultat

To farvede linjer vises. En linje vises i kontrollinjeregion (C) og en linje vises i testen linje region (T).

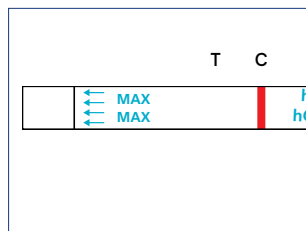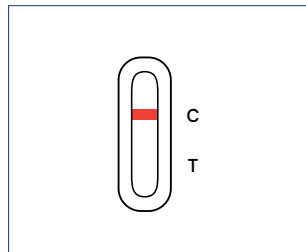

Negativt resultat

En farvet linje vises i kontrollinjeregionen (C). Der vises ingen linje på testen linje region (T).

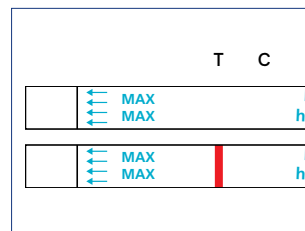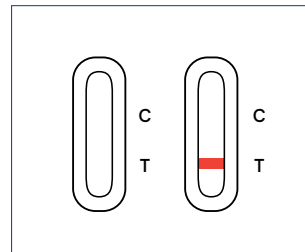

Ugyldigt resultat

Kontrollinje (C) udebliver. Gennemgå proceduren og gentag testen med en ny test. Hvis problemet fortsætter, afbryd brugen af testkittet og kontakt Aidian's repræsentant.

Læs venligst brugsvejledningen inden testen udføres.

Acro hCG Graviditet Hurtig tests

Kun til professionel *in vitro*- diagnostisk brug

Prøveindsamling og håndtering

- Saml urinprøven i en ren og tør beholder.
- Urinprøver kan opbevares ved 2–8 °C i op til 48 timer inden testen udføres.

Hurtig test til tidlig påvisning af hCG i urin

- Human chorionic Gonadotropin (hCG) produceres af placenta, og dens koncentration stiger hurtigt efter befrugtning hvilket gør det til en fremragende markør til tidlig påvisning af graviditet. Acro hCG-graviditet Hurtig tests er en hurtig kromatografisk immunanalyse til hjælp med tidlig påvisning af graviditet.

Let at bruge

- Nem testprocedure
- Klare farvereaktioner for let resultat tolkning

Pålidelig og hurtig

- Resultater på 3 minutter
- Intern kontrol sikrer korrekt testfunktion



Kontakt information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk

+45 86103020

www.aidian.dk

Produkt	Produkt nr.	Vare nr.
Acro hCG Pregnancy rapid test Urine Dipstick, 50 tests	6404158	154357
Acro hCG Pregnancy rapid test Urine Cassette, 25 tests	6404157	154584