
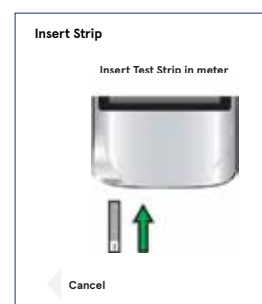
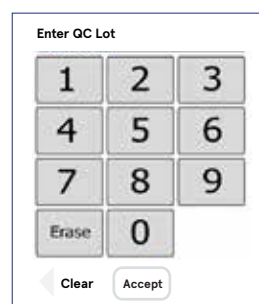
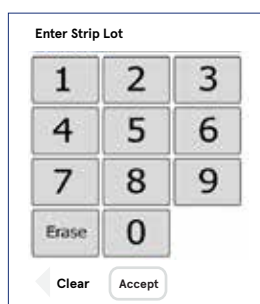
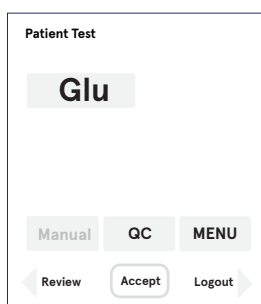


Nova StatStrip Glucose og β -Ketone Hospital Instrument

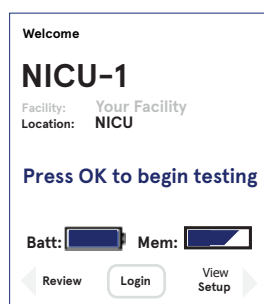



1 Tryk på [Login](#) ogscan eller indtast Operatør-ID. Tryk på [Accepter](#).

2 Skift til kvalitet kontrol test ved at trykke på QC eller tryk på [Accepter](#) for at udføre en patienttest.

3 Scan strip LOT-nummer fra stregekoden på test strip prøvebeholderen og tryk på [Accepter](#).

4 Scan eller indtast patient-ID eller QC materiale LOT-nummer. Tryk på [Accepter](#).

5 Indsæt test strip i instrumentet

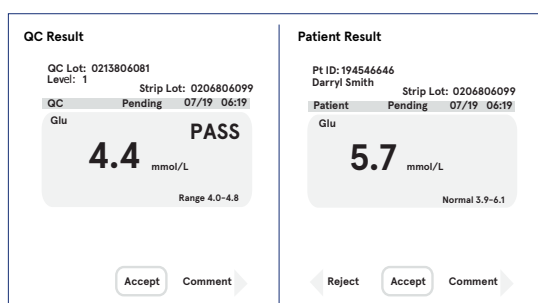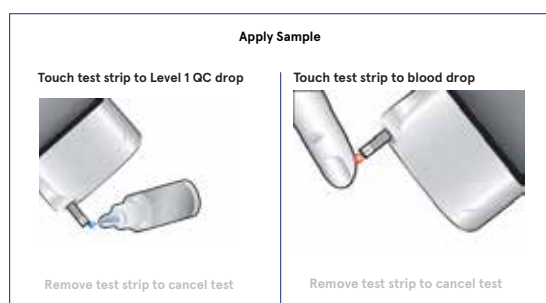

6 Påfør prøven for enden af strimlen ved at strimlen rører ved QC dråben eller patientens blodprøve. Hold måleren på en plan overflade eller lodret. Bland forsigtigt kontrol-opløsningen inden brug og kassér den første dråbe kontrolmateriale. **Bemærk: Undgå at få prøvemateriale ind i stripporten.**

7 Instrumentet vil vise resultatet. Patient test resultater kan accepteres ved at trykke på [Accept](#) knappen. Ved at trykke på [Reject](#) knappen afvises resultatet og en kommentar kan tilføjes resultatet med [Comment](#) knappen. For QC materiale vil instrumentet vise [Pass](#) eller [Fail](#) for at indikere om QC testen er godkendt.

Anvend Ejector knappen bag på instrumentet for at fjerne den brugte strimmel.

Læs venligst bruger instruktionerne før testen udføres

Ekstra funktioner kan være aktiveret i instrumentet

Nova StatStrip glukose og β -keton Hospitals Instrumenter



- Til professionel brug på alle sundhedsfaglige afdelinger
- Placer instrumentet i docking/lader stationen når det ikke anvendes
- Rengør med 70% isopropyl alkohol, 10% fortynding af natrium hypoklorid eller anden kommerciel overflade dekontaminerings opløsning
- Sprøjt ikke opløsninger direkte på instrumentet eller nedsænk instrumentet i en opløsning

Nova StatStrip glukose og β -keton kontrolopløsninger

- Opbevar hætteglas med kontrolmateriale tæt lukket og under 30 °C.
- Må ikke nedkøles eller nedfryses.
- Efter åbning af hætteglasset er materialet stabilt op til 3 måneder eller indtil udløbsdatoen.

Nova StatStrip Glukose og β -keton strips

- Opbevar strimlerne ved 15 °C – 30 °C
- Anvend strimler inden udløbsdatoen. Efter åbning er glukose strimler holdbare i 180 dage og β -keton strimler er holdbare i 90 dage.



Prøve materiale

- Vask patientens hænder eller rens dem med alkohol, sørg for at hænderne er helt tørre inden prøven tages.
- Test strimlen skal fylde på én gang. Der bør ikke tilføres mere prøve.
- Der kan anvendes kapillær blodprøve fra finger, venøst fuldblod og arterielle prøver.
- Kan også anvendes til neonatale prøver samt patienter der modtager intensiv medicinsk behandling.
- Egnede antikoagulanter: natrium, lithium og ammoniumheparin.

Fejlfinding



Analyse annulleret: Testen er blevet annulleret, gentag testen med en ny strimmel. Lad test strimlen blive siddende indtil resultatet vises på skærmen.

Dårlig prøve: Indsæt en ny strimmel og kørs testen igen. Hvis fejlkoden vedbliver udføres testen med strimmel fra en anden pakning eller med en alternativ metode.

Ombyt Strimmel: forekommer efter indsættelse af strimmel eller under analyse. Indsæt en anden strimmel og test igen. Hvis fejlkoden vedbliver udføres testen med strimmel fra en anden pakning eller med en alternativ metode.



Temperatur: Instrumenter virker kun inden for et temperatur interval på 1 °C – 40 °C. Sørg for at instrumentet befinder sig i det rette temperatur interval.



Flow fejl: Prøven var fejlagtigt opsamlet til test strimlen enten på grund af utilstrækkelig eller ukorrekt prøve påsætning. Gentag testen med en ny strimmel. Hvis fejlkoden vedbliver udføres med en alternativ metode.



Overførsel mislykkedes: Serveren giver ikke tilladelse til kommunikation med instrumentet eller forbindelsen til serveren er blevet afbrudt. Undersøg netværks indstillinger, netværks status eller kontakt din administrator for support.



Overførsel mislykkedes: Instrumenter blev fjernet inden data overførslen var færdig. Placer instrumentet i docken igen.

Kontakt information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk / +45 86103020

For bestilling: order@aidian.dk

www.aidian.dk

Produkt	Produkt nr.	Varenr.
Nova Statstrip Glu Ket Meter	53712	154722
Nova Statstrip-Glu Ket Meter Wifi 1.86	54796	154767
Nova Statstrip Glucose Test Strips, 100T	42214	154727
Nova Statstrip Ketone Test Strips, 50 T	46951	154726
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 1	46947	154725
Nova Statstrip-Glu Ket Control Level 2	46948	154766
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 3	46949	154723
Nova Dock Single For Ver-1.75/.86	53400	154724