

# QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP



**1** Tag prøven fra en varm eller opvarmet hånd. Prøveudtagningsstederne er siderne af langefingeren og ringefingeren.



**2** Rengør finger med en desinfektionserviet og lad fingeren tørre.



**3** Støt prøvetagningen med din tommelfinger. Brug pege og langefinger, massér prøvefinger langs hele dens længde, gerne helt fra håndfladen og forbi sidste led på fingeren så blodet lettere løber til.




**4** Placer fingerprikkeren mod huden med et let pres og punkter huden og slip derefter presset.



**5** Tør den første dråbe af. Massér og pres fra håndfladen og ned af finger, forbi sidste led, for at undgå vævsvæske. Brug næste dråbe til indsamling af den egentlige blodprøve. Klem prøvefinger fast men ikke kontinuerligt.



**6** Hold prøveopsamleren næsten vandret lige under overfladen af blodråben. Fyld kapillærdelen af prøveopsamleren helt op.

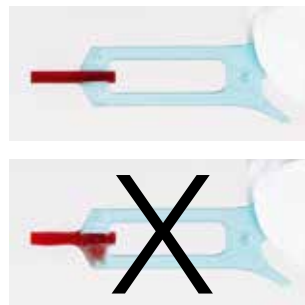

**7** **Note!** Tjek at kapillærdelen er helt fyldt. **Aftør ikke prøveopsamleren!** Hvis der er overskydende prøve på prøveopsamleren bortkastes den.

Korrekt prøveudtagningssteknik:

- Opvarm hænderne
- Undgå malkning
- Undgå kontinuerlig klemning

# QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP

## Prøveudtagningssteder

Hænderne bør opvarmes for at gøre det lettere at tage prøven. Vi bruger vores tommelfinger og pegefinger til at gribe med, og derfor anbefales de ikke som prøveudtagningssteder. Huden på lillefingeren er meget tyndere end på de andre fingre, hvilket medfører en risiko for at ramme en knogle. Siderne af fingrene har flere kapillærer og mindre nerver, hvilket reducerer smerten forårsaget af prikket.

## Rengøring af prøveudtagningsstedet

Rengør prøveudtagningsstedet for at undgå infektion. Det er vigtigt at lade alkohol/vand fordampe da det kan fortynde prøven. Desuden vil bloddråben ikke blive rund på hurtig hud.

## Prøveopsamlingsposition

Patientens hånd skal holdes fast således at patienten ikke kan trække hånden tilbage når der bliver prikket. Når prøven tages skal patientens finger masséres gerne helt fra håndfladen for at få en større bloddråbe til prøveudtagningen.

## Fingerprik

Der findes både prikker og skære lancetter. Et snit er ofte mere effektivt end et punkteringsår. Hvis lancetten er for lille er det svært at opnå en tilstrækkelig stor dråbe blod. Vælg en lancetstørrelse, der passer til patienten. Tryk lancetten fast mod huden for at forhindre en for overfladisk punktering.

Hvis der bruges justerbar fingerprik skal den indstilles til korrekt punkterings-dybde. En for dyb punktering kan forårsage unødigt smerte og øge mængden af væsvæske. Patienter med tykkere hud, kan have behov for dybere punkteringsdybde. For ældre børn og voksne er en passende punkteringsdybde ca. 2 millimeter. For små børn må punkteringsdybden ved fingerspidsen ikke overstige 1,5 millimeter.

## Blodprøven

Den første dråbe er for det meste væsvæske, og skal derfor fjernes. En stor dråbe giver nok blod til at samle prøven ind i prøveopsamleren på en gang. Prøvefingeren skal presses fast, men ikke kontinuerligt og ikke ved siden af punkteringsstedet. Massér patientens finger fra håndfladen og ud forbi sidste led for at få bloddråben frem. Klemmes der for hårdt kan mængden af væsvæske i prøven stige.

## Fyldning af prøveopsamleren (10 µl)

Hold QuikRead go Sample Collector 10 µl næsten vandret lige under overfladen af bloddråben. Fyld kapillærdelen af prøveopsamleren fuldstændigt helt op. Kapillær effekten trækker prøven ind i kapillærdelen af prøveopsamleren. Saml prøven fra siden af bloddråben. Tryk ikke kapillærdelen mod huden. Hvis kappilærdelen holdes vippet nedad mens det fyldes kan det dannes luftbobler. Prøven skal være fri for luftbobler, da et for lille prøvevolumen påvirker pålideligheden af testen. Tør ikke prøveopsamleren af. Hvis der er overskydende prøve udenpå kasseres prøveopsamleren og en ny prøve tages.

## Placer prøven i en kuvette

Fjern beskyttelsesfolien fra kuvetten inden prøven opsamles. Nedsæk prøveopsamleren i kuvetten. Luk kuvetten med reagens proppen. Tryk ikke den turkise indre del af proppen ned.

En prøve af høj kvalitet øger pålideligheden af testresultater.

## Kontakt information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk

+45 86103020

For bestilling: order@aidian.dk

www.aidian.dk

www.quikread.com

## Gælder for følgende tests:

- QuikRead go easy CRP