

Instruktioner til rengøring af Quikread go instrumenter

1. Rengør ydersiden af instrumentet regelmæssigt med en fnugfri klud fugtet med vand
2. Vær særlig opmærksom på rengøring af skærmen
3. Sørg for, at der ikke spildes væske på skærmens kanter, i målebrønden eller i kontakterne
4. Hvis det er nødvendigt, kan et mildt rengøringsmiddel bruges
5. Brug ikke organiske opløsningsmidler eller ætsende stoffer
6. Spild af potentielt infektiøst materiale skal straks tørres op med absorberende papirservietter, og de kontaminede områder skal tørres af med et standard desinfektionsmiddel eller 70 % ethylalkohol.
7. Materialer brugt til at rense spild, herunder handsker, skal bortskaffes som biofarligt affald.

På grund af GDPR-forordningen skal alle patientresultater slettes, før instrumentet sendes. Gå til Resultater > Slet resultathistorik.

Sørg for, at instrumentet er nulstillet til fabriksindstillingerne, bør IKKE kræve patient- eller admin-id. Tilslutning til LIS/HIS skal fjernes, før instrumentet sendes til os.

Har du brug for hjælp til dette, så kontakt os på **8610 3020**

Opgave	Dato	Signatur
Rengøring af udvendige overflader		
Sletning af instrumentets patientdatahistorik, og nulstil til de oprindelige indstillinger		