




QuikRead go[®] HbA1c

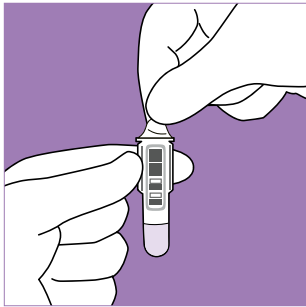


1 Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Rør ikke på de klare flader på nederste del af kuvetten.

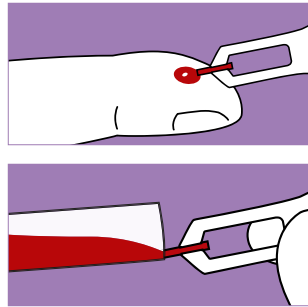


2 Hold QuikRead go Sample Collector 1µl næsten horisontalt lige under overfladen af prøven. Fyld kapillærdelen af prøveopsamleren helt op.

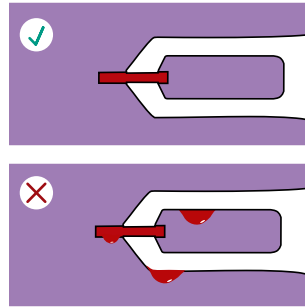


Note! Tjek at kapillærdelen er helt fyldt.
Aftør ikke prøveopsamleren! Hvis der er overskydende prøve på prøveopsamleren bortkastes den.

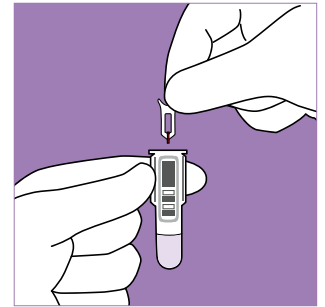

3 Nedsæk prøveopsamleren i kuvetten indenfor 1 minut. Prøveopsamleren må ikke komme i kontakt med væsken i kuvetten.

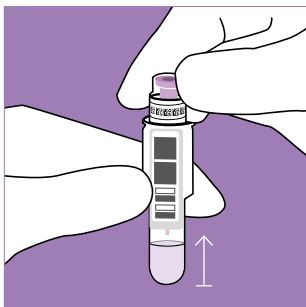

4 Luk kuvetten med HbA1c reagens proppen. Tryk ikke den inderste violette del af låget ned. Start analysen indenfor 5 minutter. **Hold kuvetten lodret og ryst den ikke.**

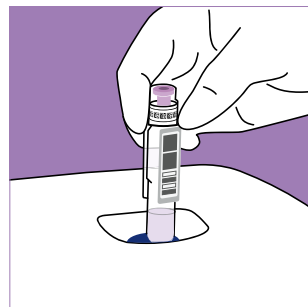

5 Vælg **Måling** på displayet på QuikRead go instrumentet. Indsæt kuvetten i instrumentets aflæsningsbrønd. Stregkoden skal vende ud mod en selv.



6 Resultatet vises på displayet og kuvetten vil automatisk komme op, når målingen er udført.

Læs venligst
brugsvejledningen
inden testen
udføres.

QuikRead go[®] HbA1c



Kit

Uåbnet kit ved 2–8 °C indtil kittets [udløbsdato](#).
Uåbnet kit 18–25 °C: 2 måneder.



Kuvetter

Uåbnet foliepakke ved 2–8 °C: Indtil kittets [udløbsdato](#).
Uåbnet kuvetter efter åbning af foliepakning:
Ved 2–8 °C: [6 måneder](#) / ved 18–25 °C: [2 måneder](#).



Åbnet kuvette

Lad bufferen varme op til 18–25 °C inden testen udføres.
Udfør testen indenfor [1 time](#), fra kuvettens åbning.
Prøven er stabil i kuvetten i [5 minutter](#) med lukket reagenslåg.



Reagenslåg

Uåbnet rør opbevaring ved 2–8 °C: Indtil kittets [udløbsdato](#).
Efter første åbning ved 2–8 °C: [6 måneder](#) / ved 18–25 °C:
[2 måneder](#).



Prøveopsamler

Opbevaring ved 2–25 °C: Indtil [udløbsdato](#) på QuikRead go Sample Collector 1µl boksen.



HbA1c
control set

Uåbnet flaske ved 2–8 °C: Indtil [udløbsdato](#).
Åbnet flaske ved 2–8 °C: Op til [50 dage](#).

Kontakt information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk

+45 86103020

For bestilling: order@aidian.dk

www.aidian.dk

www.quikread.com

Produkt	Varenr.
QuikRead go HbA1c med QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 tests	151058
QuikRead go HbA1c Control Set	154520
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 pcs	154457