




# QuikRead go HbA1c

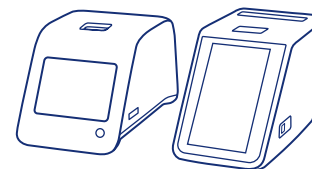


Til QuikRead go Instrument og QuikRead go Plus Instrument

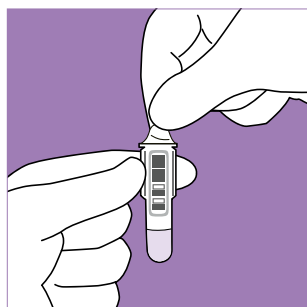


**1** Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Rør ikke på de klare flader på nederste del af kuvetten.

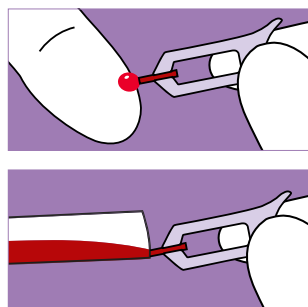


**2** Hold QuikRead go Sample Collector 1µl næsten horisontalt lige under overfladen af prøven. Fyld kapillærdelen af prøveopsamleren helt op.

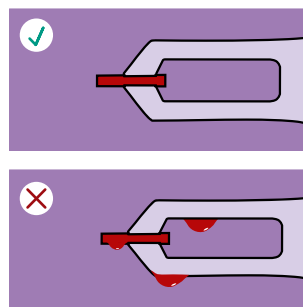


**Note!** Tjek at kapillærdelen er helt fyldt. Aftør ikke prøveopsamleren! Hvis der er overskydende prøve på prøveopsamleren bortkastes den.

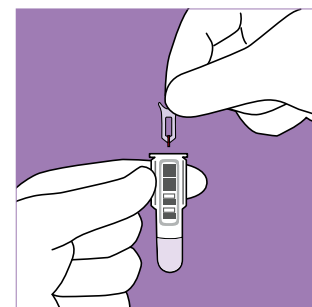


**3** Nedsæk prøveopsamleren i kuvetten indenfor 1 minut. Prøveopsamleren må ikke komme i kontakt med væsken i kuvetten.

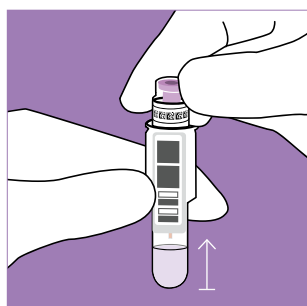

**4** Luk kuvetten med HbA1c reagens prop-pen. Tryk ikke den inderste violette del af låget ned. Start analysen indenfor 5 minutter. Hold kuvetten lodret og ryst den ikke.

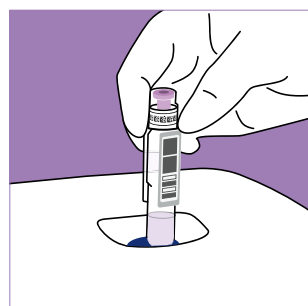

**5** Vælg Måling / Mål prøve på displayet på QuikRead go instrumentet. Indsæt kuvetten i instrumentets aflæsningsbrønd. Stregkoden skal vende ud mod en selv.

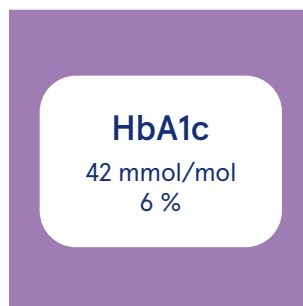

**6** Måletiden er mindre end 6 minutter. Resultatet vises på displayet på skærmen og kuvetten kommer automatisk op når målingen er udført.

Læs venligst brugsvejledningen inden testen udføres.

# QuikRead go HbA1c



Kit

Uåbnet kit ved 2–8 °C indtil kittets udløbsdato.  
Uåbnet kit 18–25 °C: 2 måneder.



Reagenslåg

Unopened tube at 2–8°C: until the expiry date of the kit  
After the first opening at 2–8°C: 6 months / at 18–25°C: 2 months



Kuvetter

Uåbnet foliepakke ved 2–8 °C: Indtil kittets udløbsdato.  
Uåbnet kuvetter efter åbning af foliepakning:  
Ved 2–8 °C: 6 måneder / ved 18–25 °C: 2 måneder.



Åbnet kuvette

Lad bufferen varme op til 18–25 °C inden testen udføres.  
Udfør testen indenfor 1 time, fra kuvettens åbning.  
Prøven er stabil i kuvetten i 5 minutter med lukket reagenslåg.



Prøveopsamler

Opbevaring ved 2–25 °C: Indtil udløbsdato på QuikRead go  
Sample Collector 1µl boksen.



HbA1c  
control set

Uåbnet flaske ved 2–8 °C: Indtil udløbsdato.  
Åbnet flaske ved 2–8 °C: Op til 50 dage.

## Kontakt information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk

+45 86103020

For bestilling: order@aidian.dk

aidian.dk

quikread.com

Produkt	Varenr.
QuikRead go HbA1c med QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 tests	151058
QuikRead go HbA1c Control Set	154520
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 pcs	154457
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375