

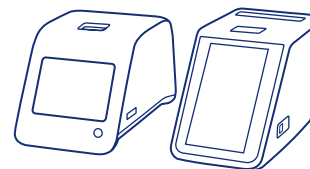
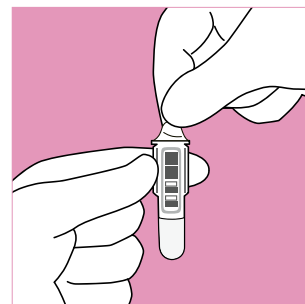
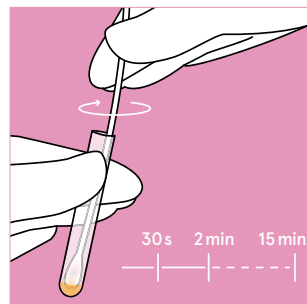


QuikRead go Strep A




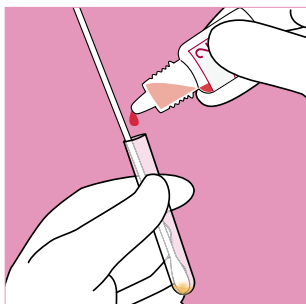


Til QuikRead go Instrument og QuikRead go Plus Instrument

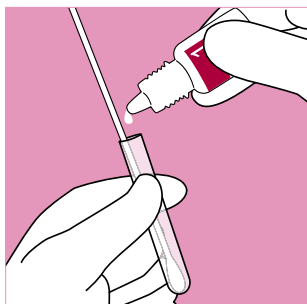


1 Tag halsprøven med vatpinden beregnet til kittet. Placer pødepinden i ekstraktionsrøret og tilsæt to dråber farveløs Ekstraktionsreagens 1. Tilsæt to dråber af Ekstraktionsreagens 2. Opløsningen bliver orangegul.

2 Drej pødepinden rundt i opløsningen i 30 sekunder. Lad den herefter stå i opløsningen yderligere 1,5 minut, men ikke længere end 15 minutter totalt. Fjern folieforsøglingen fra kuvetten. Rør ikke overfladen på den nederste del af kuvetten.

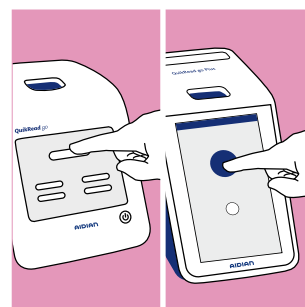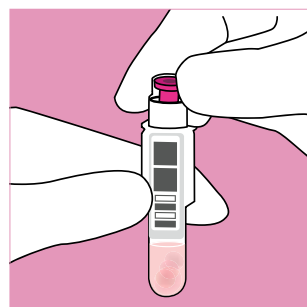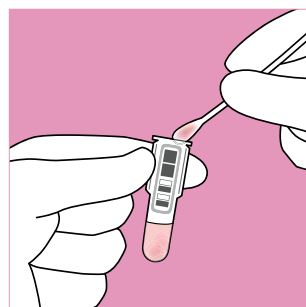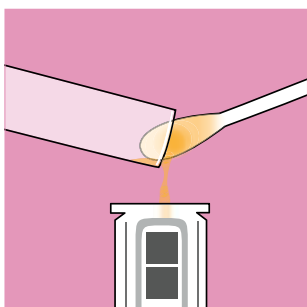

3 Vip ekstraktionsrøret og lad pødepinden glide mod indersiden for at trække opløsningen med pødepinden ind i kuvetten. Hvis en større mængde af væsken bliver i røret, hæld det da ned i kuvetten. Omrør kraftigt med pinden, opløsningen bliver rød. Pres pødepinden mod indersiden når den tages op.


4 Luk kuvetten omhyggeligt med et Strep A reagens-låg. Pres ikke den inderste pink del af låget ned. Udfør testen indenfor 4 timer. Vælg måling/ mål prøve på displayet på QuikRead go instrumentet.

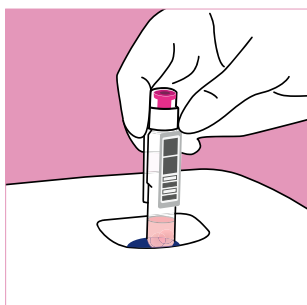

Læs venligst brugsvejledningen inden testen udføres.

5 Sæt kuvetten i aflæsningsbrønden på instrumentet. Stregkoden skal vende mod en selv. Måletiden er under 4 minutter. Resultatet vises på displayet på skærmen og kuvetten kommer automatisk op af aflæsningsbrønden når målingen er komplet.

QuikRead go Strep A

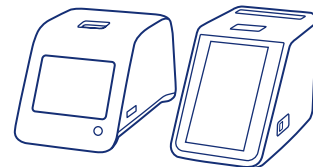

Kit

Uåbnet kit ved 2–25 °C indtil kittets udløbsdato



Reagenslåg rør,
ekstraktions-
reagens og
kontroller

Uåbnet kit komponenter opbevaring ved 2–25 °C: Indtil kittets udløbsdato. Efter første åbning ved 2–25 °C: 12 måneder.



Kuvetter

Uåbnet foliepakke ved 2–25 °C: Indtil kittets udløbsdato

Uåbnet kuvetter efter åbning af foliepakning:
Ved 2–8 °C: 6 måneder / ved 18–25 °C: 3 måneder




Åbnet
kuvette


Lad bufferen varme op til 18–25 °C inden testen udføres
Udfør testen indenfor 2 timer, fra kuvettens åbning

Prøvetagnings instruktion


Ved udførelse af testen, er det vigtigt at rotere podepinden under ekstraktion og i kuvetten. Husk at presse den mod undersiden, når den fjernes fra kuvetten.

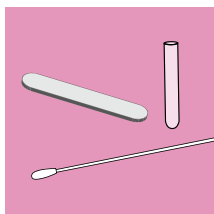

1 Saml alle de ting der er nødvendige for prøvetagningen nær patienten: HydraFlock flokket podepind, tungespatel og QuikRead go Strep A ekstraktionsrør. Brug beskyttelsestøj, inklusiv engangshandsker. Brug kun HydraFlock flokkede vatpinde til QuikRead go Strep A-kittet. Brug af andre podepinde kan give falske resultater, enten positive eller negative.

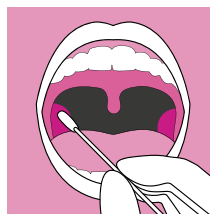

3 Opsaml eksudatprøven med podepinden. For at sikre en brugbar prøve, roter podepinden ved prøvetagningen. Strep A inficerer mandlerne, husk derfor at pode begge sider. En prøve udtaget andre steder i munden kan give et negativt resultat. En stor mængde spyt eller mikrober fra andre steder i munden kan forstyrre testen.

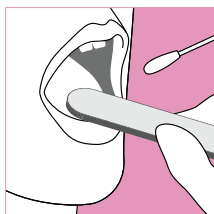

2 Tag den sterile HydraFlock flokket podepind ud af pakningen. Bed patienten om at åbne munden. Brug spatlen til at presse tungen ned og begynd prøvetagningen.



4 Tag podepinden ud af munden og placer den i ekstraktionsrøret. Vær opmærksom på ikke at berøre andre overflader i munden for at undgå forurening med normal flora. Sikring af korrekt ekstraktion. Observer farveændringer. Farven indikerer en korrekt PH både ved ekstraktion og neutralisering. Følg de anførte tidsangivelser.

Kontakt og bestillinger

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk / +45 86 10 30 20

order@aidian.dk

quikread.com

Produkt

QuikRead go Strep A

QuikRead go Instrument

QuikRead go Plus Instrument

Varenr.

135883

135867

155375