



Hb-kontrol


Lad kontrollen stabilisere i 30 minutter ved stuetemperatur før brug.

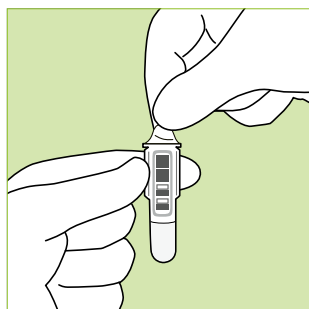



1 Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Rør ikke på de klare flader på kuvettens nederste del.

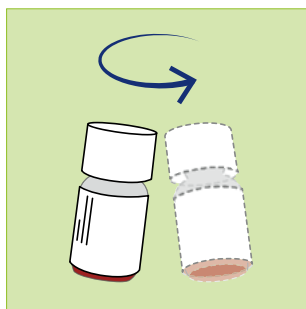


2 Bland kontrollen forsigtigt. Ryst ikke da omrystning af kontrollen kan forårsage luftbobler. I tilfælde af at der kommer en film ovenpå flasken, vent til det brister eller fjern det forsigtigt med et hjørne af fnugfrit papir. Hold flaskehalsen ren.

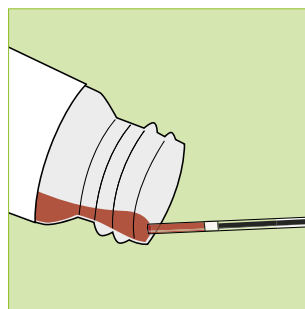


3 Vip kontrolhætteglasset let. Placer kapillærrøret lige under overfladen af kontrollen. Fyld det orange-stribede kapillærrør med prøven op til den hvide stopper. Kontrolløsningen er stabil i 5 minutter i kapillærrøret.

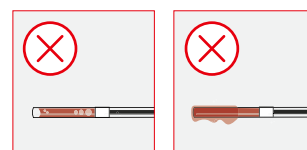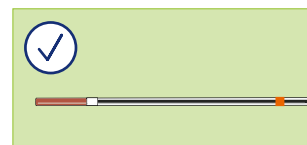


Bemærk! Placer ikke kapillærrøret helt i bunden af hætteglasset. Hvis der er luftbobler i kapillærrøret, skal det kasseres, og der skal tages en ny prøve. Tør eventuelle rester af prøven af på ydersiden af kapillærrøret.

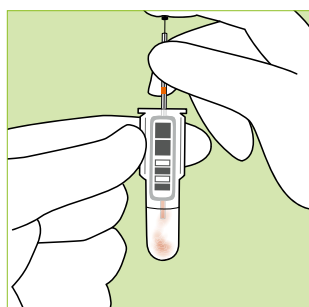


4 Placer prøven (10 µl) i bufferservæskeløsningen i kuvetten, og dispenser ved at trykke stemplet helt ned. Sørg for, at kapillærrøret er helt tørt.

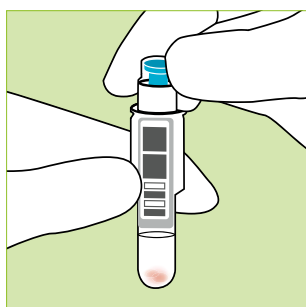

5 Luk kuvetten tæt med det turkise reagenslåg. Tryk ikke på den farvede inderdel af reagenslåget. Udfør testen inden for 2 timer.

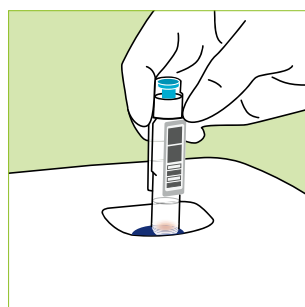

6 Vælg Kvalitetskontrol på skærmen på QuikRead go-instrumentet. Indsæt kuvetten i målebrønden på instrumentet. Stregekoden skal vende mod dig.

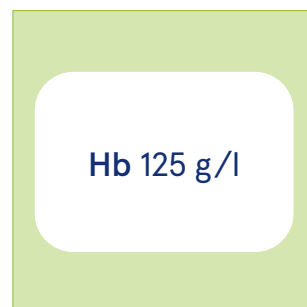

7 Målingstiden er 2 minutter. Resultatet vises på skærmen, og kuvetten løftes automatisk op, når målingen er afsluttet. Måleområdet for kontrollen fremgår af mærkningen.

Opbevaring

Et åbnet hætteglas er stabilt i 1 måned ved 2- 8 °C.

Bemærk! Undgå at bruge de sidste dråber af kontrollen.