




# QuikRead go HbA1c

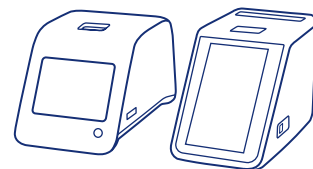


Til QuikRead go Instrument og QuikRead go Plus Instrument

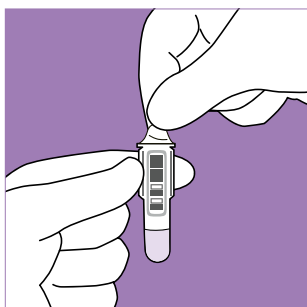


**1** Fjern foliebeskyttelsen fra kuvetten. Rør ikke på de klare flader på nederste del af kuvetten.

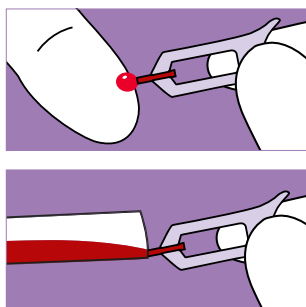


**2** Hold QuikRead go Sample Collector 1µl næsten horisontalt lige under overfladen af prøven. Fyld kapillærdelen af prøveopsamleren helt op.

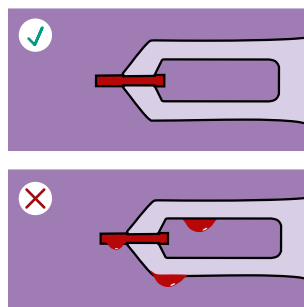


**Note!** Tjek at kapillærdelen er helt fyldt. Aftør ikke prøveopsamleren! Hvis der er overskydende prøve på prøveopsamleren bortkastes den.

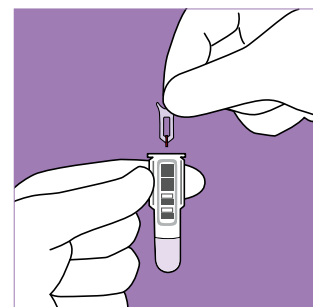


**3** Nedsænk prøveopsamleren i kuvetten indenfor 1 minut. Prøveopsamleren må ikke komme i kontakt med væsken i kuvetten.

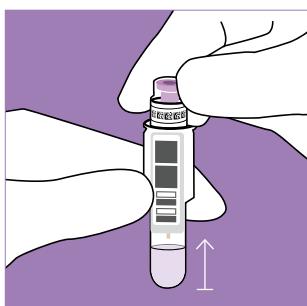

**4** Luk kuvetten med HbA1c reagens prop-pen. Tryk ikke den inderste violette del af låget ned. Start analysen indenfor 5 minutter. Hold kuvetten lodret og ryst den ikke.

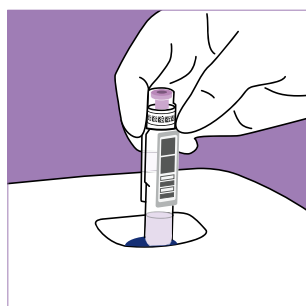


**5** Vælg Måling / Mål prøve på displayet på QuikRead go instrumentet. Indsæt kuvetten i instrumentets aflæsningsbrønd. Stregkoden skal vende ud mod en selv.

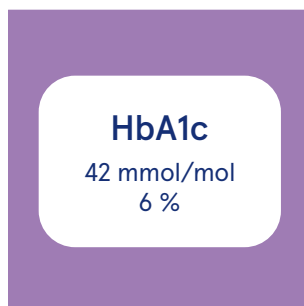

**6** Måletiden er mindre end 6 minutter. Resultatet vises på displayet på skærmen og kuvetten kommer automatisk op når målingen er udført.

Læs venligst brugsvejledningen inden testen udføres.

# QuikRead go HbA1c

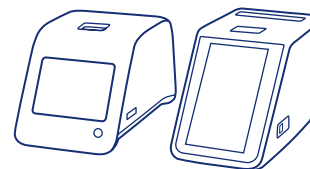

Kit

Uåbnet kit ved 2–8 °C: Indtil kittets udløbsdato.

Uåbnet kit 18–25 °C: 2 måneder.



Reagenslåg

Uåbnet rør ved 2–8 °C: Indtil kittets udløbsdato.

Efter første åbning ved 2–8 °C: 6 måneder / ved 18–25 °C: 2 måneder.



Kuvetter

Uåbnet foliepakke ved 2–8 °C: Indtil kittets udløbsdato.

Uåbnet kuvetter efter åbning af foliepakning:

Ved 2–8 °C: 6 måneder / ved 18–25 °C: 2 måneder.



Åbnet kuvette

Lad bufferen varme op til 18–25 °C inden testen udføres.

Udfør testen indenfor 1 time, fra kuvettens åbning.

Prøven er stabil i kuvetten i 5 minutter med lukket reagenslåg.



Prøveopsamler

Opbevaring ved 2–25 °C: Indtil udløbsdato på QuikRead go Sample Collector 1µl boksen.



HbA1c  
control set

Uåbnet flaske ved 2–8 °C: Indtil udløbsdato.

Åbnet flaske ved 2–8 °C: Op til 50 dage.

## Kontakt information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk

+45 86103020

For bestilling: order@aidian.dk

aidian.eu/dk

quikread.com

| Produkt                                                          | Varenr. |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| QuikRead go HbA1c med QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 tests | 151058  |
| QuikRead go HbA1c Control Set                                    | 154520  |
| QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 pcs                         | 154457  |
| QuikRead go Instrument                                           | 135867  |
| QuikRead go Plus Instrument                                      | 155375  |