



Hb-kontrolli


Anna kontrollin stabiloitua 30 minuuttia huoneenlämmössä ennen käyttöä.

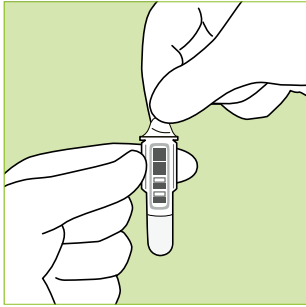



1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

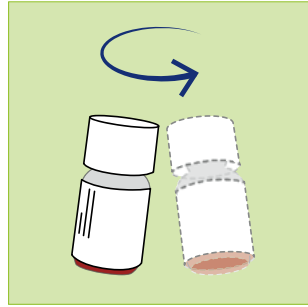


2 Sekoita QuikRead go 10 µl Hb Control -kontrollipullo hyvin kierittämällä. Älä ravista. Punasoluilla on taipumus vajota pullon pohjaan. Pidä pullon kaula puhtaana.

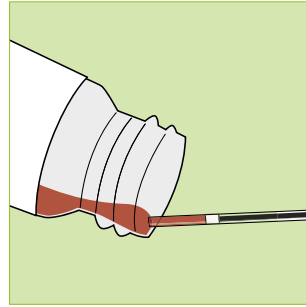


3 Kallista kontrollipulloa siten, että neste saavuttaa pullon kaulan. Ota näyte asettamalla kapillaarin kärki aivan nestepinnan alapuolelle. Täytä oranssilla merkitty kapillaari kokonaan valkoiseen "stopperiin" saakka. Kontrolli säilyy kapillaarissa 5 minuuttia.

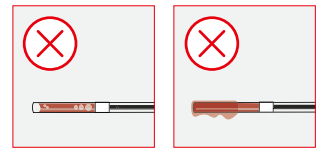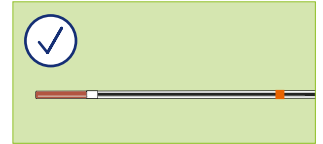


Huom! Älä aseta kapillaaria vaahtoon. Jos kapillaariin tulee ilmakuplia, niin hävitä kapillaari ja ota uusi näyte. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.

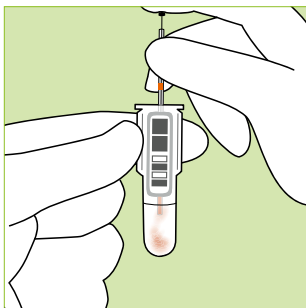


4 Lisää näyte (10 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjäntyi kokonaan.

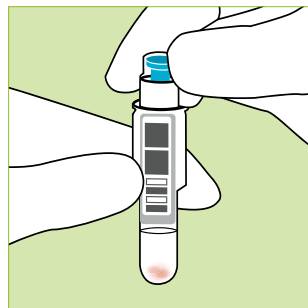

5 Sulje kyvetti huolellisesti turkoosilla reagenssikorkilla. Älä paina korkin värillistä sisäosaa alas. Suorita testi 2 tunnin kuluessa.

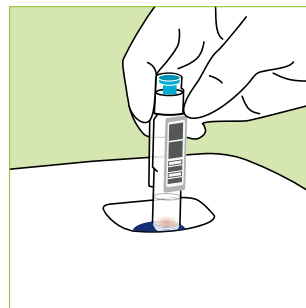

6 Valitse laitteen näytöltä Kontrollimittaus. Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.

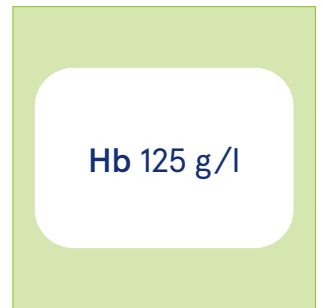

7 Mittausaika on 2 minuuttia. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta. Kontrollin raja-arvot löytyvät pullon etiketissä olevista merkinnöistä.

Säilytys

Avattu kontrollipullo säilyy 2 kuukautta 2...8 °C:ssa.

Huom! Vältä käyttämästä kontrollin viimeisiä tippoja.