


Alltest hCG Pregnancy Rapid tests


Alltest hCG Rapid Dipstick test

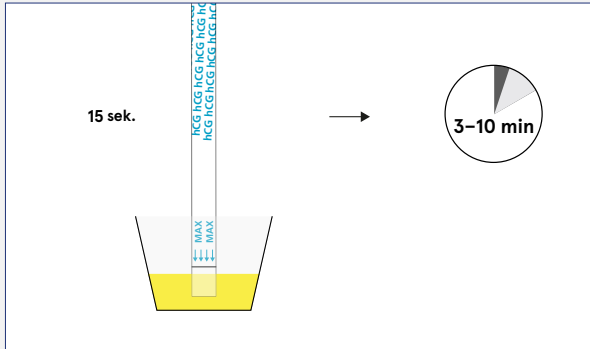

Aseta mittatikku näyteastiaan nuolet osoittaen alaspäin. Upota testi virtsaan vähintään 15 sekunniksi. Aseta mittatikku ei-imukykyiselle, tasaiselle pinnalle ja käynnistä ajastin.

Lue tulos 3 minuutin kuluttua. Tulos tulee tulkita viimeistään 10 minuutin kuluttua.



Alltest hCG Rapid Cassette test

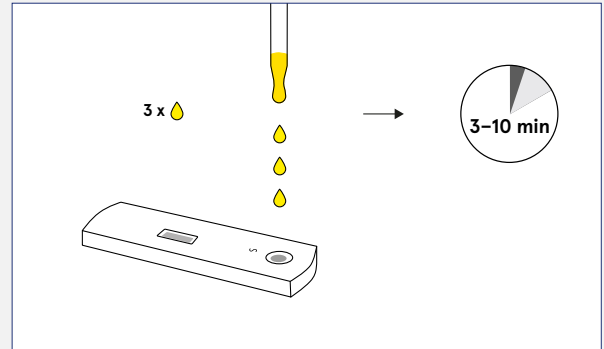

Aseta testikasetti puhtaalle ja tasaiselle alustalle. Annostele 3 tippaa virtsaa kasetin näytekaivoon (S). Käynnistä ajastin.



Lue tulos 3 minuutin kuluttua. Tulos tulee tulkita viimeistään 10 minuutin kuluttua.

Tulosten tulkinta

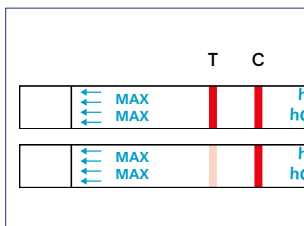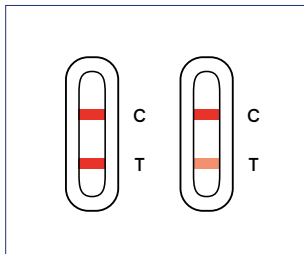



Positiivinen tulos

Näkyviin tulee kaksi värillistä viivaa. Yksi viiva näkyy kontrolliviiva-alueella (C) ja toinen viiva näkyy testiiviiva-alueella (T). Testi on kvalitatiivinen, eikä kvantitatiivista arvoa voida määrittää värin perusteella.

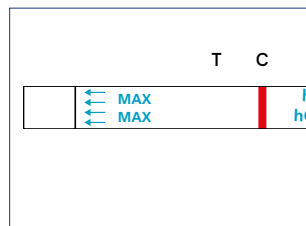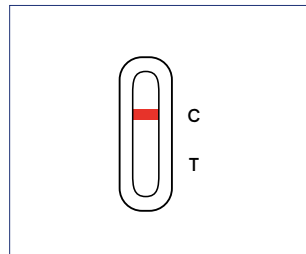

Negatiivinen tulos

Yksi värillinen viiva näkyy kontrolliviiva-alueella (C). Testiviiva-alueella (T) ei näy viivaa.

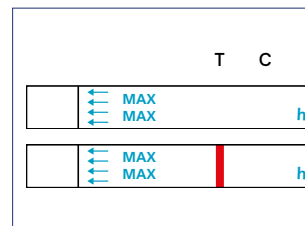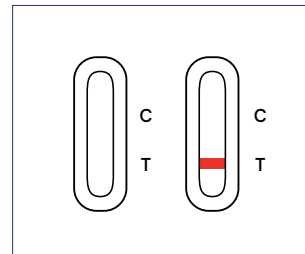

Virheellinen tulos

Kontrolliviivaa (C) ei tule näkyviin. Tarkista menettely ja toista testi uudella testillä. Jos ongelma jatkuu, lopeta testin käyttö ja ota yhteyttä Aidianin edustajaan.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista..

Alltest hCG Pregnancy Rapid tests

Ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten *in vitro* diagnostiikka -käyttöön.

Varotoimet, näytteenotto ja käsittely

- Testien tulee olla suljetussa pussissa tai suljetussa rasiassa käyttöön asti.
- Testit ovat stabiileja enintään 90 päivää pakkauksen ensimmäisestä avaamisesta.
- Ensimmäinen aamuvirtsa on suositeltavaa, koska se sisältää yleensä korkeimman hCG-pitoisuuden.
- Kerää virtsanäyte puhtaaseen ja kuivaan astiaan.
- Virtsanäytteitä voidaan säilyttää 2–8 °C:ssa enintään 48 tuntia ennen testausta. Näkyviä saostumia sisältävät näytteet tulee sentrifugoida, suodattaa tai antaa laskeutua kirkkaan näytteen saamiseksi testausta varten. Kuten kaikkien diagnostisten testien yhteydessä, vahvistetun raskausdiagnoosin saa tehdä vain lääkäri, kun kaikki tarvittavat kliiniset ja laboratoriolöydökset on arvioitu.



Pikatesti hCG:n varhaiseen havaitsemiseen virtsasta

- Ihmisen koriongonadotropiinia (hCG) tuottaa istukka ja sen pitoisuus kasvaa nopeasti hedelmöitymisen jälkeen, mikä tekee siitä erinomaisen merkkiaineen raskauden varhaiseen havaitsemiseen. Alltest hCG Pregnancy Rapid testi on nopea immunokromatografinen testi, joka auttaa raskauden varhaisessa toteamisessa.



Helppokäyttöinen

- Helppo testin suoritus
- Selkeät värireaktiot helpottavat tulosten tulkintaa

Luotettava ja nopea

- Tulokset 3 minuutissa
- Sisäinen kontrolli varmistaa testin oikean toiminnan

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

Tilaukset: tilaukset@aidian.fi tai

p. 050 381 5198

aidian.fi

Tuote	Tuotenro	Tilausno
Alltest hCG 25 mIU/ml Pregnancy Dipstick (urine) 50 tests	FCH-101A	155220
Alltest hCG 40 mIU/ml Pregnancy Dipstick (urine) 50 tests	FCH-101B	155221
Alltest hCG 500 mIU/ml Pregnancy Dipstick (urine) 50 tests	FCH-101C	155222
Alltest hCG 25 mIU/ml Pregnancy Cassette (urine) 25 tests	FCH-102A	155223
Alltest hCG 40 mIU/ml Pregnancy Cassette (urine) 25 tests	FCH-102B	155224
Alltest hCG 500 mIU/ml Pregnancy Cassette (urine) 25 tests	FCH-102C	155225