

STANDARD M10 & Puncher Flu/RSV/SARS-CoV-2

Yleistä tietoa

- Säilytä STANDARD M10 Flu/RSV/SARS-CoV-2 kasetteja 2–28°C lämpötilassa.
- Testi soveltuu vain nenänielusta otetuille näytteenottotikuille.
- Käytä aina puhtaita käsineitä ja noudata paikallisia turvallisuusohjeita käsitellessäsi potilasnäytteitä.

Lisätietoja löydät käyttöohjeesta, jossa on tarkemmat tiedot varoitusten ja varotoimien, näytteenoton, kuljetuksen, varastoinnin ja laadunvalvonnan suhteen.

STANDARD M10 laitteen käyttöönotto

 <p>Käynnistä virta</p>	 <p>Kirjautu sisään</p>	 <p>Valitse M10 moduuli</p>	 <p>Lue potilastunniste / näyttenumero</p>	 <p>Lue testikasetti</p>	 <p>Näytteen lisäämisen ohjeistus</p>
<p>1 Käynnistä M10 konsoli ja moduulit niiden virtapainikkeista.</p>	<p>2 Syötä käyttäjänimi ja salasana. Paina Log in painiketta.</p>	<p>3 Valitse vapaana oleva moduuli kotivalikosta. Moduulin merkkivalo vaihtuu vihreäksi ja moduulin luukku aukeaa automaattisesti.</p>	<p>4 Skannaaja potilastunniste tai näyttenumero M10 konsolin integroidulla viivakoodinlukijalla (tai syötä se käyttämällä virtuaalinäppäimistöä). Potilastunniste on vaihtoehto, joka voidaan ottaa pois käytöstä Asetukset-valikosta.</p>	<p>5 Skannaaja kasetin viivakoodi M10 konsolin integroidulla viivakoodinlukijalla. Seuraava vaihe alkaa automaattisesti kasetin lukemisen jälkeen.</p>	<p>6 Katso animoitu ohjeistus kasetin valmistelusta ja näytteen laittamisesta kasettiin. Paina näyttöä jatkaaksesi.</p>

STANDARD M10 Puncher / Näytteen lisääminen kasettiin


 <p>Irrota turvaklipsi</p>	 <p>Aseta kasetti alustalle</p>	 <p>Aseta kasetti paikalleen</p>	 <p>Ota kiinni lävistimen kahvasta</p>	 <p>Lisää näyte</p>	 <p>Sulje kansi</p>
<p>1 Poista sininen turvaklipsi kasetista. Älä koske monistuskammioihin.</p>	<p>2 Aseta kasetti turvaklipsi poistettuna lävistimen (puncher) alustalle</p>	<p>3 Työnnä kasettia nuolen suuntaisesti.</p>	<p>4 Ota kiinni lävistimen kahvasta ja paina se alas, minkä jälkeen kasetti on käytettävissä.</p>	<p>5 Avaa kansi ja lisää 300 µl näytettä kasetin näytekameroon.</p>	<p>6 Sulje kansi.</p>

! Lisää näyte 10 minuutin kuluessa kasetin lävistyksestä. Aloita testi 30 minuutin kuluessa näytteen laittamisesta kasettiin.

Testin aloitus




1 Aseta kasetti M10 moduuliin ja sulje luukku manuaalisesti.

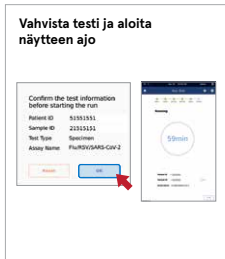

2 Hyväksy näytteen ja kasetin tiedot, minkä jälkeen **paina** OK aloittaaksesi ajon. Jäljellä oleva näytteen analyysiaika näkyy M10 konsolin näytöllä.

Kasetin oikea käsittely / varastointi

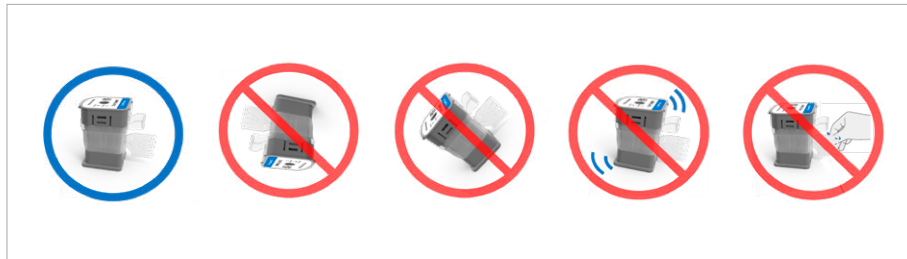

ÄLÄ kallista, käännä tai ravista kasettia!
ÄLÄ koske monistuskammioihin!

Tulosten tulkinta

Tulos	Flu			RSV		SARS-CoV-2		
	Flu A	Flu B	IC	RSV	IC	ORF1AB	N	IC
Flu A positiivinen	+	-	+/-	-	+	-	-	+
Flu B positiivinen	-	+	+/-	-	+	-	-	+
RSV positiivinen	-	-	+	+	+/-	-	-	+
SARS-CoV-2 positiivinen	-	-	+	-	+	+	-	+/-
	-	-	+	-	+	-	+	+/-
	-	-	+	-	+	+	+	+/-
Negatiivinen	-	-	+	-	+	-	-	+
Virheellinen	-	-	-	-	-	-	-	-

- Jos IC on negatiivinen ja patogeenin kohdegeenin tulos on positiivinen, tulos katsotaan positiiviseksi. Kohdespesifisen geenin suuri kopiomäärä voi johtaa negatiiviseen IC tulokseen.
- Jos yhdessä tai useammassa patogeenissa vahvistetaan virheellinen tulos, kyseiset testitulokset mitätöidään. Tee uusi testi.

Yhteystiedot ja tilaukset

Aidian Oy, Finland

info@aidian.fi / +358 50 380 9684

tilaukset@aidian.fi

Tuote	Tuotenumero	Tilausnumero
SD BIOSENSOR STANDARD M10 CONSOLE, 1 PC	11M1011	155067
SD BIOSENSOR STANDARD M10 MODULE, 1 PC	11M1012	155068
SD BIOSENSOR M10 PUNCHER, 1 PC	X9001	155299
SD BIOSENSOR M10 FLU/RSV/SARS-COV-2, 10 tests	11FLU10A	155176

AIDIAN

aidian.eu