




bioLytical Laboratories INSTI® Multiplex HIV-1 / HIV-2 / Syphilis vasta-ainetesti

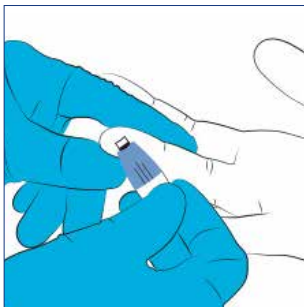


1 Puhdista näytteenotto-sormi alkoholilla kostutetulla puhdistuslapulla. Anna sormen kuivua. Purista sormea kevyesti ja aseta lansetti tiukasti ihoa vasten.

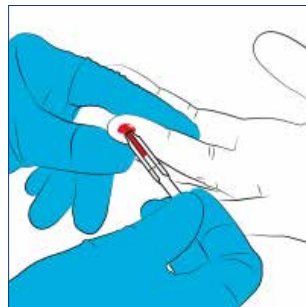

2 Purista sormea saadaksesi veren virtaamaan. Aseta pipetti (50 µl) vaakatasossa kiinni veripisaraan. Anna pipetin täyttyä mustaan merkki-viivaan asti. Älä purista pipettiä, ja huomioi, ettet tuki pipetin päässä olevaa ilmareikää.

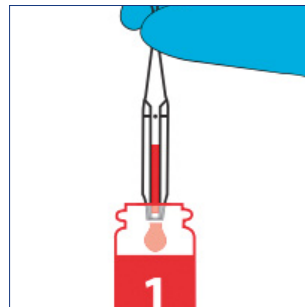

3 Kun pipetti on täynnä, siirrä verinäyte liuos-pulloon 1 (Solution 1: Sample Diluent) puristamalla pipetin yläosaa. Sulje liuospullo 1 ja sekoita pulloa varovasti kääntelemällä.

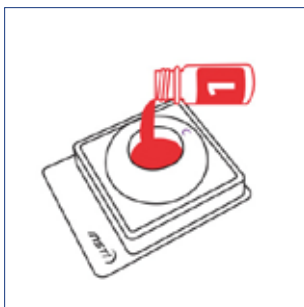

4 Avaa testikasetin pakkaus koskematta näyteikkunaan. Kaada liuospullon 1 sisältö näyteikkunaan. Liuospullo 1 tulee kaataa näyteikkunaan 5 minuutin kuluessa näytteen lisäämisestä pulloon. Anna liuoksen imeytyä kokonaan.



5 Sekoita liuospullo 2 (Solution 2: Colour Developer) hyvin kääntelemällä sitä hitaasti. Kaada liuospullon 2 sisältö keskelle näyteikkunaa. Anna liuoksen imeytyä kokonaan.



6 Kaada liuospullon 3 (Solution 3: Clarifying Solution) sisältö keskelle näyteikkunaa. Anna imeytyä kokonaan. Lue tulos heti, kun liuos 3 on imeytynyt näyteikkunaan. Tulosta ei saa lukea, kun liuospullon 3 lisäämisestä on kulunut yli 5 minuuttia.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.


bioLytical Laboratories INSTI® Multiplex HIV-1 / HIV-2 / Syphilis vasta-ainetesti

Näytteenotto ja käsittely


- Ota kaikki tarvikkeet esille ennen testauksen aloittamista: alkoholilla kostutettu puhdistuslappu, lansetti, pipetti, avaamaton testikassetti sekä yhdet pullot liuoksia 1, 2 ja 3.
- Näytemuodot: kokoveri, seerumi tai plasma (tarkista seerumi- ja plasmanäytteiden käsittely käyttöohjeesta)
- Tarkista kontrollien käyttö käyttöohjeesta.
- Testipakkaus säilyy 15–30 °C:ssa.
- Kaikki testauksessa tarvittava materiaali tulee käyttää **välittömästi** pakkauksen avaamisen jälkeen.
- Näyteitä tulee käsitellä potentiaalisena infektiivisenä materiaalina.
- Älä käytä vanhentuneita testejä tai reagensseja.
- Älä sekoita eri testipakkausten sisältöä keskenään.

Tulosten tulkinta


Ei-reaktiivinen/negatiivinen

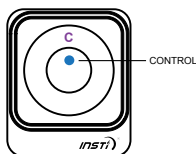


Määrittelemätön tulos

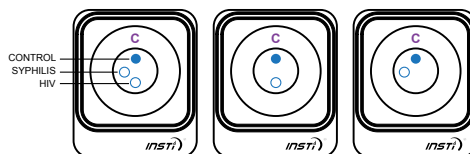


Syphilis & HIV reaktiivinen/positiivinen

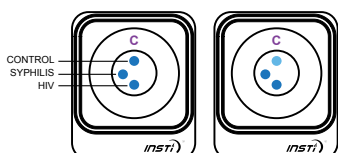


Virheellinen tulos

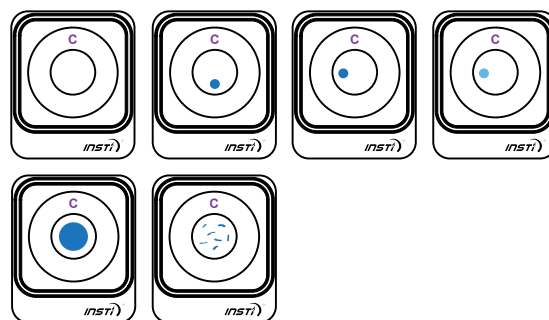

Syphilis-reaktiivinen/positiivinen

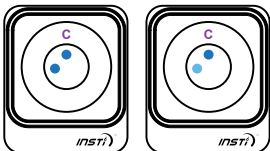

HIV-reaktiivinen/positiivinen

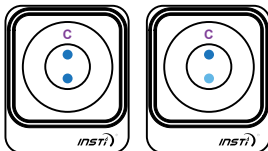

Yhteydenotot ja tilaukset

Aidian Oy

info@aidian.fi / 050 380 9684

tilaukset@aidian.fi / 050 381 5198

Tuote	Tuotenro	Tilausno
INSTI® Multiplex HIV-1/HIV-2 Syphilis testi, 1 kpl	90-1028	147733
INSTI® HIV-1/HIV-2 kontrollit, 20 testiä	90-1036	149874
INSTI® SYPH kontrolli, 20 testiä	90-1032	154850
INSTI® MICROSAFE® pipetit, 100 kpl	1050-100	155111

AIDIAN

aidian.eu