



# Hb-kontrolli


Anna kontrollin stabiloitua 30 minuuttia huoneenlämmössä ennen käyttöä.

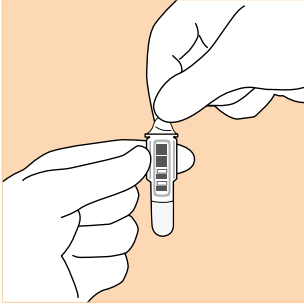



**1** Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

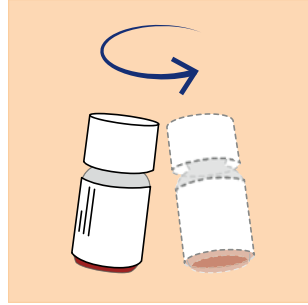

**2** Sekoita QuikRead go Hb Control -kontrollipullo hyvin kierittämällä. Älä ravista. Punasoluilla on taipumus vajota pullon pohjaan. Pidä pullon kaula puhtaana.

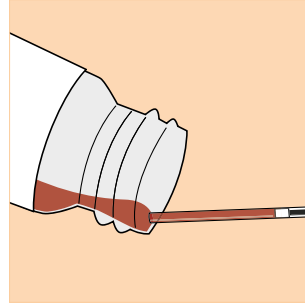


**3** Laita mäntä kapillaarin sinisellä merkittyyn päähän. Kallista kontrollipulloa siten, että neste saavuttaa pullon kaulan. Ota näyte asettamalla kapillaarin kärki aivan nestepinnan alapuolelle. Täytä sinisellä merkitty kapillaari kokonaan valkoiseen "stopperiin" saakka.

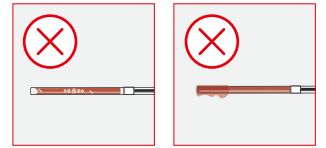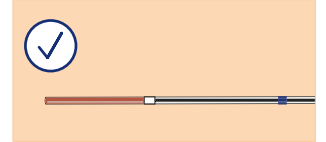


Kontrolli säilyy kapillaarissa 5 minuuttia.


Huom! Älä laita kapillaaria pullon pohjaan asti. Jos kapillaariin tulee ilmakuplia, niin hävitä kapillaari ja ota uusi näyte. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.

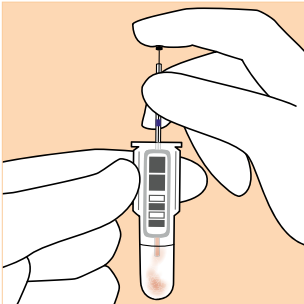


**4** Lisää näyte (20 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjäntyi kokonaan.

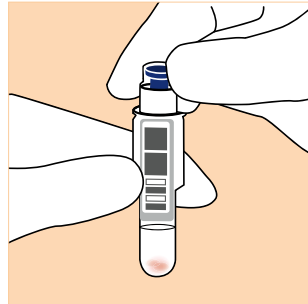

**5** Sulje kyvetti huolellisesti sinisellä reagenssikorkilla. Älä paina korkin värillistä sisäosaa alas. Suorita testi 2 tunnin kuluessa.

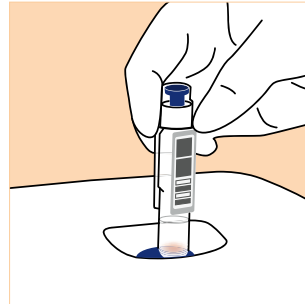

**6** Valitse laitteen näytöltä "Kontrollimittaus". Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.

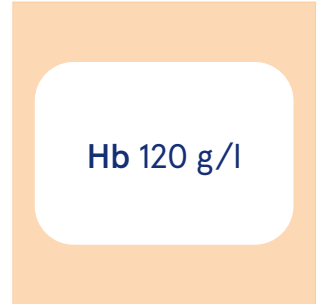

**7** Mittausaika on 2 minuuttia. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammioista. Kontrollin rajat löytyvät pullon etiketissä olevista merkinnöistä.

## Säilytys

Avattu Hb-kontrollipullo säilyy yhden kuukauden jääkaapissa.

Huom! Vältä käyttämästä kontrollin viimeisiä tippoja.