




QuikRead go CRP+Hb

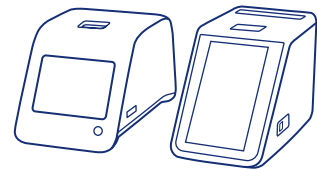


QuikRead go ja QuikRead go Plus -laitteille

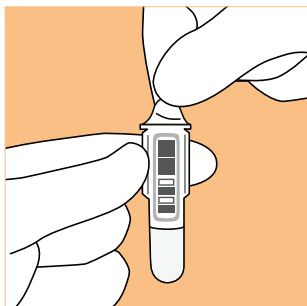


1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

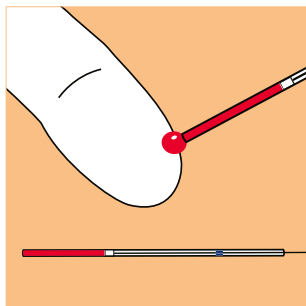


2 Laita mäntä kapillaarin sinisellä merkittyyn päähän. Ota näytettä (20 µl) kapillaarin valkoiseen "stopperiin" saakka. Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta

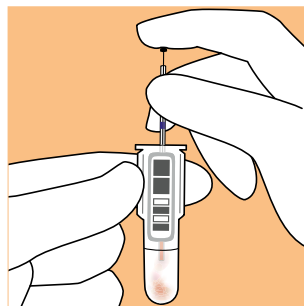


3 Lisää näyte (20 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjäntyi kokonaan.

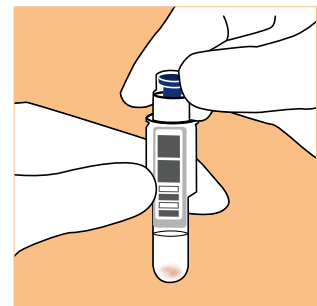


4 Sulje kyveti huolellisesti sinisellä reagenssikorkilla. Älä paina korkin värillistä sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.

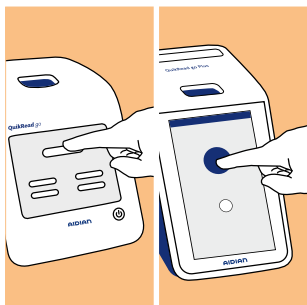

5 Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä Mittaus / Näytteen mittaus.

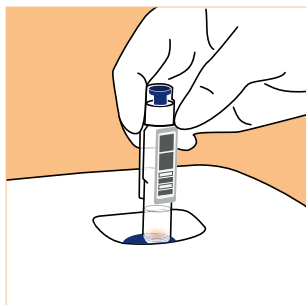


6 Laita kyveti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.

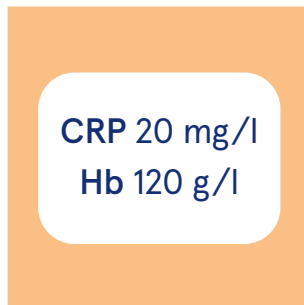

7 Mittausaika on kaksi (2) minuuttia. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyveti nousee automaattisesti ylös mittauskammioista.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go CRP+Hb

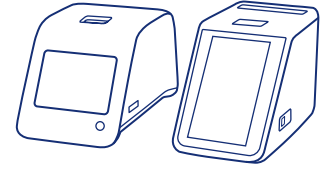

Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–8 °C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka



Reagenssi-
korkit

2–8 °C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka
18–25 °C: 1 kuukausi
7,5 h/vrk 18–25 °C (ja muun ajan vrk:sta säilytys 2–8 °C): 3 kuukautta



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 18–25 °C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen:
säilytys 2–8 °C: 6 kuukautta / säilytys 18–25 °C: 3 kuukautta



Avattu kyvetti

Anna puskurin lämmitä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista. Testi tulee tehdä kahden (2) tunnin kuluessa kyvetin avaamisesta. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



CRP-kontrollit

Avaamattomat pullo 2–8 °C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka
Avattu pullo 2–8 °C: enintään 2 kuukautta



Hb-kontrolli

Avaamaton pullo 2–8 °C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka
Avattu pullo 2–8 °C: enintään 1 kuukausi

Yhteystiedot

Aidian Oy
info@aidian.fi / +358 50 380 9684
quikread.com

Tilaukset

Mediq Suomi Oy
asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

Tuote	Tuotenumero	Tilausnro, Mediq Suomi
QuikRead go CRP+Hb, 50 testiä sisältää kapillaarit ja männät	140068	100042128
QuikRead go CRP Control	153764	10025818
QuikRead go CRP Control High	153763	10015759
QuikRead go Hb Control	141154	100003219
QuikRead kapillaarit 20 µl, 50 kpl	67962	10003465
QuikRead männät, 50 kpl	67966	20011669
QuikRead go Instrument	135867	-
QuikRead go Plus Instrument	155375	-