

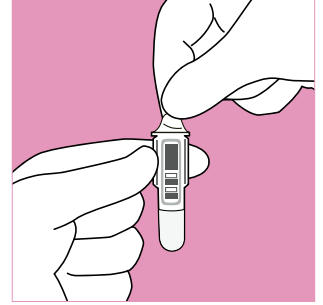
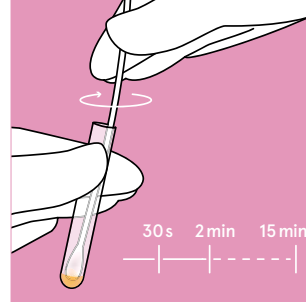
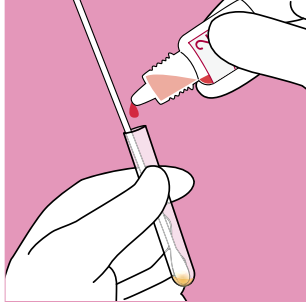
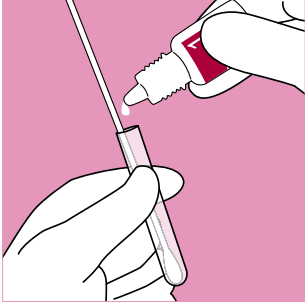
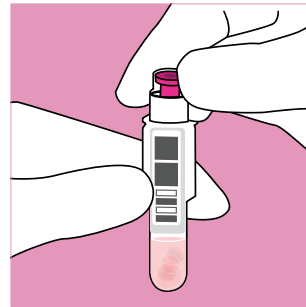


QuikRead go® Strep A

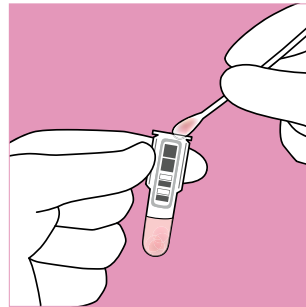



1 Ota nielunäyte testipakkauksessa olevalla näytteenottotikulla. Laita näytteenottotikku uuttoputkeen ja lisää kaksi (2) tippaa väritöntä uuttoliuosta nro 1 ja kaksi (2) tippaa punaista uuttoliuosta nro 2. Liuoksen väri uuttoputkessa muuttuu keltaoranssiksi.

2 Pyöritä näytteenottotikku liuoksessa vähintään 30 s. Jätä tikku uuttoputkeen vielä 90 s. ajaksi. Tikku saa seistä uuttoputkessa enintään 15 minuuttia. Poista esitäytetyn kyvetin suojafolio. Vältä koskemista kyvetin alaosaan.

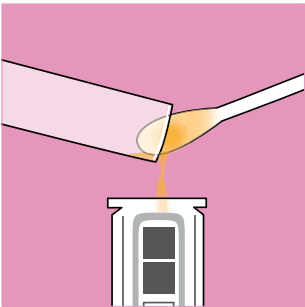

3 Siirrä uuttoputkessa oleva näyte näytteenottotikun avulla kyvettiin kallistamalla uuttoputkea. Jos uuttoputkeen jää liuosta, kaada se kyvettiin. Laita näytteenottotikku kyvettiin ja pyöritä tikku voimakkaasti. Liuoksen väri muuttuu punaiseksi. Poista neste tikusta painamalla sitä kyvetin sisäseinämää vasten ja nosta tikku kyvetistä.

4 Sulje kyvetti huolellisesti Strep A -reagenssikorkilla. Älä paina korkin sisäosaa alas. Näyte säilyy puskurissa 4 tunnin ajan. Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä [Mittaus](#).

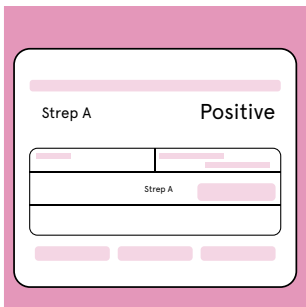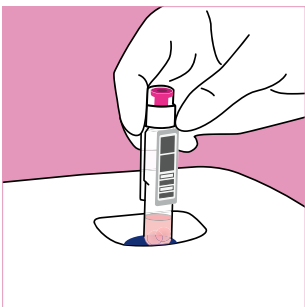

5 Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammioista.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go[®] Strep A



Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton reagenssipakkaus 2–25 °C:
reagenssipakkauksen **vanhenemispäivämäärään** saakka.



Reagenssikorkit,
uuttoreagenssit
ja kontrollit

Avaamattomina säilytys 2–25 °C: **vanhenemispäivämäärään** saakka.
Avattuina säilytys 2–25 °C: **12 kuukautta**.



Esitetyt
kyvetit

Avaamattomat pakkaukset säilytys 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen
käyttöpäivämäärään** saakka. Foliopussin avaamisen jälkeen:
Säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **3 kuukautta**.




Avattu
kyvetti


Anna puskurin lämmentä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista.
Avattu kyvetti tulee käyttää **2 tunnin** kuluessa.

Näytteenotto


Varmista, että näyte siirtyy kokonaan testiliuokseen. Näytteenottotikun pyörittäminen sekä uuttovaiheessa että siirrettäessä näytettä kyvetiin on tärkeää. Muista poistaa näyte tikusta painamalla sitä kyvetin sisäseinämää vasten ennen tikun poistamista kyvetistä.

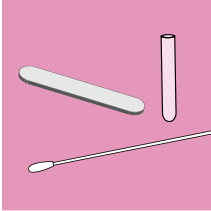


1 Tarvitset seuraavat tarvikkeet näytteen ottamiseksi QuikRead go Strep A testausta varten: HydraFlock-näytteenottotikku, kielilasta, QuikRead go Strep A -uuttoputki. Muista käyttää suojahansikkaita. Käytä vain QuikRead go Strep A -reagenssipakkauksen mukana toimitettuja HydraFlock-näytteenottotikkuja. Muiden näytteenottotikkujen käyttö saattaa johtaa väärään tulokseen.

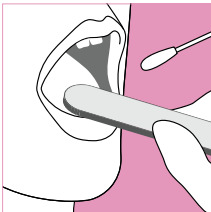

2 Poista HydraFlock-näytteenottotikku pakkauksestaan. Pyydä potilasta avaamaan suunsa. Paina potilaan kieltä alas kielilastalla.

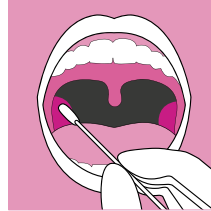

3 Kerää nielunäyte näytteenottotikulla. Pyöritä tikku näytteenoton aikana edustavan näytteen varmistamiseksi. Muista ottaa näyte nielurisojen molemmilta puolilta. Vältä näytteenottoa muilta alueilta välttääksesi väärä negatiivinen tulos. Liian suuret määrät sylkeä tai limaa voivat häiritä testin suoritusta.

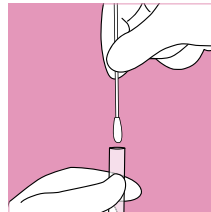

4 Kontaminaation välttämiseksi varmista, ettei näytteenottotikku kosketa suun muita pintoja, esimerkiksi poskia tai kieltä. Laita tikku uuttoputkeen. Varmista uuttovaiheen onnistuminen. Tarkkaile testiliuoksen värimuutoksia. Väri ilmaisee liuoksen oikean pH-arvon eri työvaiheissa. Noudata ohjeessa annettuja aikarajoja.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / +358 50 380 9684

aidian.fi / quikread.com

Tilaukset

Mediq Suomi Oy

asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go Strep A -reagenssipakkaus, 50 testiä	135883	20008848
QuikRead go -laite	135867	-