




QuikRead go® easy CRP

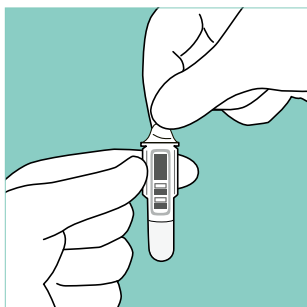


1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

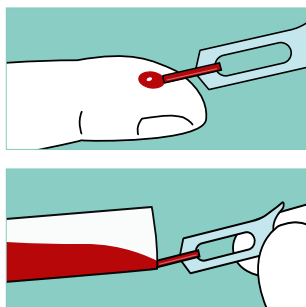


2 Pidä QuikRead go Sample Collector 10µl -näytteenotinta lähes vaakatasossa ja ota näyte asettamalla kärki juuri näytteen pinnan alle. Täytä näytteenottimen kapillaariosa kokonaan.

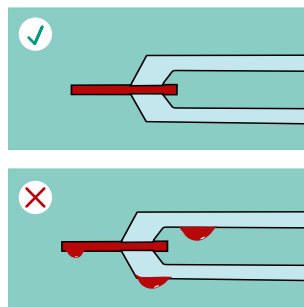


Huom! Tarkista, että kapillaariosa on täynnä. **Älä pyyhi näytteenotinta!** Jos näytteenottimessa on ylimääräistä näytettä, hävitä näytteenotin.

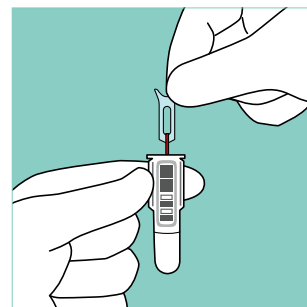

3 Laita näytteenotin kyvetiin kahden (2) minuutin kuluessa näytteenotosta.

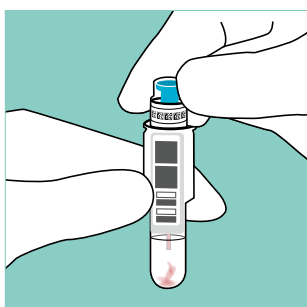

4 Sulje kyvetti huolellisesti easy CRP -reagenssikorkilla. Älä paina korkin turkoosia sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.

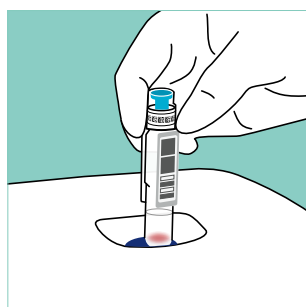

5 Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä **Mittaus**. Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.



6 Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go® easy CRP



Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–25 °C:n lämpötilassa:
pakkauksen viimeiseen **käyttöpäivämäärään** saakka



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivä-
määrään** saakka

Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen:
säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **3 kuukautta**



Avattu kyvetti

Anna puskurin lämmentä huoneenlämpöiseksi (18–25 °C) ennen testin suorittamista.

Testi tulee tehdä **kahden (2) tunnin** kuluessa kyvetin avaamisesta.
Näyte säilyy puskuriliuoksessa **kahden (2) tunnin** ajan.



Reagenssikorkit

Avaamaton putkilo 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivä-
määrään** saakka

Avaamisen jälkeen 2–25 °C: **6 kuukautta**



Näytteen-
ottimet

Säilytys 2–25 °C: QuikRead go Sample Collector 10µl -pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka



CRP-kontrollit

Avaamattomat pullot 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **2 kuukautta**

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / +358 50 380 9684

quikread.com

Tilaukset

Mediq Suomi Oy

asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go easy CRP, 50 testiä sisältää QuikRead go Sample Collector 10µl -näytteenottimet	153287	10003519
QuikRead go CRP Control Low	153765	20015104
QuikRead go CRP Control	153764	10025818
QuikRead go CRP Control High	153763	10015759
QuikRead go -laite	135867	-
QuikRead go Sample Collector 10µl	153211	20014872