




QuikRead go easy CRP

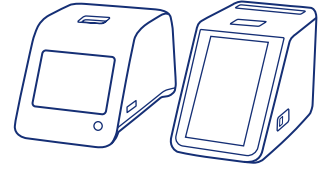


QuikRead go ja QuikRead go Plus -laitteille

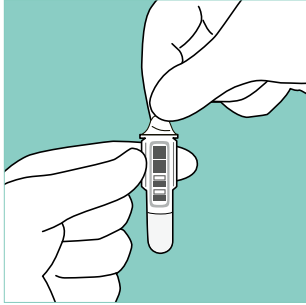


1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

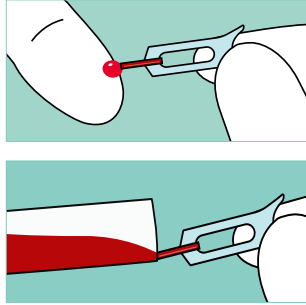


2 Pidä QuikRead go Sample Collector 10µl -näytteenotinta lähes vaakatasossa ja ota näyte asettamalla kärki juuri näytteen pinnan alle. Täytä näytteenottimen kapillaariosa kokonaan.

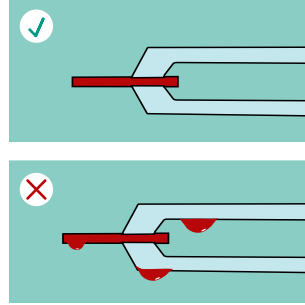


Huom! Tarkista, että kapillaariosa on täynnä. Älä pyyhi näytteenotinta! Jos näytteenottimessa on ylimääräistä näytettä, hävitä näytteenotin.

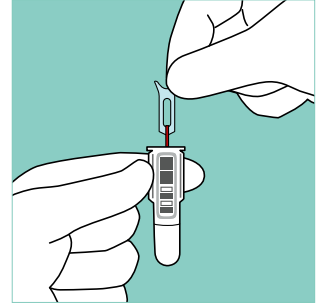


3 Laita näytteenotin kyvettiin kahden (2) minuutin kuluessa näytteenotosta.

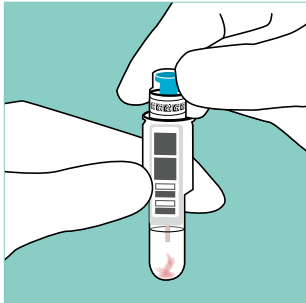

4 Sulje kyvetti huolellisesti easy CRP -reagenssikorkilla. Älä paina korkin turkoosia sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.

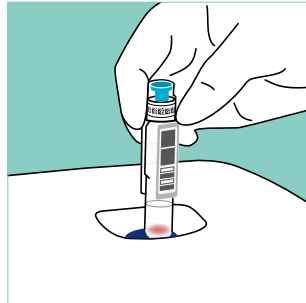


5 Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä Mittaus / Näytteen mittaus. Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.

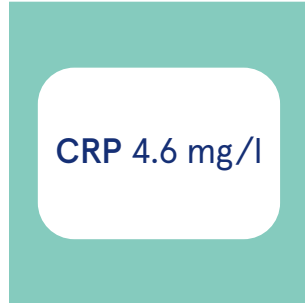

6 Mittausaika on kaksi (2) minuuttia. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mitauskammiosta.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go easy CRP

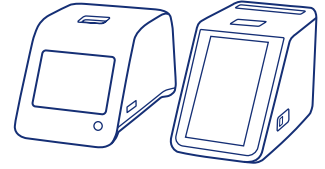

Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen
käyttöpäivämäärään saakka



Reagenssi-
korkit

Avaamaton putkilo 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen
käyttöpäivämäärään saakka

Avaamisen jälkeen 2–25 °C: 6 kuukautta



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen
käyttöpäivämäärään saakka

Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen:
säilytys 2–8 °C: 6 kuukautta / säilytys 18–25 °C: 3 kuukautta



Avattu kyveti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi (18–25 °C) ennen testin suorittamista. Testi tulee tehdä kahden (2) tunnin kuluessa kyvetin avaamisesta. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



Näytteen-
ottimet

Säilytys 2–25 °C: QuikRead go Sample Collector 10µl -pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka



CRP-kontrollit

Avaamattomat pullot 2–8 °C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka
Avattu pullo 2–8 °C: enintään 2 kuukautta

Yhteystiedot

Aidian Oy
info@aidian.fi / +358 50 380 9684
quikread.com

Tilaukset

Mediq Suomi Oy
asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go easy CRP sisältäen QuikRead go Sample Collector 10µl -näytteenottimet	153287	10003519
QuikRead go CRP Control Low	153765	20015104
QuikRead go CRP Control	153764	10025818
QuikRead go CRP Control High	153763	10015759
QuikRead go Sample Collector 10µl	153211	20014872
QuikRead go Instrument	135867	-
QuikRead go Plus Instrument	155375	-