




# QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP & wrCRP+Hb

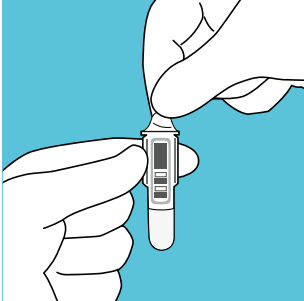


**1** Poista suojakalvo kyvetin päältä. Varo läikyttämästä puskuria. Älä koske kyvetin alaosaan.

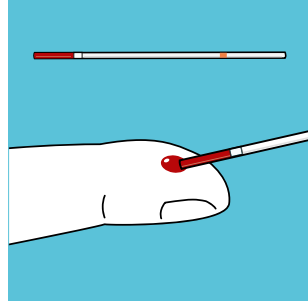

**2** Laita mäntä kapillaarin oranssilla merkittyyn päähän. Ota näytettä (10 µl) kapillaarin valkoiseen "stopperiin" saakka. Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.

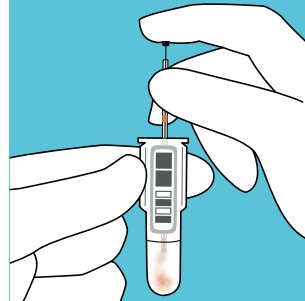


**3** Lisää näyte (10 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjentyi kokonaan.

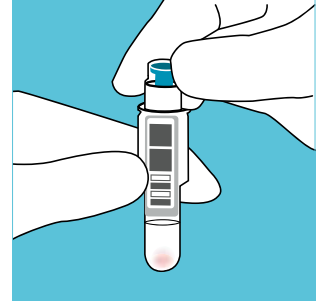

**4** Sulje kyvetti huolellisesti wrCRP-reagenssikorkilla. Älä paina korkin turkoosia sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



**5** Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä "Mittaus".

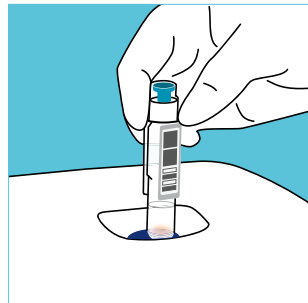

**6** Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.



**7** Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle, ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta. QuikRead go wrCRP+Hb -testin Hb-tulos näkyy CRP-tuloksen alapuolella.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

# QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP & wrCRP+Hb



Reagenssi-  
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–25 °C:n lämpötilassa:  
säilyy pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka



Reagenssi-  
korkit

Avaamaton putkilo 2–25 °C:  
pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka  
Avaamisen jälkeen 2–25 °C: **6 kuukautta**



Kyvetit

Avaamattomat pakkaukset 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka  
Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen  
Säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **3 kuukautta**



Avattu  
kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista  
Testi tulee tehdä **kahden (2) tunnin** kuluessa kyvetin avaamisesta  
Näyte säilyy puskuriliuoksessa **kahden (2) tunnin** ajan



CRP-  
kontrollit

Avaamaton pullo 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka  
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **2 kuukautta**



Hb-  
kontrolli

Avaamaton pullo 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka  
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **1 kuukausi**

## Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / +358 50 380 9684  
quikread.com

## Tilaukset

Mediq Suomi Oy  
asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go wrCRP, 50 testiä sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät	146521	10003500
QuikRead go wrCRP+Hb, 50 testiä sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät	146255	10003199
QuikRead go CRP Control Low	153765	20015104
QuikRead go CRP Control	153764	10025818
QuikRead go CRP Control High	153763	10015759
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656	40015817
QuikRead go 10 µl kapillaarit, 50 kpl	147851	20011670
QuikRead männät, 50 kpl	67966	20011669
QuikRead go -laite	135867	-