




# QuikRead go wrCRP

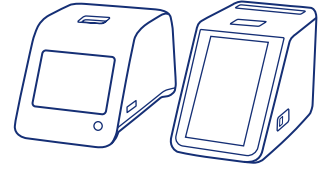


## QuikRead go ja QuikRead go Plus -laitteille

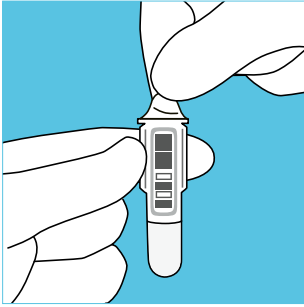


**1** Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

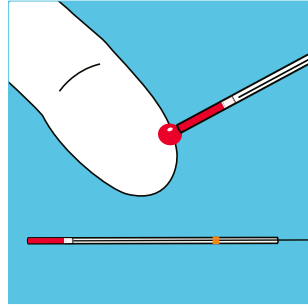


**2** Laita mäntä kapillaarin oranssilla merkittyyn päähän. Ota näytettä (10 µl) kapillaarin valkoiseen "stopperiin" saakka. Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.

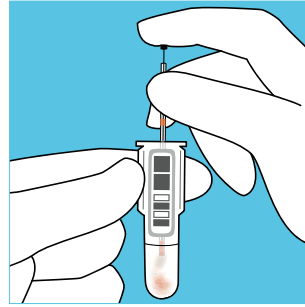


**3** Lisää näyte (10 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjäntyi kokonaan.

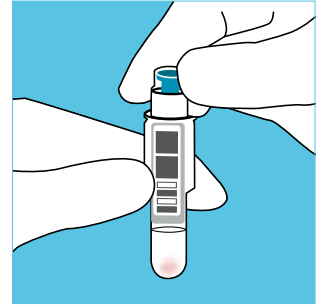


**4** Sulje kyvetti huolellisesti turkoosilla reagenssikorkilla. Älä paina korkin värillistä sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.

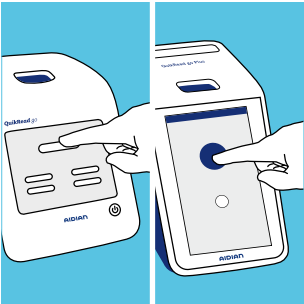


**5** Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä Mittaus / Näytteen mittaus.

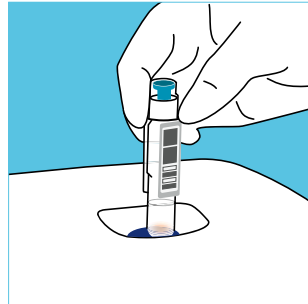

**6** Laita kyvetti laitteen niin, että viivakoodi on itseesi päin.

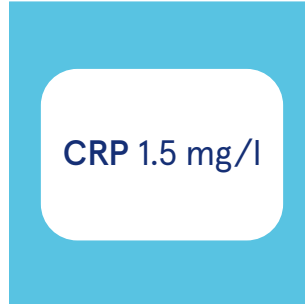


**7** Mittausaika on kaksi (2) minuuttia. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mitauskammioista.

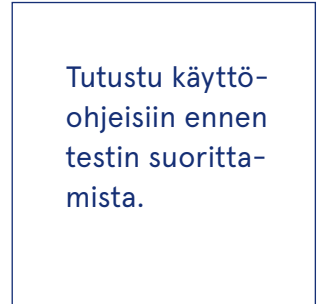

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

# QuikRead go wrCRP

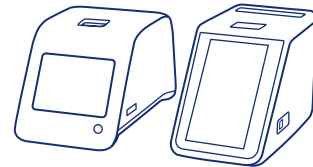

Reagenssi-  
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen  
käyttöpäivämäärään saakka



Reagenssi-  
korkit

Avaamaton putkilo 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen  
käyttöpäivämäärään saakka

Avaamisen jälkeen 2–25 °C: 6 kuukautta



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen  
käyttöpäivämäärään saakka

Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen:  
Säilytys 2–8 °C: 6 kuukautta / säilytys 18–25 °C: 3 kuukautta



Avattu kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin  
suorittamista. Testi tulee tehdä kahden (2) tunnin kuluessa kyvetin  
avaamisesta. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



CRP-kontrollit

Avaamattomat pullo 2–8 °C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka  
Avattu pullo 2–8 °C: enintään 2 kuukautta

## Yhteystiedot

Aidian Oy  
info@aidian.fi / +358 50 380 9684  
quikread.com

## Tilaukset

Mediq Suomi Oy  
asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

| Tuote  | Tuotenro | Tilausno,<br>Mediq Suomi |
|--|----------|--------------------------|
| QuikRead go wrCRP, 50 testiä<br>sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät | 146521   | 10003500                 |
| QuikRead go CRP Control Low  | 153765   | 20015104                 |
| QuikRead go CRP Control  | 153764   | 10025818                 |
| QuikRead go CRP Control High   | 153763   | 10015759                 |
| QuikRead kapillaarit 10 µl, 50 kpl                                     | 147851   | 20011670                 |
| QuikRead männät, 50 kpl  | 67966    | 20011669                 |
| QuikRead go Instrument   | 135867   | -                        |
| QuikRead go Plus Instrument  | 155375   | -                        |