




QuikRead go wrCRP+Hb

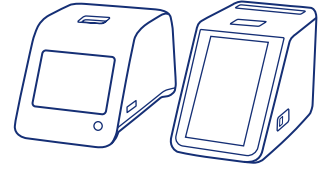


QuikRead go ja QuikRead go Plus -laitteille

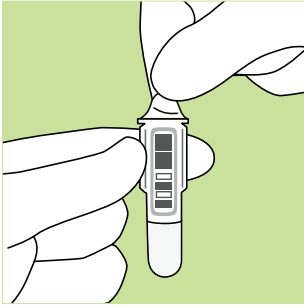


1 Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

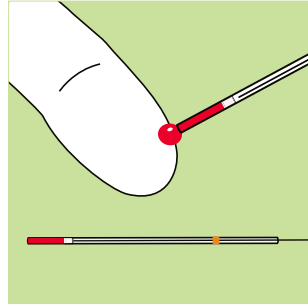


2 Laita mäntä kapillaarin oranssilla merkittyy pään. Ota näytettä (10 µl) kapillaarin valkoiseen "stopperiin" saakka. Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.

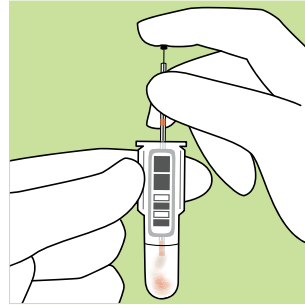


3 Lisää näyte (10 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjä kokonaan.

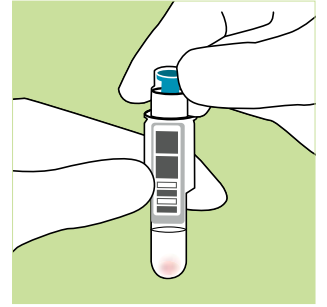


4 Sulje kyvetti huolellisesti turkoosilla reagenssikorkilla. Älä paina korkin värillistä sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.

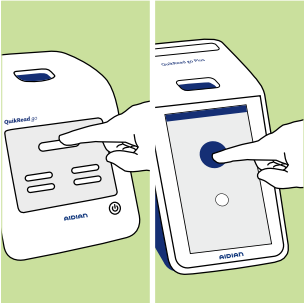

5 Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä Mittaus / Näytteen mittaus.

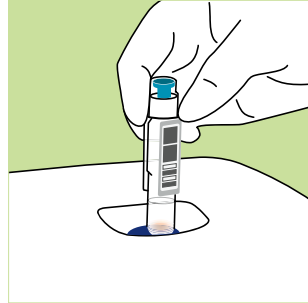

6 Laita kyvetti laitteen niin, että viivakoodi on itseesi päin.

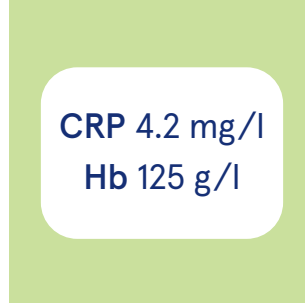


7 Mittausaika on kaksi (2) minuuttia. Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta.



Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

QuikRead go wrCRP+Hb

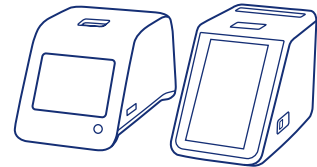

Reagenssi-
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka



Reagenssi-
korkit

Avaamaton putkilo 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Avaamisen jälkeen 2–25 °C: 6 kuukautta



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 2–25 °C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen:
Säilytys 2–8 °C: 6 kuukautta / säilytys 18–25 °C: 3 kuukautta



Avattu kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista. Testi tulee tehdä kahden (2) tunnin kuluessa kyvetin avaamisesta. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



CRP-kontrollit

Avaamattomat pullo 2–8 °C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka
Avattu pullo 2–8 °C: enintään 2 kuukautta



Hb -kontrolli

Avaamaton pullo 2–8 °C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka
Avattu pullo 2–8 °C: enintään 1 kuukausi

Yhteystiedot

Aidian Oy
info@aidian.fi / +358 50 380 9684
quikread.com

Tilaukset

Mediq Suomi Oy
asiakaspalvelu@mediq.com / +358 20 112 1510

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go wrCRP+Hb, 50 testiä sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät	146255	10003199
QuikRead go CRP Control Low	153765	20015104
QuikRead go CRP Control	153764	10025818
QuikRead go CRP Control High	153763	10015759
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656	40015817
QuikRead kapillaarit 10 µl, 50 kpl	147851	20011670
QuikRead männät, 50 kpl	67966	20011669
QuikRead go Instrument	135867	-
QuikRead go Plus Instrument	155375	-