

Finland

QuikRead go -laitteen kierrätys Suomessa

Tällä sivustolla kerrotaan QuikRead go -laitteen kierrätyksestä Suomessa.

Kun QuikRead go -laitteesi on tullut käyttöikänsä päähän, noudata näitä ohjeita, jotta vanha laite hävitetään asianmukaisesti. Huomaa, että nämä ohjeet koskevat **vain Suomessa olevia asiakkaita**.

Tietosuoja ja laitteen sisältämien tietojen poisto

Käytetty QuikRead go -laite voi sisältää henkilötietoa. Huomioithan, että on laitteen käyttäjän vastuulla poistaa laitteen mahdollisesti sisältämä potilastuloshistoria ennen kuin laite toimitetaan kierrätykseen.

Poistaaksesi laitteen sisältämän potilastuloshistorian, noudata seuraavia ohjeita: Tulokset > Tyhjennä tuloshistoria.

Laitteen puhdistus

Ennen kuin käytetty QuikRead go -laite toimitetaan kierrätykseen, tulee sekä sen ulkopinta (kts. tarkemmat ohjeet käyttöohjeen osiosta "Laitteen puhdistaminen") että sisäpinnat puhdistaa. Laitteen sisäpintojen puhdistamiseksi avaa kansi ja suihkuta 5% natriumhypokloriittia laitteeseen kyvetin reiän kautta. Jos kansi ei avaudu, pääset puhdistamaan laitteen sisäosat irrottamalla laitteen pohjassa olevan akkuyksikön kannen ja irrottamalla linssiyksikön.

Anna puhdistusaineen kuivua 24 tunnin ajan. Lisäksi laitetta tulee vanhentaa kaksi viikkoa varastoituna viimeisen käyttökerran jälkeen ennen kuin laite toimitetaan kierrätykseen. Turvallisuutesi vuoksi, käytä kemikaalinkestäviä käsitteitä ja noudata puhdistusaineen käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.

Kierrätys

Aidian Oy on sopinut Elker Oy:n kanssa ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden (yrityslaite; B2B) kierrätyksestä. Tarkista lähimmän yrityslaitteiden vastaanottopisteen sijainti ja yhteystiedot täältä <https://elker.fi/palauttajalle/yrityksille/yritysten-vastaanottopisteet/>. Ota suoraan yhteyttä keräyspistettä ylläpitävään kumppaniin ennen QuikRead go -laitteen palautusta saadaksesi lisätietoja.

Huomaa: Ennen kuin hävität laitteen, poista vaihdettavissa olevat paristot ja akut, teippaa niiden navat ja hävitä ne asianmukaisesti paristojen ja akkujen keräyspisteiden kautta.

Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE; 2012/19/EU) pyrkii vähentämään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrää sekä edellyttää hävittämään sähkö- ja elektroniikkalaitteet ympäristöystävällisesti. Suomessa WEEE-direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä valtioneuvoston asetuksella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014). Lisäksi akkujen ja paristojen kierrätyksestä säädetään direktiivissä 2006/66/EY, joka on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä valtioneuvoston asetuksella paristoista ja akuista (520/2014). Edellä mainittujen lainsäädäntöjen mukaisesti Aidianilla on velvollisuus järjestää tuotteidensa jätehuolto, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Aidian on sitoutunut näihin vaatimuksiin, ja liittynyt tuottajayhteisöihin (Elker Oy sekä Recser Oy), jotka järjestävät sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä akkujen ja paristojen keräyksen ja kierrätyksen Suomessa.