




QuikRead go® easy CRP

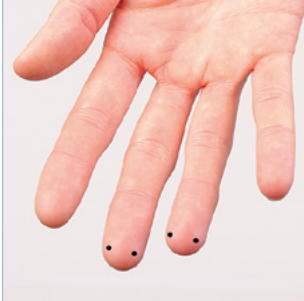


1 Vegyen mintát meleg vagy felmelegített kézből. A mintavétel helye a középső és a gyűrűs ujjak oldalsó része.

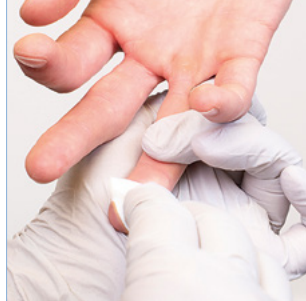


2 Tisztítsa meg az ujjat alkoholos törléssel. Egy törlés elég. Hagyja az ujjat megszáradni.

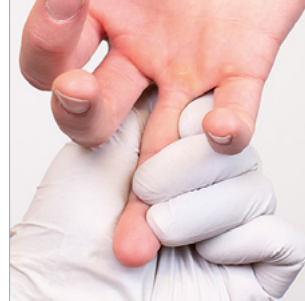

3 Támassza meg hüvelykujjával azt az ujjat amiből a mintát fogja venni. A mutató és a középső ujjával teljes hosszában préselje azt az ujjat, amiből a mintát fogja venni, hogy a mintavétel helye megduzzadjon.

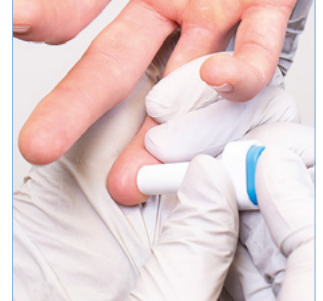


4 Helyezzen megfelelő méretű lándzsát szorosan a bőrhöz, majd szűrje át a bőrt. Engedje el az ujj szorítását.

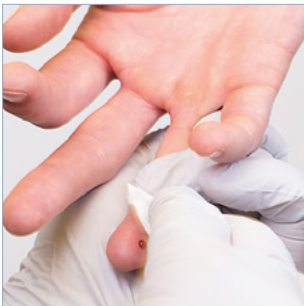

5 Préselje ki és törölje le az első cseppet. Préseljen ki új vércseppet a tényleges mintavételhez. Szorítsa a mintavételhez használt ujjat, de ne folyamatosan.



6 Tartsa a mintagyűjtőt csaknem vízszintesen, közvetlenül a vércsepp felszíne alá. Töltse fel teljesen a mintagyűjtő kapilláris részét.

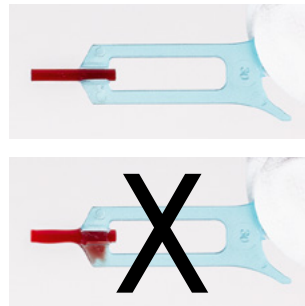

7 **Megjegyzés!** Ellenőrizze, hogy a kapilláris rész teljesen fel van-e töltve. **Ne törölje le a mintagyűjtőt!** Ha több minta van a mintagyűjtőn, dobja ki a mintagyűjtőt.

Helyes mintagyűjtési technika:

- Melegítse fel a kezeket
- Kerülje a fejtést
- Kerülje a folyamatos szorítást

QuikRead go® easy CRP

Mintavételi helyek

A hideg kezet fel kell melegíteni, hogy megkönnyítsük a mintavételt. Az emberek a hüvelykujjukat és az mutatóujjukat használják a fogáshoz, ezért ezek nem ajánlott mintavételi helyekként. A kisujj bőre sokkal vékonyabb, mint a többi ujj esetében, ami a csont elérésének kockázatát növeli. Az ujjak oldalán több hajszálér és kevesebb ideg van, mint a középső részeken, ami csökkenti a mintavétel miatt okozott fájdalmat.

A mintavételi hely tisztítása

A fertőzések elkerülése érdekében fontos a mintavételi hely tisztítása. Hagyja, hogy az alkohol / víz elpárologjon a bőrről, hogy ne hígítsák fel a mintát. Sőt, egy csepp vér sem fog megmaradni a nedves bőrön.

A mintavétel pozíciója

A beteg tenyerét szilárdan kell tartani, hogy a páciens ne tudja hátrahúzni a kezét, amikor azt megszurja. A minta vételekor nyomja meg a beteg ujját, hogy az megteljen vérrel.

A szűrés

Van mind szűrő, mind vágó lándzsa. A vágott gyakran hatékonyabb, mint a szűrt seb. Ha a lándzsa túl kicsi, nehéz elérni, hogy elég nagy legyen a vércsepp. Válassza ki a páciensnek megfelelő méretű lándzsát. Nyomja a lándzsát erősen a bőrhöz, hogy elkerülje a túl kicsi szűrést.

A minta gyűjtése előtt távolítsa el a védőfóliát a küvettáról. Helyezze a mintagyűjtőt a küvettába. Zárja le a küvettát reagens kupakkal. Ne nyomja le a kupak türkizkék belső részét.

Vércsepp

Az első csepp többnyire intersticiális folyadékkal telt, ezért kell letörölni. A mintavétel előtt hagyja, hogy egy csepp jó minőségű vér gyűjön össze. A mintavételhez használt ujjat szorosan, de ne folyamatosan, és a szűrés helye mellett nyomja meg. Ha szorítania kell az ujjat a megfelelő mennyiségű mintavétel miatt, ne felejtse el időről időre felengedni a szorítást. Túl erős nyomás hatására megnőhet az intersticiális folyadék mennyisége a mintában.

A mintagyűjtő töltése (10µl)

Tartsa a QuikRead go Sample Collector 10µl mintagyűjtőt csaknem vízszintesen a vércsepp felületéhez. Töltse fel teljesen a mintagyűjtő kapilláris részét. A kapilláris hatás a mintát a mintagyűjtő kapilláris részébe szívja. Gyűjtse össze a mintát a vércsepp széle felől. Ne nyomja a mintagyűjtőt a bőrhöz. Ha feltöltés közben lefelé döntve tartja a mintagyűjtőt, előfordulhat, hogy nem töltődik fel teljesen, vagy légbuborékok képződhetnek benne. A mintának légbuborékoktól mentesnek kell lennie, mivel a túl kevés mintatér fogat befolyásolja a vizsgálat megbízhatóságát. Ne törölje le a mintagyűjtőt. Ha többlet minta van a mintagyűjtőn, dobja ki a mintagyűjtőt, és vegyen új mintát.

A minta küvettába helyezése

A minta begyűjtése előtt távolítsa el a védőfóliát a küvettáról. Helyezze be a mintagyűjtőt a küvettába. Zárja le a küvettát reagenssapkával. Ne nyomja le a kupak türkizkék belső részét.

A kiváló minőségű minta növeli a vizsgálati eredmény megbízhatóságát.

Kapcsolat

Aidian Oy, odštěpný závod CZ
CZ, HU, PL, SK & Délkelet Európa fiókroda
Csehország, 169 00 Prága 6, Bělohorská utca 57
tel: +36205019012 / info@aidian.hu

www.aidian.hu / www.quikread.hu / www.testcrp.hu

Az alábbi tesztekhez alkalmazható:

- QuikRead go easy CRP