



QuikRead go[®] easy CRP



Használat előtt hagyja a kontroll folyadékot **30 percig szobahőmérsékleten** stabilizálódni. Ügyeljen arra, hogy az önzáró csavaros kupak teljesen meg legyen szorítva.

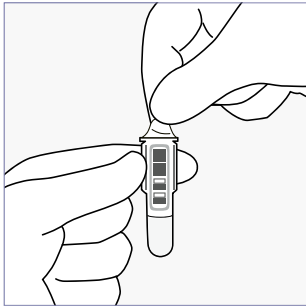



1 Távolítsa el a fólia fedelét a küvettáról. Ne érintse meg a küvetta alsó részének átlátszó lapos felületeit.

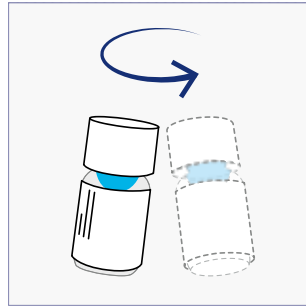


2 Keverje össze a kontroll anyagot **finoman** úgy, hogy az üveget körkörösén mozgattja. **Ne rázza fel a habzás elkerülése érdekében!** Abban az esetben, ha megjelenik egy filmréteg az üveg tetején, várjon, amíg feloldódik vagy óvatosan távolítsa el egy szőszmentes papír sarkával. Tartsa az üveg nyakát tisztán.

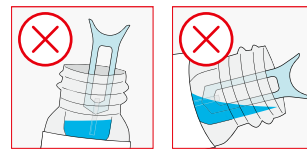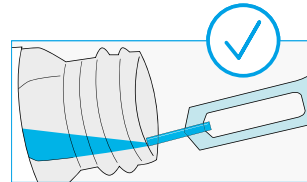


3 Döntse meg a kontroll anyag üvegét, amíg a kontrolloldat el nem éri az üveg nyakát. Helyezze a mintagyűjtőt majdnem vízszintesen **közvetlenül a kontroll anyag felszíne alá**, az üveg szájánál. Töltse fel teljesen a mintagyűjtő kapilláris részét.

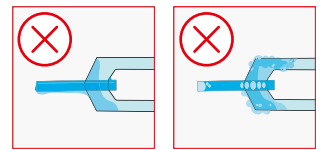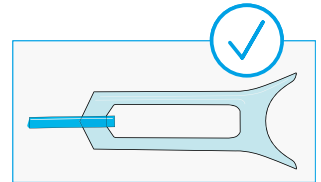


Megjegyzés! Ne helyezze a mintagyűjtőt habzó részbe vagy a kontrollanyag belsejébe. Ha felesleges minta vagy levegőbuborékok vannak a mintagyűjtőn, dobja ki, és vegyen új mintát. Ne törölje le a mintagyűjtőt.

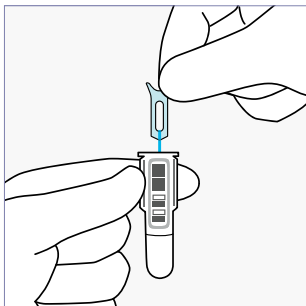

4 Helyezze a mintagyűjtőt a küvettába 2 percen belül.

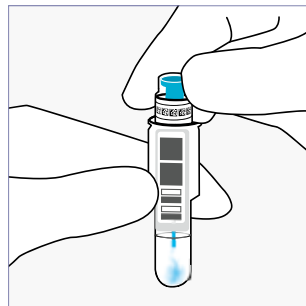

5 Szorosan zárja le a küvettát az easy CRP reagens kupakkal. Ne nyomja le a reagenspaka tűrkizkék belső részét. **Végezze el a tesztet 15 percen belül.**

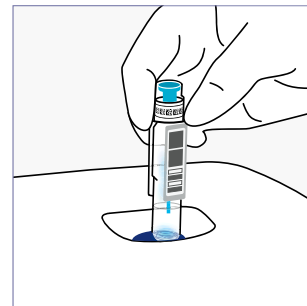

6 Válassza a **Minőségellenőrzés** lehetőséget a QuikRead go műszer kijelzőjén. Helyezze a küvettát a műszer mérőüregébe. A vonalkódnak Ön felé kell néznie.



7 Az eredmények megjelennek a kijelzőn, és a küvetta automatikusan felemelkedik a mérés befejeztével. Az ellenőrzés elfogadási határai a címkén találhatóak.

Tárolás

A felbontott üveg tartalma 2 hónapon keresztül stabil marad 2...8°C fok között.

Megjegyzés! Annak érdekében, hogy a csavaros kupak önzáró mechanizmusa megfelelően működjön, addig kell csavarni, amíg rá nem feszül (2 teljes fordulat). Kerülje a kontroll anyag utolsó cseppjeinek használatát.