



# Acro D-dimer

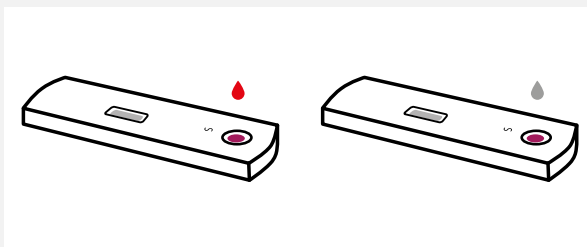


**1** Tilsett 2 dråper fullblod eller 1 dråpe plasma med pipetten som følger med testen, eller bruk 25 µl kapillærblod fra fingerstikk i prøvebrønnen (S).

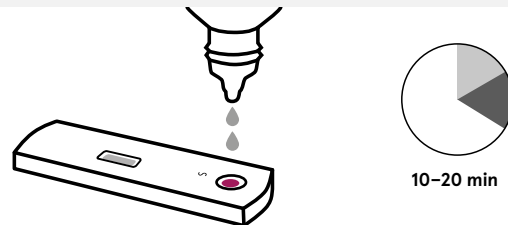


**2** Tilsett deretter 2 dråper diluentbuffer i prøvebrønnen (S) og start stoppeklokken. Les av resultatet etter **10 minutter**, men ikke senere enn 20 minutter.

## Avlesning av resultatet

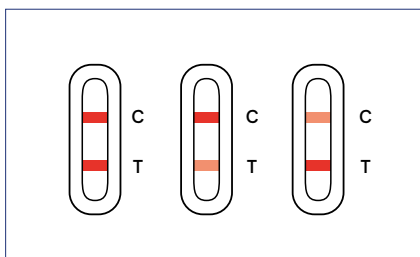


### Avlesning av resultatet

2 linjer vises. En linje vises i kontrollinjeområdet (C) og en i testlinjeområdet (T).

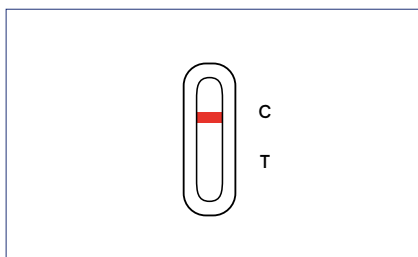

### Negativt resultat

En linje vises i kontrollinjeområdet (C). Ingen linje vises i testlinjeområdet (T).

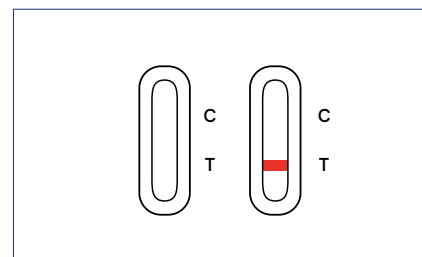

### Ugyldig resultat

Kontrollinjen vises ikke. Utilstrekkelig prøvolum, testkomponenter utgått på dato eller feil prosedyreteknikk er de vanligste årsakene til kontrollinjesvikt.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

# Acro D-dimer

Kun til profesjonell, *in vitro*-diagnostisk bruk

## Prøvetaking og håndtering

- La tester, diluentbuffer, prøver og/eller eksterne kontroller få **romtemperatur** (20–30°C) før testen utføres. Ikke åpne posene før du er klar til å gjennomføre analysen.
- Acro D-dimer testen kan utføres med kapillærblod fra fingerstikk, fullblod eller plasma. Aktuelle antikoagulantia: EDTA K2, heparinnatrium, natriumcitrat, kalium oksalat.
- D-dimere er svært ustabile molekyler. Testen bør utføres **umiddelbart etter prøvetaking**. Plasma og fullblodprøver fra venepunksjon kan oppbevares ved **2–8°C i et halvt døgn**. Kapillærblod fra fingerstikk må analyseres **umiddelbart**.

## Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

www.aidian.no

Produkt	Produktkode	Bestillingsnummer
Acro D-dimer Cassette, 10 tests	CDN-402	154481

For bestillinger:

Mediq Norge AS

Telefon: 67 02 43 00

Epost: kundeservice.no@mediq.com

