




Acro Strep A hurtigtestkassett

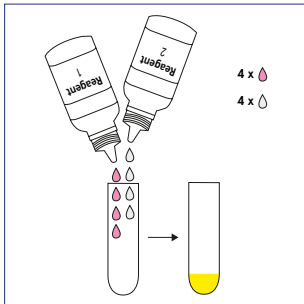


1 Tilsett 4 fulle dråper rød ekstraksjonsreagens 1 i ekstraksjonsrøret, etterfulgt av 4 fulle dråper fargeløs ekstraksjonsreagens 2. Bland løsningen ved å vende forsiktig på ekstraksjonsrøret. Fargen på løsningen blir gul.

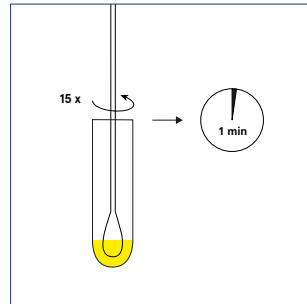

2 Tilsett prøvepinnen i ekstraksjonsrøret, Roter prøvepinnen kraftig 15 ganger, og la den stå i ekstraksjonsrøret i 1 minutt.

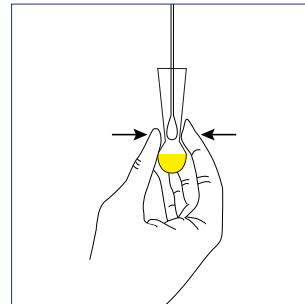


3 Trykk prøvepinnen mot siden av ekstraksjonsrøret og klem sammen bunnen av røret mens du fjerner pinnen, slik at det meste av væsken forblir i ekstraksjonsrøret. Destruer prøvepinnen.

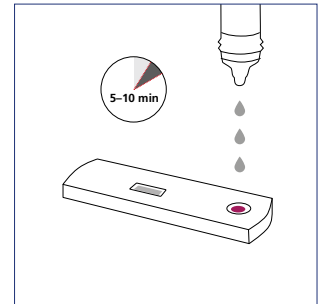


4 Plasser testkassetten på en ren og jevn overflate. Sett dråpetelleren på toppen av ekstraksjonsrøret og tilsett tre dråper av løsningen i prøvebrønnen. Start tidtakeren. Avles resultatet etter 5 minutter. Resultatet må ikke tolkes etter 10 minutter.


Tolkning av resultater

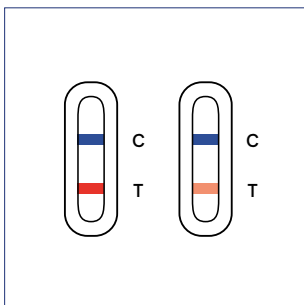

Positivt resultat
To linjer vises. En blå linje vises i kontrollinjeområdet (C) og en rød linje vises i testlinjeområdet (T).

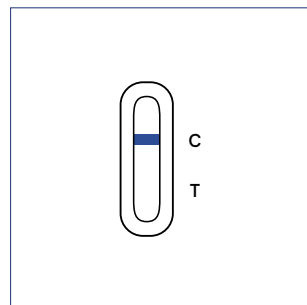

Negativt resultat
En blå linje vises i kontrollinjeområdet (C). Ingen linje vises i testlinjeområdet (T).

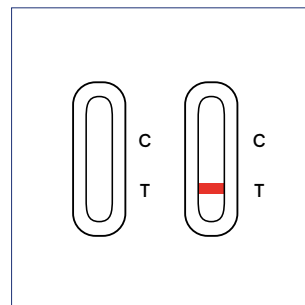

Ugyldig resultat
Kontrollinjen (C) vises ikke. Gjennomgå prosedyren og gjenta med en ny test. Hvis problemet vedvarer, må du slutte å bruke testsettet umiddelbart og kontakte Aidian.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

Acro Strep A hurtigtestkassett

Kun for profesjonell *in vitro*-diagnostisk bruk

Prøvetaking og klargjøring

- Samle halsprøven med den sterile halsprøvepipetten som følger med i settet. Transportpinner som inneholder modifisert Stuarts eller Amies-medium kan også brukes med dette produktet.
- Utfør testen umiddelbart etter prøven er samlet inn. Prøvepipetten kan oppbevares i et rent, tørt plastrør i opptil 8 timer ved romtemperatur eller 72 timer ved 2–8 °C.

Hurtigtest for påvisning av Strep A-antigen

- *Streptococcus pyogenes*, også kalt Strep A eller GAS-infeksjon utgjør en betydelig årsak til faryngitt. Streptokokk faryngitt er ofte vanskelig å skille fra andre virusinfeksjoner¹. En hurtigtest gir en raskt og besparende måte å påvise Strep A-infeksjon. Acro Strep A hurtigtestkassett er en kvalitativ lateral-flow hurtigtest for påvisning av Strep A-antigener fra halsprøver og gir et testresultat på mindre enn 10 minutter.

Enkel i bruk

- Enkel testprosedyre
- Klare fargereaksjoner gir enkel resultattolkning

Pålitelig og rask

- Pålitelig resultat på mindre enn 10 minutter
- Positiv og negativ kontroll er inkludert
- Internkontroll som sikrer korrekt testfunksjonalitet

Referanse:

1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? *Canadian Family Physician* 2018; 64, 832–840.



Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

www.aidian.no

Produkt

Acro Strep A hurtigtestkassett, 20 tests

Bestillingsnummer

154585