



Acro hCG graviditetstester

Acro hCG hurtigtest dipstick

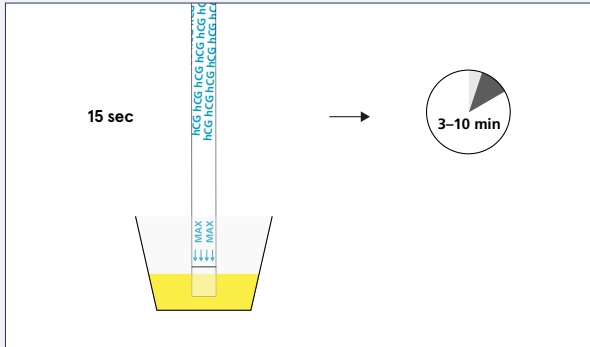



Med pilene pekende nedover, plasser dipstick i urinprøven i minst 15 sekunder. Plasser testen på en ikke-absorberende flat overflate, og start tidtakeren. Avles resultatet etter 5 minutter. Resultatet må ikke tolkes etter 10 minutter.

Acro hCG hurtigtestkassett

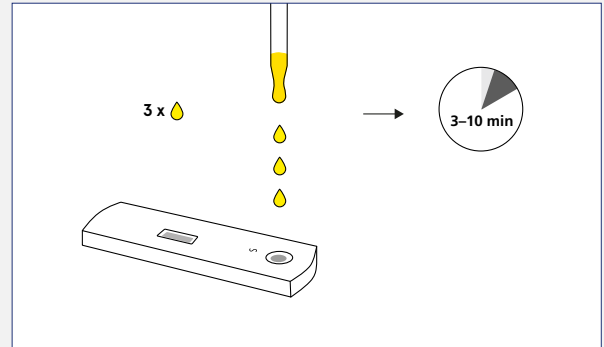



Plasser testkassetten på en ren og jevn overflate. Hold dråpetelleren rett og tilsett 3 dråper urin i prøvebrønnen. Start tidtakeren. Avles resultatet etter 5 minutter. Resultatet må ikke tolkes etter 10 minutter.

Tolkning av resultater

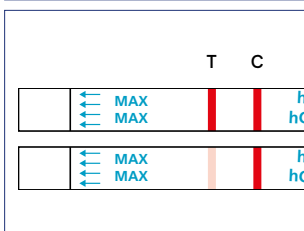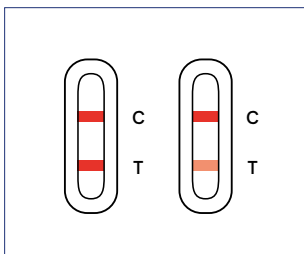



Positivt resultat

To fargede linjer vises. En linje vises i kontrollinjeområdet (C) og en linje vises i testlinjeområdet (T).

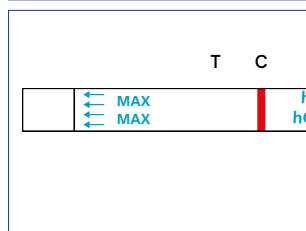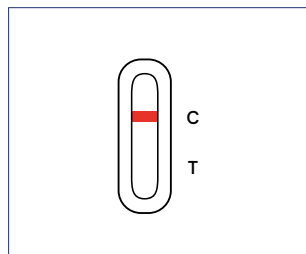

Negativt resultat

En linje vises i kontrollinjeområdet (C). Ingen linje vises i testlinjeområdet (T).

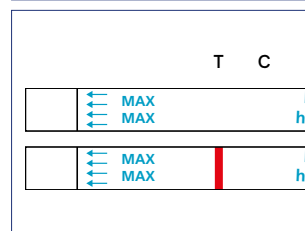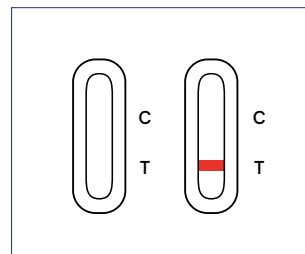

Ugyldig resultat

Kontrollinjen (C) vises ikke. Gjennomgå prosedyren og gjenta med en ny test. Hvis problemet vedvarer, må du slutte å bruke testsettet umiddelbart og kontakte Aidian.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

Acro hCG graviditetstester

Kun for profesjonell *in vitro*-diagnostisk bruk

Prøvetaking og klargjøring

- Samle urinprøven i en ren og tørr beholder.
- Urinprøver kan oppbevares i opptil 48 timer ved 2–8 °C

Hurtigtest for påvisning av hCG i urin

- Humant koriongonadotropin (hCG) produseres i morkaken kort tid etter befruktning, og konsentrasjonen øker raskt og er derfor en utmerket markør for tidlig påvisning av graviditet. Acro hCG graviditetstester benytter kromatografiske analyseprinsipper for tidlig påvisning av graviditet.

Enkel i bruk

- Enkel testprosedyre
- Klare fargereaksjoner gir enkel resultattolkning

Pålitelig og rask

- Pålitelig resultat på mindre enn 3 minutter
- Internkontroll som sikrer korrekt testfunksjonalitet



Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

www.aidian.no

Produkt	Bestillingsnummer
Acro hCG graviditet hurtigtest dipstick, 50 tests	154357
Acro hCG graviditet hurtigtestkassett, 25 tests	154584