




Acro 2019-nCoV IgG/IgM hurtigttest

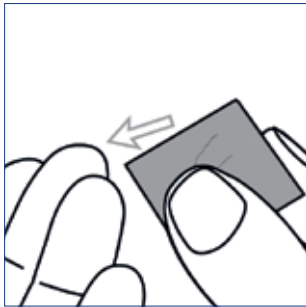


1 Prøven skal tas fra sidene av langfinger eller ringfinger. Bruk en desinfiserende våtserviett og tørk av fingeren.

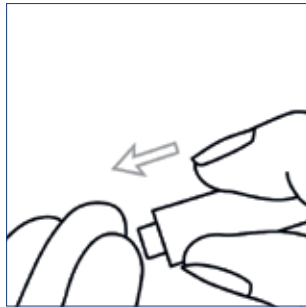


2 Sett en lansett bestemt mot fingeren og punkter huden. Press og tørk av den første bloddråpen.

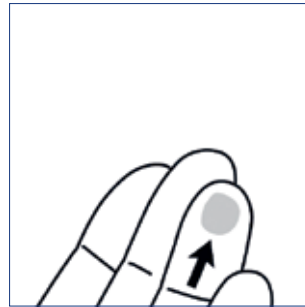


3 For å øke blodstrømmen, klem fingeren bestemt men ikke kontinuerlig.

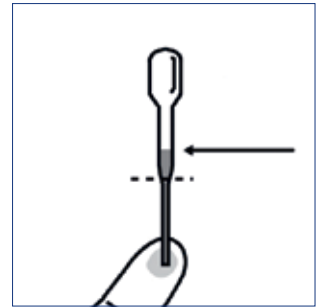


4 Hold dråpetelleren vertikalt og trekk blod opp til 1 cm over linjen.

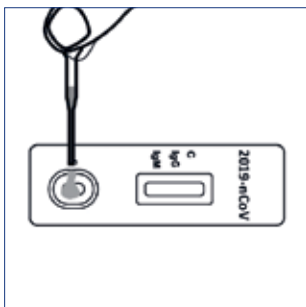

5 Ta ut testkassetten av folieposen og plasser den på en ren og jevn overflate. Tilsett 1 full dråpe blod (ca. 20 µl) i testbrønnen (S).

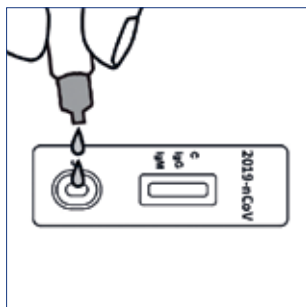


6 Tilsett 2 dråper buffer (ca. 80 µl) og start tidtakeren.

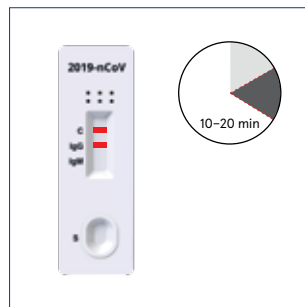

7 Avles resultatet etter 10 minutter. Resultatet må ikke tolkes etter 20 minutter.


Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

Acro 2019-nCoV IgG/IgM hurtigttest

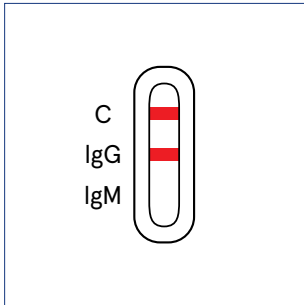


IgG Positivt resultat

To fargede linjer vises.
En farget linje vises i kontrollinjeområdet (C).
En farget linje vises i IgG-området.

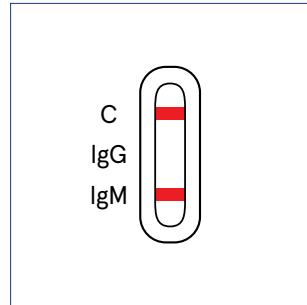


IgM Positivt resultat

To fargede linjer vises.
En farget linje vises i kontrollinjeområdet (C).
En farget linje vises i IgM-området.

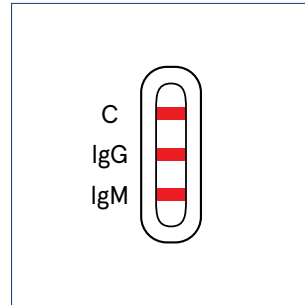


IgG og IgM Positivt resultat

Tre fargede linjer vises.
En farget linje vises i kontrollinjeområdet (C).
En farget linje vises i IgG-området. En farget linje vises i IgM-området.

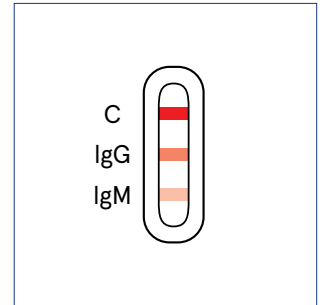


MERKNAD: Intensiteten på den fargede linjen kan variere, avhengig av konsentrasjonen av 2019-nCoV antistoffer i prøven.

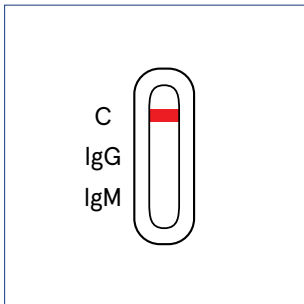

Negativt resultat

En farget linje vises i kontrollinjeområdet (C).
Ingen linje vises i IgG- eller IgM-området.

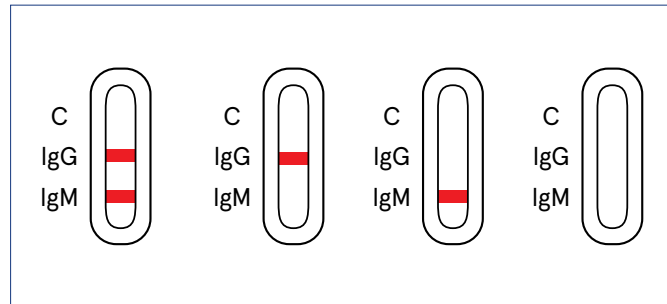

Ugyldig resultat

Kontrollinjen (C) vises ikke. Gjennomgå prosedyren og gjenta med en ny test. Hvis problemet vedvarer, må du slutte å bruke testsettet umiddelbart og kontakte Aidian.

Kun til profesjonell *in vitro*-diagnostisk bruk.

Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

www.aidian.no

Produkt	Produktkode	Bestillingsnummer
Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette, 25 tests	INCP-402	154601