

STANDARD™ M10 & Puncher Flu/RSV/SARS-CoV-2

Generell informasjon

- Oppbevar STANDARD™ M10 Flu/RSV/SARS-CoV-2 kassetten ved 2-28°C.
 - Testen er kun egnet for nasopharynkspensler
 - Bruk alltid rene hansker og følg sikkerhetsretningslinjene på arbeidstedet ved håndtering av pasientprøver.
- Sjekk pakningsvedlegget for advarsler og forholdsregler, prøvetaking, transport, oppbevaring og kvalitetskontroll.

Start STANDARD™ M10



- 1 Koble sammen** M10 konsollen og modulen, og skru dem på med on/off bryteren.
- 2 Skriv inn** brukernavn og passord, og trykk Log in knappen.
- 3 Velg** en av de tilgjengelige modulene på Home skjermen. Statusindikatoren vil blinke grønt og døren åpnes automatisk.
- 4 Skann** pasient ID/ prøve ID med den integrerte barkodeleseren på konsollen (eller bruk virtuelt tastatur). Pasient ID er et valg som kan skrues av i SETTINGS.
- 5 Skann** barkoden på kassetten med den integrerte barkodeleseren på konsollen. Etter at kassetten er skannet, starter neste trinn **automatisk**.
- 6 Se** animasjonene på skjermen for klargjøring av kassett og tilsetning av prøve. Trykk på skjermen for å fortsette.

STANDARD™ M10 Puncher / Tilsett pasientprøve til kassetten



- 1 Fjern** klemmen på kassetten.
- 2 Plasser** kassetten med sikkerhetsklemmen fjernet i holderen på puncheren.
- 3 Skyv** kassetten i pilens retning.
- 4 Grip** håndtaket på puncheren og press ned for å lage hull i kassetten.
- 5 Åpne** lokket og tilsett 300 µl prøve til prøvekammeret.
- 6 Lukk** lokket.

! Sett inn prøven innen 10 minutter etter gjennomføring av patronen. Start testen innen 30 minutter etter at prøven er satt inn i kassetten.


Kjør testen



1 Plasser kassetten i den valgte modulen og lukk døren manuelt.

2 Etter at dataene er kontrollert, trykk OK. Start kjøringen. Gjenværende tid vises på skjermen.

Korrekt håndtering av kassetten/ Oppbevaring

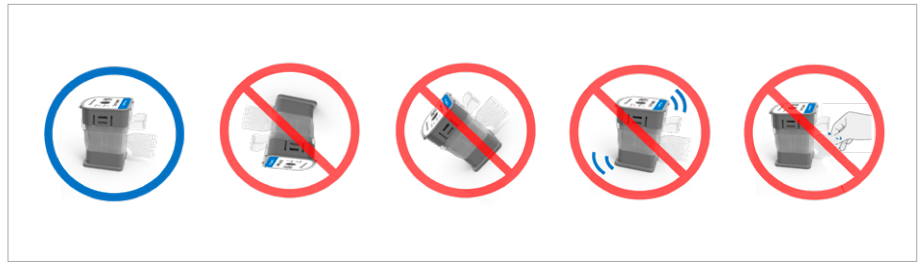

IKKE vipp, snu rundt eller rist kassetten!
IKKE berør NA amplifikasjonskammeret!

Tolkning av resultater

Results	Flu			RSV		SARS-CoV-2		
	Flu A	Flu B	IC	RSV	IC	ORF1AB	N	IC
Flu A positive	+	-	+/-	-	+	-	-	+
Flu B positive	-	+	+/-	-	+	-	-	+
RSV Positive	-	-	+	+	+/-	-	-	+
SARS-CoV-2 Positive	-	-	+	-	+	+	-	+/-
	-	-	+	-	+	-	+	+/-
	-	-	+	-	+	+	+	+/-
Negative	-	-	+	-	+	-	-	+
Invalid	-	-	-	-	-	-	-	-

- Hvis IC er negativ og resultatet for korresponderende målgen er positiv, er resultatet vurdert som gyldig. Et høyt antall kopier av spesifikt målgen kan forårsake redusert eller fraværende IC.
- Hvis et ugyldig resultat bekreftes i ett eller flere av patogenresultatene, vil disse testene bli ugyldige. Vennligst utfør en ny test.

Kontakt og bestillinger

Aidian Norge AS

info@aidian.no / +47 66785630

ordre@aidian.no

Produkt	Produkt nr.	Art.nr.
SD BIOSENSOR STANDARD M10 CONSOLE 1 PC	11M1011	155067
SD BIOSENSOR STANDARD M10 MODULE, 1 PC	11M1012	155068
SD BIOSENSOR M10 PUNCHER, 1 PC	X9001	155299
SD BIOSENSOR M10 FLU/RSV/SARS-COV-2, 10 tester	11FLU10A	155176

AIDIAN

aidian.no