

## Glemt password – QuikRead go Plus

Klikk på lenken for å få et midlertidig passord her: [QuikRead go software update over internet – Aidian](#)

Velg Region **Rest of the world**

Velg **Enter your instrument serial number** (tast inn serienummeret som du finner på undersiden av apparatet)

Fyll inn kontaktinformasjon


Velg **Request temporary admin password** (nederst på nettsiden)

*Skjermen viser et passord bestående av bokstaver og tall*

## Slik legger du inn midlertidig passord på QuikRead go Plus instrument

1. Skriv «Admin» i feltet Operator ID.
2. Trykk på **?** til høyre for feltet **Passord**
3. Du ser «Glemt passord» på instrumentdisplayet, trykk **Fortsett**
4. Tast inn det midlertidige passordet, og trykk **Tilbakestill**.
5. Du får meldingen **Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger utført**.
6. Trykk **Omstart**.

Du er nå klar til å legge inn nytt passord. Skriv inn nytt passord i feltene **Password** og **Confirm password** – standard Passord er **Qrgoplus1** (det kan være lurt å klistre en lapp på undersiden av instrumentet med dette passordet).

NB, dette må gjøres i Admin-modus for å være varige endringer – du får tilgang til Admin-menyen fra dette menyvalget :

Under **Account** – trykk **Log in**

Husk: Operatør ID **Admin**

Standard-passord er **Qrgoplus1**

Under Settings finner du oppsett av Språk, Dato, Dvalemodus og spesielle innstillinger for Hb og iFobt under Measurement.

For mer info om innstillinger for Språk, display, lyd etc, se brukermanual for QuikRead go Plus side 66.