

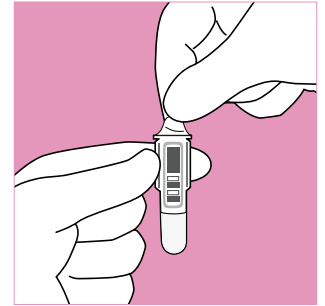
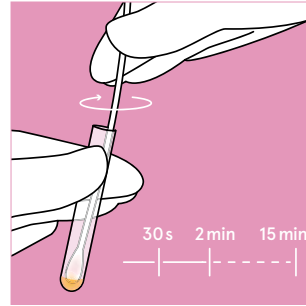
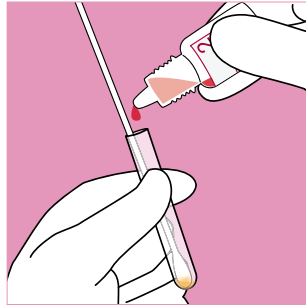
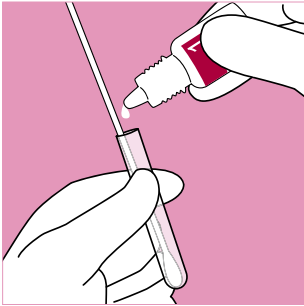
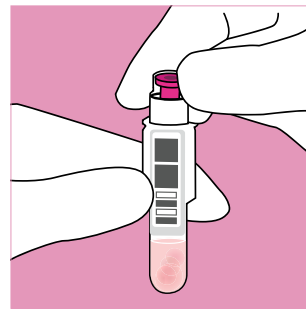


QuikRead go[®] Strep A

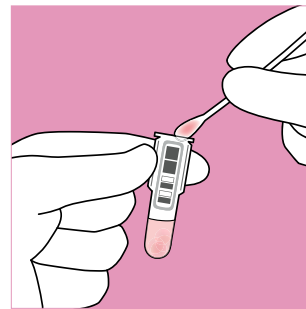



1 Ta halsprøven med prøvepinnen som følger med reagenspakken. Sett prøvepinnen i ekstraksjonsrøret, og tilsett to dråper av den klare ekstraksjonsreagensen 1. Tilsett to dråper av ekstraksjonsreagens 2. Løsningen blir gul-orange.

2 Roter prøvepinnen i løsningen i 30 sekunder. La den stå i ekstraksjonsrøret i ytterligere 1,5 minutter, men ikke lenger enn totalt 15 minutter. Ta av folien på kyvetten. Ikke berør den klare flate delen på den nedre del av kyvetten.

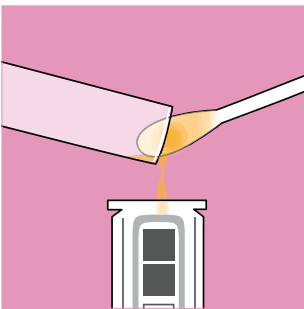

3 Vend ekstraksjonsrøret og skyv prøvepinnen mot innsiden av røret for å trekke løsningen ned i kyvetten. Hvis et stort volum av væske ligger igjen i ekstraksjonsrøret, tøm det i kyvetten. Rør kraftig til løsningen blir rød. Press prøvepinnen mot innsiden av kyvetten når du trekker den ut.

4 Lukk kyvetten tett med en Strep A reagenskork. Ikke trykk ned den rosa delen. Utfør testen innen 4 timer. Velg **Analyse** i displayet på QuikRead go-instrumentet.

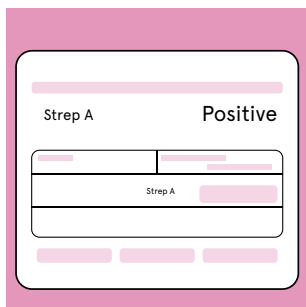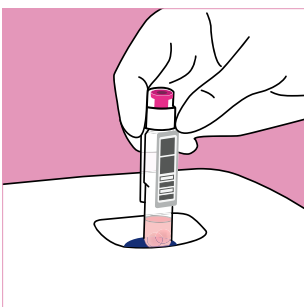

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

5 Sett kyvetten ned i målebrennen på instrumentet. Strekkoden skal vende mot deg. Når målingen er ferdig, vises resultatet i displayet og kyvetten kommer automatisk opp.

QuikRead go[®] Strep A



Kit

Uåpnet kit i 2–25°C: til **utløpsdato** på kitet.



Reagenskorker, ekstraksjonsreagens og kontroller

Uåpnet i 2–25°C: til **utløpsdato** på kitet.
Etter første åpning i 2–25°C: **12 måneder**.



Kyvetter

I uåpnet foliepose i 2–25°C: til **utløpsdato** på kitet.
Uåpnede kyvetter i åpen foliepose:
2–8°C: **6 måneder** / 18–25°C: **3 måneder**.




Åpnet kyvette


La buffer oppnå 18–25°C før testen utføres.
Testen må utføres innen **to timer** fra kyvetten ble åpnet.

Prøvetaking


Når du utfører testen, er det viktig å rotere prøvepipetten i ekstraksjonsvæsken, og i kyvetten. Husk å presse prøvepipetten mot innsiden av kyvetten når prøvepipetten tas ut.

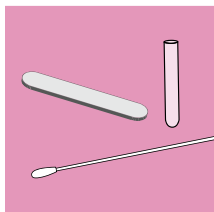


1 Legg alt du trenger for prøvetaking i nærheten av pasienten: HydraFlock prøvepinner, tungespatel og QuikRead go Strep A ekstraksjonsrør. Bruk beskyttende klær og engangshansker. Bruk kun HydraFlock prøvetakingspinne som følger med QuikRead go Strep A-reagenskit. Bruk av andre prøvepinner kan gi falske resultater, enten positive eller negative.

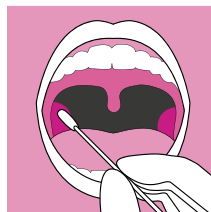

3 Samle slim/betennelsesvæske med prøvepipetten. For å sikre en god prøve, roter prøvepipetten når du tar prøven. Strep A infiserer mandlene, så husk å samle prøvemateriale fra begge sider. En prøve tatt fra andre steder i munnen kan føre til negativt resultat. Store mengder spytt eller mikrober fra andre steder i munnen kan påvirke resultatet.

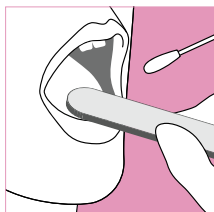

2 Ta ut en steril HydraFlock prøvepinne fra posen. Be pasienten åpne munnen. Bruk en spatel for å presse tungen ned og start prøvetakingen.

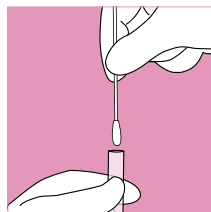

4 Ta prøvepipetten ut av munnen og sett den i et ekstraksjonsrør. Vær varsom og unngå berøring med andre deler av munnen for å unngå påvirkning av normalflora.

Det er viktig med korrekt ekstraksjon. Observer fargeforandringen. Fargen indikerer korrekt pH både under ekstraksjon og nøytralisering. Følg tidsangivelsen nøye.

Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

E-post for bestillinger: ordre@aidian.no

www.aidian.no / www.quikread.com

Produkt	Art.nr.
QuikRead go Strep A	135883
QuikRead go Instrument	135867