




Acro Strep A Dipstick

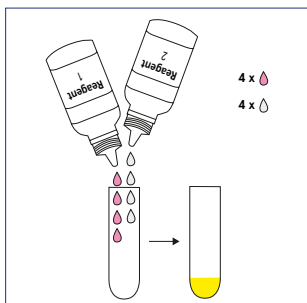


1 Tillsätt 4 droppar av reagens 1 (röd färg) i extraktionsröret. Tillsätt 4 droppar av reagens 2 (färglös) i extraktionsröret. Blanda lösningen genom att försiktigt snurra röret. Lösningen får en gul färg.

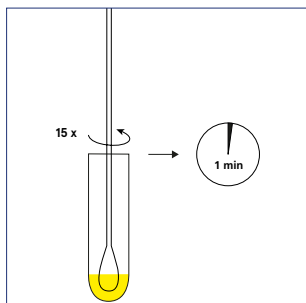

2 Ta halsprovet med den medföljande provpinnen och sätt provpinnen i extraktionsröret med den gula lösningen. Tillsätt omedelbart pinnen i extraktionsröret, rör om pinnen kraftigt 15 gånger. Låt pinnen stå i extraktionsröret i 1 minut.

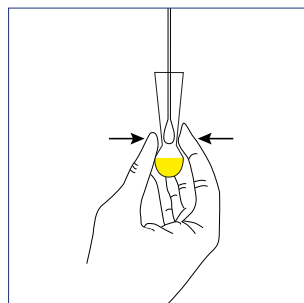


3 Kläm ihop röret och vrid upp provpinnen, så att vätskan pressas ur provpinnen. Kassera provpinnen.

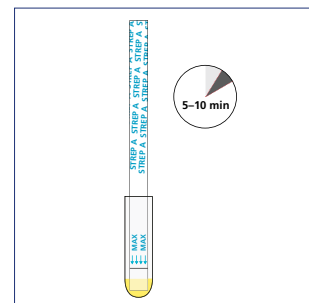


4 Ställ teststickan med pilarna nedåt i röret och starta timern. Läs av resultatet efter 5 minuter. Inte senare än 10 minuter.

Avläsning av resultat

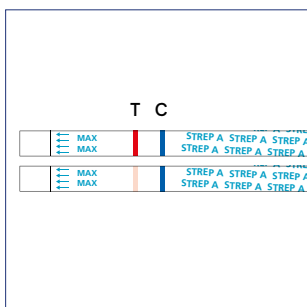


Positivt resultat

Två linjer framträder. En blå linje framträder i kontrollregionen (C) och en röd linje framträder i testregionen (T).

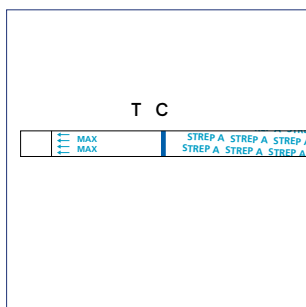

Negativt resultat

En blå linje framträder i kontrollregionen (C). Ingen linje framträder i testregionen (T).

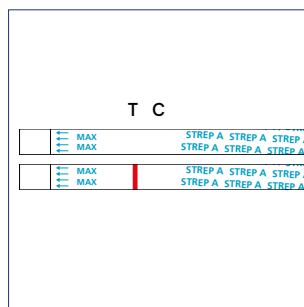

Ogiltigt resultat

Ingen färgad linje framträder i kontrollregionen (C). Upprepa provtagning och analys med en ny teststicka. Om problemet kvarstår, kontakta support på Aidian.

För utförlig metodbeskrivning, se inlagan i förpackningen.

Acro Strep A Dipstick

Endast för professionell *in vitro* diagnostic användning

Provtagning och provhantering

- Provta halsen med den sterila provtagningspinnen som medföljer kitet. Provtagningspinnar som innehåller modifierat Stuarts eller Amiesmedium kan också användas med den här produkten. Ta prov från tonsillerna och andra inflammerade områden. Undvik att vidröra tungan, kinderna och tänderna med provtagningspinnen.
- Testet bör utföras omgående efter provtagningen. Annars ska provpinnen förvaras i tomt sterilt och välförslutet rent plaströr upp till 8 timmar vid rumstemperatur eller 72 timmar vid 2–8 °C.

Snabbtest dipstick för detektion av Strep A antigen

- *Streptococcus pyogenes*, även kallad Strep A eller GAS som signifikant orsakar av faryngitis. Streptokock faryngit är ofta svår att skilja på från en virusinfektion och med hjälp av snabbtestet erbjuds en snabb och ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka Strep A infektioner mer exakt. Acro Strep A Dipstick är en kvalitativ, lateral flödesimmunoanalys för detektering av Strep A antigen av ett halsprov med en svabpinne. Resultatet kan avläsas på mindre än 10 minuter.

Lätt att använda

- Enkel testprocedur
- Tydliga färgreaktioner för enkel resultattolkning

Pålitlig och snabb

- Pålitliga resultat på mindre än 10 minuter
- Positiva och negativa kontroller är inkluderande
- Interna kontroller säkerställer korrekt testfunktion

Reference:

1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? Canadian Family Physician 2018; 64, 832–840.



Kontaktinformation

Aidian Sweden AB

info@aidian.se

Tel. 08-623 04 00

För beställning: order@aidian.se

www.aidian.se

Produkt

Acro Strep A Dipstick, 50 tester

Art.nr

154582