




Acro Strep A Kasset

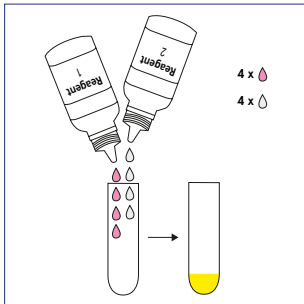


1 Tillsätt 4 droppar av reagens 1 (röd färg) i extraktionsröret. Tillsätt 4 droppar av reagens 2 (färglös) i extraktionsröret. Blanda lösningen genom att försiktigt snurra röret. Lösningen får en gul färg.

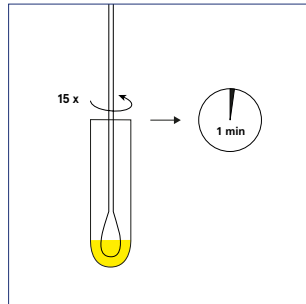

2 Ta halsprovet med den medföljande provpinnen och sätt provpinnen i extraktionsröret med den gula lösningen. Rör om kraftigt med provpinnen genom att rotera den 15 gånger i extraktionsröret under 1 minut.

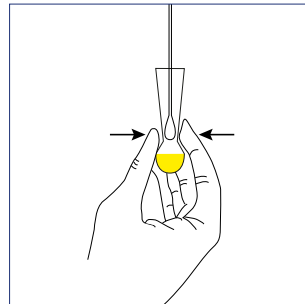


3 Kläm ihop röret och vrid upp provpinnen, så att vätskan pressas ur provpinnen. Kassera provpinnen.

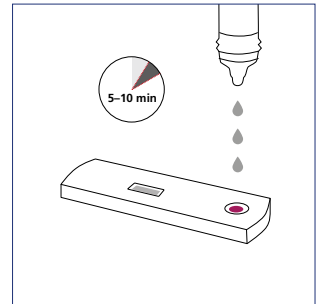


4 Ta fram testkassetten och placera den på ett plant underlag. Sätt på dropphatten på extraktionsröret och tillsätt 3 droppar av lösningen från extraktionsröret i provbrunnen. Läs av resultatet efter 5 minuter men inte senare än 10 minuter.

Tolkning av resultat

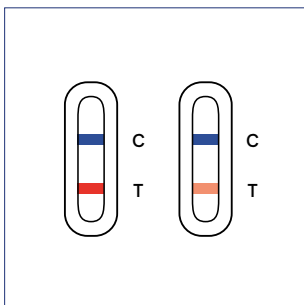


Positivt resultat

Två linjer framträder. En blå linje framträder i kontrollregionen (C) och en röd linje framträder i testregionen (T).

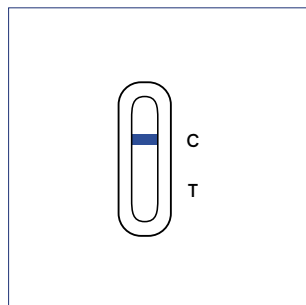

Negativa resultat

En blå linje framträder i kontrollregionen (C). Ingen linje framträder i testregionen (T).

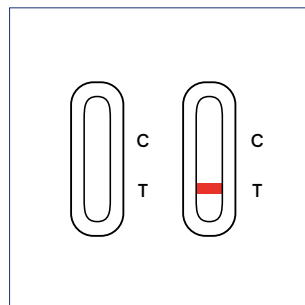

Ogiltigt resultat

Ingen färgad linje framträder i kontrollregionen (C). Upprepa provtagning och analys med ett nytt testkit. Om problemet kvarstår, kontakta support på Aidian.

För utförlig metodbeskrivning, se inlagan i förpackningen.

Acro Strep A Kassett

Endast för professionell *in vitro* diagnostic användning

Provtagning och provhantering

- Provta halsen med den sterila provtagningspinnen som medföljer kitet. Provtagningspinnar som innehåller modifierat Stuarts eller Amiesmedium kan också användas med den här produkten. Ta prov från tonsillerna och andra inflammerade områden. Undvik att vidröra tungan, kinderna och tänderna med provtagningspinnen.
- Testet bör utföras omgående efter provtagningen. Annars ska provpinnen förvaras i tomt sterilt och välförslutet rent plaströr upp till 8 timmar vid rumstemperatur eller 72 timmar vid 2–8 °C.

Snabbtest kassett för detektion av Strep A antigen

- *Streptococcus pyogenes*, även kallad Strep A eller GAS som signifikant orsakar av faryngitis. Streptokock faryngit är ofta svår att skilja från en virusinfektion och med hjälp av snabbtestet erbjuds en snabb och ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka Strep A infektioner mer exakt. Acro Strep A kassett är en kvalitativ, lateral flödesimmunoanalys för detektering av Strep A antigen av ett halsprov med en svabpinne. Resultatet kan avläsas på mindre än 10 minuter.

Lätt att använda

- Enkel testprocedur
- Tydliga färgreaktioner för enkel resultatolkning

Pålitlig och snabb

- Pålitliga resultat på mindre än 10 minuter
- Positiva och negativa kontroller är inkluderande
- Interna kontroller säkerställer korrekt testfunktion

Reference:

1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? *Canadian Family Physician* 2018; 64, 832-840.



Kontaktinformation

Aidian Sweden AB

info@aidian.se

Tel. 08-623 04 00

www.aidian.se

Produkt	Art.nr
Acro Strep A Kassett, 20 tester	154585