



Acro hCG Gravitetstest

Acro hCG snabbtest Dipstick

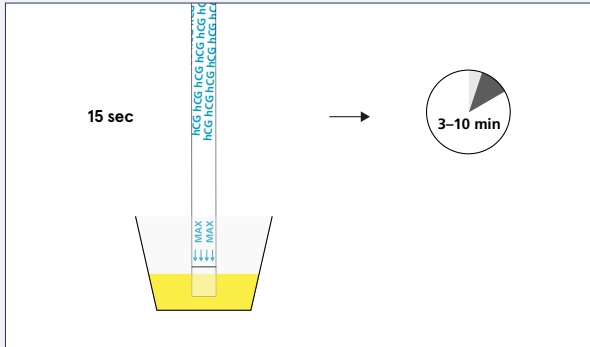



Ta ut stickan ur påsen. För i stickan ner i urinen med pilarna pekandes neråt. Täck ej stickan längre än maxlinjen. Ta ut stickan ur urinen efter 15 sekunder. Placera stickan på en plan och ren yta och starta timern. Avläs resultatet efter 3 minuter. Läs inte av resultatet efter 10 minuter.

Acro hCG snabbtest Kasset

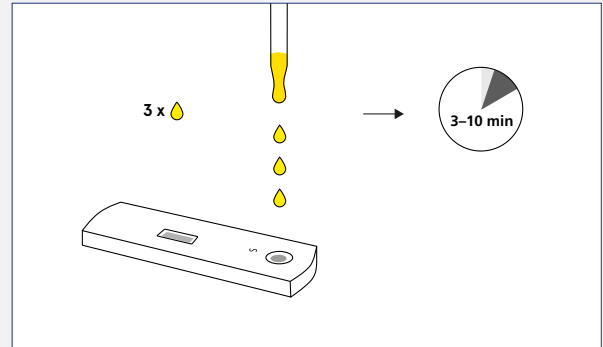



Placera testkassetten på en ren och plan yta. Håll pipetten vertikalt och tillsätt 3 droppar urin i provbrunnen. Starta timern. Avläs resultatet efter 3 minuter. Läs inte av resultatet efter 10 minuter.

Tolkning av resultat

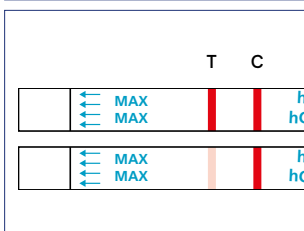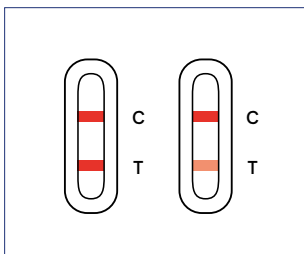



Positiva resultat

Två färgade linjer uppstår. En linje uppstår i kontrollregionen (C) och en linje uppträder i testregionen (T).

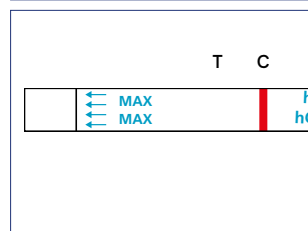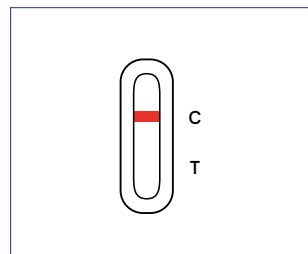

Negativt resultat

En färgad linje uppstår på kontrollregionen (C). Ingen linje uppstår på testregionen (T).

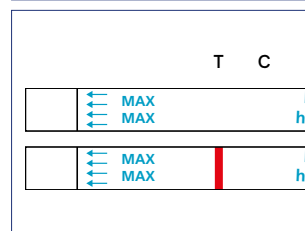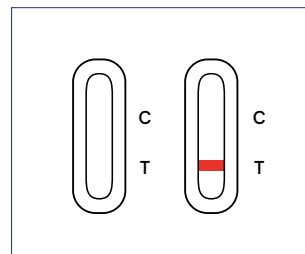

Ogiltigt resultat

Kontrolllinjen (C) uppträder inte. Upprepa proceduren och ta ett nytt test. Om problemet kvarstår avbryt användandet av testkitet och kontakta support på Aidian.

För utförlig metodbeskrivning, se inlagen i förpackningen.

Ytterligare information

Acro hCG Graviditetstest

Endast för professionell *in vitro* diagnostic användning

Provtagning och provhantering

- Samla upp urin i en torr och ren behållare
- Urin kan förvaras i kyl i 2-8 grader upptill 48 timmar innan analysering

Snabbtest för tidig detektion av hCG i urin

- Humant koriongonadotropin (hCG) är ett hormon som produceras av moderkakan (placentan) som bildas när en befruktning och efterföljande implantation i livmodern har skett. ACRO hCG graviditetstest är ett immunokromatografisk snabbtest för att i tidigt skede upptäcka graviditet.

Lätt att använda

- Enkel testprocedur
- Tydliga färgreaktioner för enkel resultattolkning

Pålitlig och snabb

- Resultat inom 3 minuter
- Interna kontroller säkerställer korrekt testfunktion



Kontaktinformation

Aidian Sweden AB

info@aidian.se

Tel. 08-623 04 00

För beställning: order@aidian.se

www.aidian.se

| Produkt | Art.nr |
|---|--------|
| Acro hCG Graviditetstest urin Dipstick, 50 tester | 154357 |
| Acro hCG Graviditetstest urin Kasset, 25 tester | 154584 |