




Uputstva za testiranje krvi u uzorcima stolice

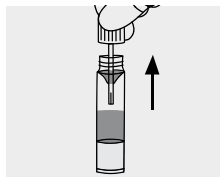



1 Odvrnite čep sa štapića za uzorkovanje. Stavite uzorak na komad toaletnog papira ili u čist jednokratni spremnik.



2 Uzmite uzorak iz različitih dijelova stolice. Umetnite štapić u stolicu i okrećite ga tako da se udubine na kraju štapića ispunje stolicom. Nemojte stavljati štapić stolicu s vidljivim tragovima krvi. Obrišite višak stolice.

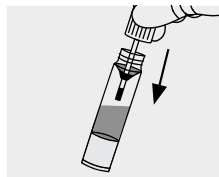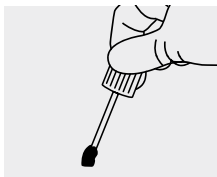

3 Vratite štapić s čepom u epruvetu te čvrsto zatvorite.

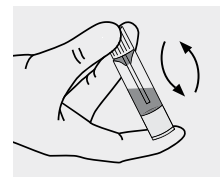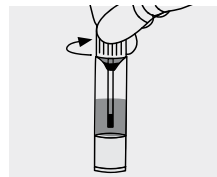

4 Protresite epruvetu kako bi se uzorak stolice rastvorio.

Nakon uzorkovanja

- Epruvetu možete držati u frižideru (preporučeno) ili na sobnoj temperaturi.
- Pošaljite ili odnesite epruvetu u laboratoriju na analizu čim to bude moguće.
- Uzorak se mora analizirati unutar jedne sedmice od trenutka uzimanja

Pažnja

- Žene ne bi trebale davati svoje uzorke tokom menstrualnog ciklusa.
- Ako se od vas traži da date više od jednog uzorka stolice, morate ih uzimati na različite dane.
- Nema zahtjeva za dijetalnu ishranu.
- Obratite se svom ljekaru ako imate pitanja u vezi s testiranjem i uzimanjem uzoraka.