




Anleitung zum Nachweis von Blut in Stuhlproben

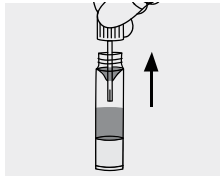



1 Den Verschluss mit dem Stäbchen für die Probenahme abschrauben. Stuhl auf etwas Toilettenpapier oder in einem sauberen Einwegbehälter auffangen.



2 Die Probe aus verschiedenen Teilen des Stuhls entnehmen. Das Stäbchen in den Stuhl schieben und drehen, sodass sich die Kerben am Ende des Stäbchens mit Stuhl füllen. Das Stäbchen nicht in Stuhl schieben, der sichtbar Blut enthält. Überschüssigen Stuhl abwischen.

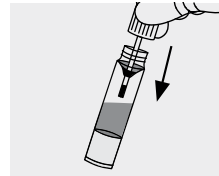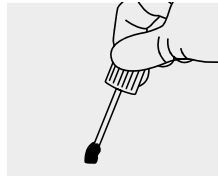

3 Den Verschluss mit dem Stäbchen wieder in das Rohr schieben und fest verschließen.

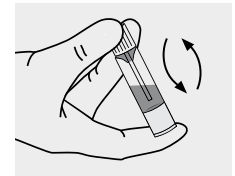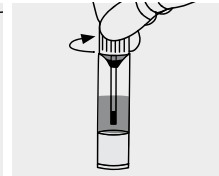

4 Das Rohr schütteln, bis sich die Stuhlprobe auflöst.

Nach der Probenentnahme

- Das Rohr kann im Kühlschrank (empfohlen) oder bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
- Das Rohr schnellstmöglich zur Analyse an das Labor senden oder persönlich übergeben.
- Die Probe muss innerhalb einer Woche ab dem Zeitpunkt der Entnahme analysiert werden.

Achtung

- Frauen sollten während ihrer Menstruation keine Proben entnehmen.
- Falls Sie mehrere Stuhlproben entnehmen sollen, müssen Sie dies an unterschiedlichen Tagen tun.
- Keine Diätvorschriften.
- Falls Sie Fragen zum Test oder der Probenentnahme haben, wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt.