




## Instrucciones para analizar la sangre en muestras de heces

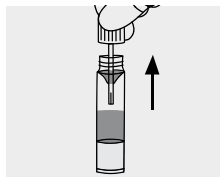



**1** Desensrosque el tapón con el aplicador de muestras. Recoja la muestra de heces en papel higiénico o en un recipiente limpio de un solo uso.



**2** Tome muestras de varias partes de las heces. Introduzca el aplicador en las heces y gire hasta que las ranuras que hay al final del aplicador se llenen de heces. No introduzca el aplicador en heces si se observa sangre. Limpie cualquier exceso.

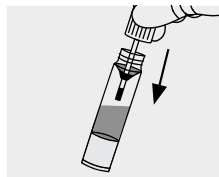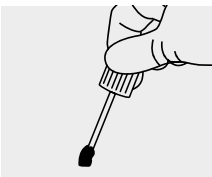

**3** Coloque el tapón con el aplicador en el tubo y ciérrelo bien.

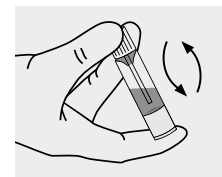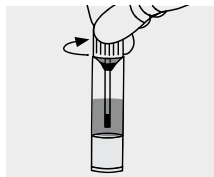

**4** Agite el tubo hasta que se disuelva la muestra de heces.

### Después de la toma de muestras

- El tubo se puede almacenar en la nevera (se recomienda) o a temperatura ambiente.
- Envíe o entregue el tubo lo antes posible en el laboratorio para su análisis.
- La muestra se debe analizar en el plazo de una semana desde su obtención.

### Atención

- Las mujeres no deben tomar estas muestras durante el periodo de menstruación.
- Si se le pide que tome más de una muestra de heces, se debe realizar días diferentes.
- No hay requisitos de alimentación.
- Póngase en contacto con el profesional sanitario si tiene alguna duda sobre el análisis y la muestra.