




Instructions d'analyse du sang présent dans les échantillons de selles

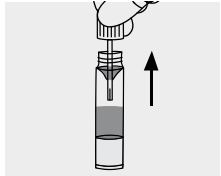



1 Dévisser le bouchon à l'aide de la baguette de prélèvement. Prélever les selles sur un morceau de papier toilette ou dans un récipient propre, à usage unique.



2 Prélever l'échantillon dans diverses parties des selles. Introduire la baguette dans les selles et la faire tourner de manière à remplir de selles les rainures présentes à l'extrémité de la baguette. Ne pas introduire la baguette dans des selles présentant des traces visibles de sang. Essuyer l'excès de selles.

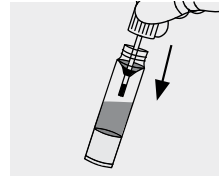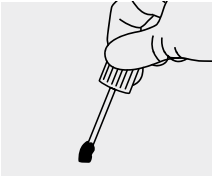

3 Replacer le bouchon sur le tube à l'aide la baguette et fermer soigneusement.

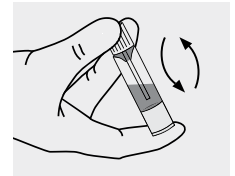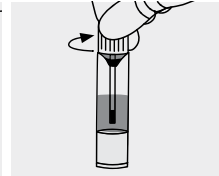

4 Secouer le tube jusqu'à dissolution de l'échantillon de selles.

Après le prélèvement

- Le tube peut être conservé au réfrigérateur (recommandé) ou à température ambiante.
- Envoyer ou remettre le tube au laboratoire d'analyse dès que possible.
- L'échantillon doit être analysé dans la semaine suivant le prélèvement.

Attention

- Les femmes ne doivent pas effectuer ces prélèvements au moment de leur cycle menstruel.
- S'il a été prescrit de prélever plusieurs échantillons de selles, ces échantillons doivent être prélevés sur plusieurs jours différents.
- Pas de régime particulier.
- Contacter le prestataire de santé en cas de question sur le test et le prélèvement.