




# Инструкции по исследованию кала на скрытую кровь

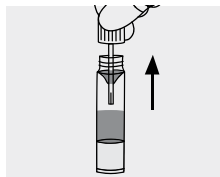



**1** Отверните крышку с заборной палочкой. Поместите кал на лист туалетной бумаги или в чистый одноразовый контейнер.



**2** Возьмите материал из разных частей кала. Погрузите заборную палочку в кал и вращайте ее так, чтобы бороздки на конце палочки наполнились калом. Не погружайте палочку в кал с видимой кровью. Удалите излишний кал.

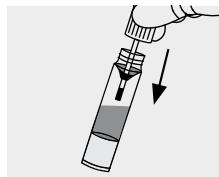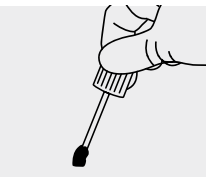

**3** Поместите крышку с палочкой в пробирку и плотно закройте.

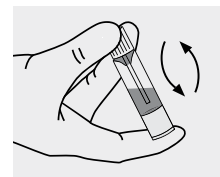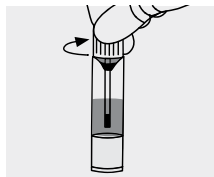

**4** Потрясите пробирку, пока проба кала не растворится.

## После забора

- Пробирка может храниться в холодильнике (рекомендуется) или при комнатной температуре.
- Как можно скорее отправьте или сдайте пробирку в лабораторию для анализа.
- Анализ материала должен быть произведен в течение одной недели после забора.

## Внимание!

- Забор не должен производиться у женщин в менструальный период.
- Если вам поручили взять несколько заборов кала, они должны быть взяты в разные дни.
- Потребность в диете отсутствует.
- При наличии вопросов об исследовании и о заборе материала обратитесь к своему лечащему врачу.