




Feçes numunelerinde kan testi talimatları





1 Numune çubuğu ile kapağın vidasını sökün. Feçesi bir parça tuvalet kağıdına veya temiz, tek kullanımlık bir kaba alın.

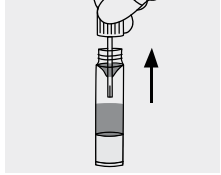

2 Numuneyi, feçesin çeşitli bölümlerinden alın. Çubuğu feçese ittirin ve döndürün, böylelikle çubuğun ucundaki kanallar feçesle dolar. Çubuğu, görünür kan olan feçese ittirmeyin. Aşırı feçesleri silin.

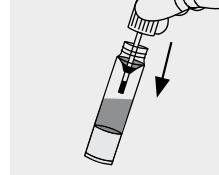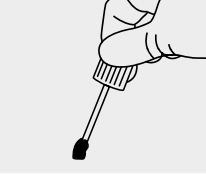

3 Kapağı tekrar çubukla tüpe yerleştirin ve sıkıca kapatın.

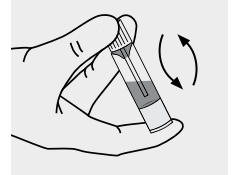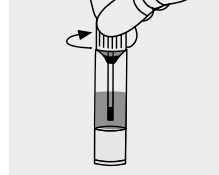

4 Feçes numunesi çözünene kadar tüpü çalkalayın.

Numune alımından sonra

- Tüp bir buzdolabında (önerilen) veya oda sıcaklığında saklanabilir.
- Tüpü, analiz için mümkün olan en kısa sürede laboratuvara gönderin veya götürün.
- Numunenin, alınma zamanından itibaren bir hafta içinde analiz edilmesi gerekir.

Dikkat

- Kadınların bu numuneleri adet dönemlerinde almamaları gerekir.
- Birden fazla feçes numunesi almanız söylendiyse bu numunelerin farklı günlerde alınması gerekir.
- Hiçbir diyet gerekliliği yoktur.
- Test ve numune alma ile ilişkili herhangi bir sorunuz olursa lütfen sağlık hizmeti tedarikçiniz ile iletişime geçin.