




# دستور العمل برای آزمایش خون در نمونه‌های مدفوع

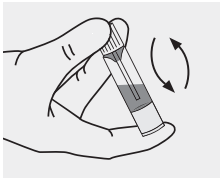


4. تیوب را تکان دهید تا نمونه مدفوع کاملاً حل شود.

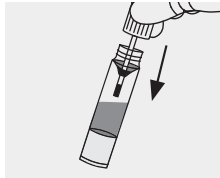


3. درپوش و میله را دوباره به داخل تیوب برگردانید و محکم ببندید.

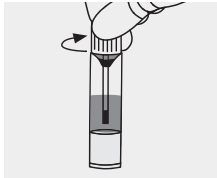

2. از قسمت‌های مختلف مدفوع نمونه‌برداری کنید. میله را به داخل مدفوع فرو کنید و بچرخانید تا شیارهای انتهایی میله با مدفوع پر شود. مدفوع اضافی را پاک کنید.

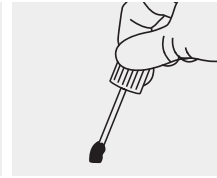

**میله را در مدفوعی که دارای خون قابل مشاهده است فرو نبرید.**

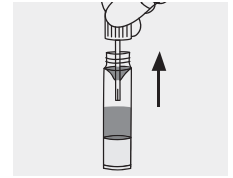

1. درپوش دارای میله نمونه‌برداری را بپیچید و باز کنید. مدفوع را روی یک قطعه دستمال توالت یا داخل یک محفظه تمیز یکبار مصرف بریزید.

## توجه

« خانم‌ها نباید این نمونه‌برداری را در زمان پریود خود انجام دهند. »  
 « اگر به شما گفته شد که بیش از یک نمونه مدفوع بگیرید، نمونه‌ها باید در روزهای مختلف گرفته شود. »  
 « لازم نیست رژیم غذایی خاصی بگیرید. »  
 « اگر سؤالی درباره آزمایش و نمونه‌برداری دارید با مسئولان آزمایشگاه تماس بگیرید. »

## پس از نمونه برداری

« لوله محتوی نمونه را می‌توان در یخچال (نگهداری در یخچال توصیه می‌شود) یا در دمای اتاق نگهداری کرد. »  
 « در سریع‌ترین زمان ممکن لوله محتوی نمونه را برای تجزیه و تحلیل، شخصا به آزمایشگاه تحویل دهید و یا بفرستید. »  
 « نمونه باید حد اکثر ظرف مدت یک هفته از زمان نمونه برداری آنالیز شود. »