




# Provtagningsanvisning för test av blod i avföring

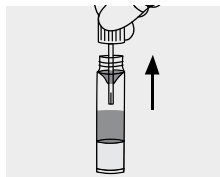



**1** Skruva av korken med provtagningspinnen. Lämna avföring på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.



**2** Stick ner och rotera pinnen på olika ställen i avföringen så att fårorna i änden av pinnen fylls. **Stick ej ner pinnen där blod är synligt.** Torka bort överskott av avföring.

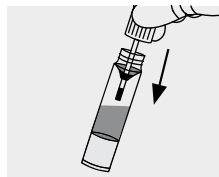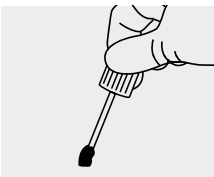

**3** Sätt tillbaka korken med pinnen i röret och skruva fast den.

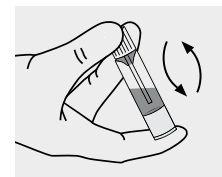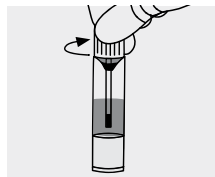

**4** Skaka därefter röret så att avföringen löses upp.

## Efter provtagning

- Röret kan förvaras i kylskåp (rekommenderas) eller i rumstemperatur
- Provet ska analyseras inom en vecka efter provtagningen
- Skicka/lämna röret snarast till laboratoriet för analys

**OBS! Provet lämnas till din vårdinrättning**

## Observera

- Kvinnor i fertil ålder bör ej ta dessa prover under sin menstruation
- Om flera avföringsprov har ordinerats ska dessa tas **på olika dagar**
- Inga dietföreskrifter
- Kontakta din vårdgivare vid frågor rörande test och provtagning