



# Nova StatStrip Xpress2

## Glukos- och $\beta$ -ketonmätare

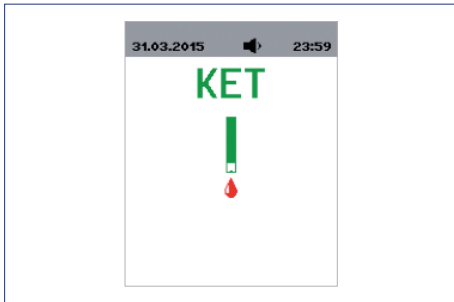


**1** För in en teststicka, glukos eller keton, i mätaren. Kontrollera att alla skärmsegment visas. Avbryt det diagnostiska testet om skärmen inte visas fullständigt. Om du ska utföra en patientanalys, fortsätt till steg 2.

QC: Om du ska utföra en kvalitetskontroll, använd **vänster** ◀ eller **höger** ▶ knapp för att finna önskad nivå QC1, QC2 eller QC3.

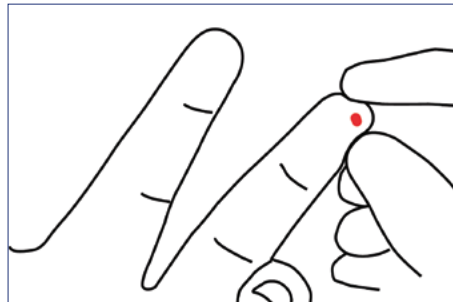


**2** Förbered punkteringsstället. Rengör patientens finger med vatten eller sprit och torka sedan ordentligt. Håll handen nedåt och massera med tummen mot fingertoppen för att stimulera blodflödet. Använd en lansett för att sticka hål i fingret. Torka bort den första blodropen.

QC: Om du ska utföra en kvalitetskontroll torka bort den första droppen med kontrolllösning.

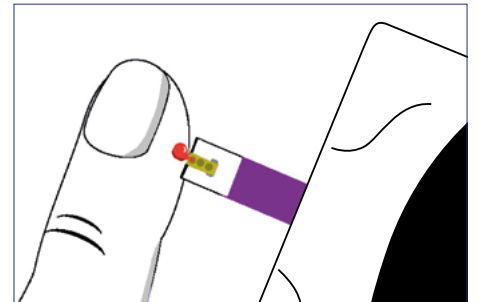

**3** Tillsätt provet till teststickan. När blodropen visas, för änden av testremsan mot blodropen eller kontrollvätskan tills teststickan fyllts och mätaren piper. Blodropen på skärmen blinkar från och till flera gånger tills det finns tillräckligt med blod på teststickan.

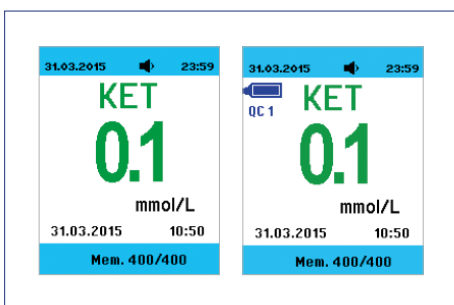

**4** Glukosresultatet visas på skärmen efter **6 sekunder**. Ketonresultatet visas på skärmen efter **10 sekunder**. Använd utmatningsknappen på baksidan av mätaren för att mata ut den använda teststickan.

Vänligen läs  
bruksanvisningen  
innan du utför testet.

## Nova StatStrip Xpress2 Glukos- och $\beta$ -Ketonmätare



- Kan användas i alla professionella vårdmiljöer.
- Mätaren drivs av 2 AAA- batterier och varnar vid låg batterinivå.
- Ställ in datum, tid och inställningar genom att trycka på den runda MODE-knappen i 3 sekunder. Tryck på **vänster** ◀ och **höger** ▶ pilknappar för att ändra inställningarna och MODE-knappen för att acceptera.

- Rengör med 70 % isopropylalkohol, 10 % utspädning av natriumhypoklorit eller annan rengöringsvätska.
- Spraya inte vätska direkt på mätaren och sänk inte ner den i vätska.

## Nova StatStrip Glukos- och $\beta$ - Keton kontrolllösning

- Förvara kontrollflaskan väl försluten i rumstemperatur, under 30°C.
- Förvara ej i kyl eller frys.
- Den öppnade kontrollflaskans hållbarhet är upp till 3 månader eller öppnad fram till utgångsdatum.

## Nova StatStrip Glukos- och $\beta$ - Ketonstickor

- Förvara teststickor i 15°C–30°C.
- Använd teststickorna innan **utgångsdatum** eller inom **180 dagar** för glukosstickor, efter att burken öppnats och inom **90 dagar** för  $\beta$ -ketonstickor efter att burken öppnats.
- Teststickan måste fyllas på en gång.
- Fyll inte på med mer prov.



## Acceptabelt provmaterial

- **Glukos:** Kapillärt helblod, venöst helblod, arteriellt helblod, hälstick och arteriella helblodsprover från nyfödda.
- **$\beta$ -keton:** Kapillärt helblod (fingerstick), venöst helblod.
- **Lämpliga antikoagulanter:** natrium-, litium- och ammoniumheparin

## Felkoder

### E-0 Programvarufel:

Gör om provet. Om du får samma fel igen, ta bort och sätt tillbaka batteriet. Om felet kvarstår, kontakta Aidian för teknisk support.

### E-1 Hårdvarusystemfel:

Gör om provet. Om felet kvarstår, kontakta Aidian för teknisk support.

### E-2 Operativtemperaturfel:

Flytta mätaren till ett område där temperaturen är acceptabel (5°–40°C), låt mätaren anpassa sig till temperaturen. Upprepa testet

### E-3 Teststickan är förbrukad:

Teststickan är defekt eller har redan använts. Upprepa provet med en ny teststicka. Om felet kvarstår, använd en teststicka från en annan förpackning eller välj en alternativ metod.

### E-4 För lite provmaterial:

Ett otillräckligt prov (kontroll eller blod) i teststickan. Upprepa testet med en ny teststicka. Om felet kvarstår, utför testet med en teststicka från en annan förpackning eller välj en alternativ metod.

### E-5 Känner inte igen teststickan:

Upprepa testet med en ny teststicka. Om felet kvarstår, utför testet med en teststicka från en annan förpackning eller välj en alternativ metod

### E-8 Defekt teststicka:

Teststickan är defekt. Upprepa testet med en ny teststicka. Om felet kvarstår, utför testet med en teststicka från en annan förpackning eller välj en alternativ metod

### E-9 Fel på provet:

Ett fel upptäcktes med provet. Upprepa testet med en ny teststicka. Om felet kvarstår, utför testet med en teststicka från en annan förpackning eller välj en alternativ metod.

## Kontaktinformation

Aidian Sweden AB

info@aidian.se / 08-623 04 00

För beställning: order@aidian.se

aidian.se

Produkt	Tillv.nr	Art.nr
Nova Statstrip Xpress-2 Glu Ket Meter	56506	154785
Nova Statstrip Glukos, teststickor, 100T	42214	154727
Nova Statstrip Keton, teststickor, 50 T	46951	154726
Nova Statstrip Glu Ket kontrollnivå 1	46947	154725
Nova Statstrip-Glu Ket kontrollnivå 2	46948	154766
Nova Statstrip Glu Ket kontrollnivå 3	46949	154723