

Návod na použitie

Ovládacie prvky / časti

- Hlavný vypínač s kontrolkou
- Regulátor teploty

Polohovanie

Inkubátor Cultura môže byť použitý vo zvislej alebo vodorovnej polohe (vypínačom nahor).

Legenda k obrázkom (viď. zadná strana obalu)

- Inkubátor môže byť použitý vo zvislej alebo vodorovnej polohe.
- Hlavný vypínač s kontrolkou.
- Regulátor teploty.

Inštalácia

- Inkubátor vyberte z obalu a pripojte k elektrickej sieti.
- Stojanček umiestnite do požadovanej polohy a do neho postavte teplomer.
- Inkubátor zapnite a skontrolujte, či svieti kontrolka.
- Inkubátor by mal po 30 minútach dosiahnuť teplotu približne 35°C.

Teplota

Pracovnú teplotu možno meniť otáčaním regulačného závitú pomocou skrutkovača. Otočením doľava znižujete a otočením doprava zvyšujete teplotu (15 ° otáčky je približne 1°C).

Rady

Uistite sa, že dvere sú starostlivo zatvorené a neotvárajte ich na viac ako 90°. Dvere chráňte pred priamym slnečným žiarením. Plastové skúmavky nedávajte priamo na dno inkubátora, ale vždy používajte priložený stojan.

Čistenie

Inkubátor Cultura je možné čistiť bežnými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami. **Dôležité:** Na čistenie by nikdy nemali byť použité kvapaliny obsahujúce metanol, acetón a pod.

Porucha inkubátora

V prípade, že prístroj prestal fungovať, skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený. Inkubátor Cultura je vybavený poistkou proti náhodnému prehriatiu. Poistka nemôže byť resetovaná ani vymenená, kontaktuje, prosím, dodávateľa inkubátora.

Údržba / pravidelné kontroly

Inkubátor CULTURA nevyžaduje žiadne zvláštne kontroly. Odporúčajú sa pravidelné vizuálne kontroly. Predovšetkým by mal byť kontrolovaný napájací kábel, jeho prípadné poškodenie a jeho umiestnenie. V prípade poškodenia odpojte ihneď inkubátor zo siete a ďalej ho už

nepoužívajte. Prevádzková teplota inkubátora by mala byť pravidelne kontrolovaná, a ak je to potrebné aj prenasťavená.

Technická

špecifikácia

Registrované meno: Cultura

Katalógové číslo: 68306
(230V = 70700)

Teplotné rozmedzie:
25-45°C

Teplotná presnosť: +/- 1°C

Napätie: 230 V = 30 W

Frekvencia: 50 Hz/60 Hz

Bezpečnostná trieda: II

Materiál: PC & ABS

Materiál dverí: PC, priehľadný

Teplomer: do 60°C,
v špeciálnom puzdre

Materiál základný: ABS

Záruka: 2 roky od dátumu predaja

Vonkajšie rozmery:

310x155x168mm (D x V x Š)

Vnútorne rozmery:

220x120x150mm (D x V x Š)

Váha: 1,1 kg

CE značka

Aidian Slovakia s.r.o
Karadzičova 8/A
821 08 Bratislava - Ružinov
aidian.eu/sk